

対象モデル

自動ジェット式器具洗浄機 メディカル
NP-TMM7-M


自動ジェット式器具洗浄機 歯科用
NP-TMM7-A

自動ジェット式器具洗浄機 病棟用
NP-TMM7-B

Panasonic®

取扱説明書

自動ジェット式器具洗浄機 専用かご

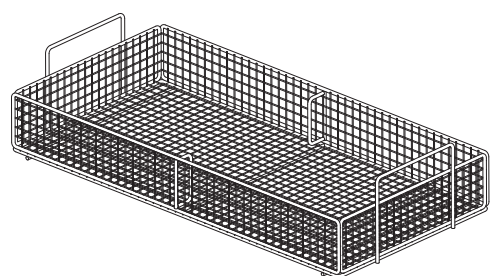

フルバスケット
N-WG31

15種類のかごがあります。
かごの種類については、
2～3ページを参照ください。

品番	N-WG31	N-WG32
	N-WG33	N-WG34
	N-WG35	N-WG36
	N-WG37	N-WG38
	N-WG39	N-WG40
	N-WG41	N-WG42
	N-WG43	N-WG44
	N-WG45	

もくじ

ページ

かご一覧／仕様	2
安全上のご注意	4
必ずお読みください	4
使いかた	5
フルバスケット、ハーフバスケット、 ハーフインストゥルメントラック	5
ミドルバスケット、 ミドルインストゥルメントラック	6
バキュームラック	7
ピンセットラック小	8
ピンセットラック大	9
哺乳瓶ラック	10
クスコラック	11
鉗子ラック上用、鉗子ラック下用	12
鼻鏡ラック、耳鏡ラック	13
ナースングトレラック	14
保証とアフターサービス	14

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■この製品は、自動ジェット式器具洗浄機専用の別売品です。

本書、本体の取扱説明書及び添付文書(電子添文)の各項目についてしっかりご確認のうえ、お使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。













パナソニック株式会社

〒525-0058 滋賀県草津市野路東3丁目4番74号

© Panasonic Corporation 2026

P9901-28N00
F0626-0


かご一覧／仕様

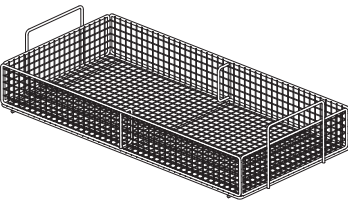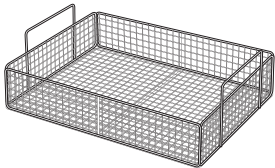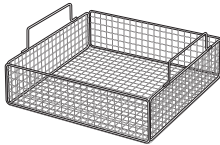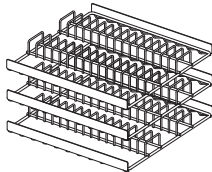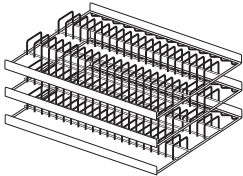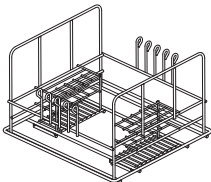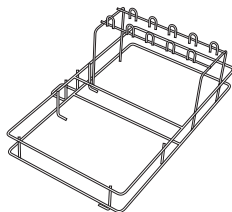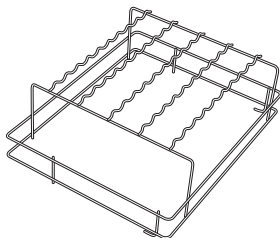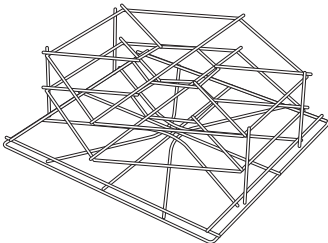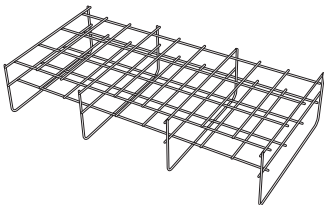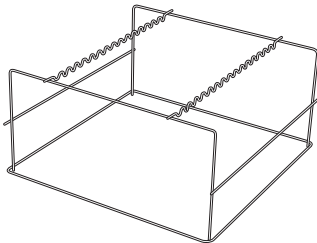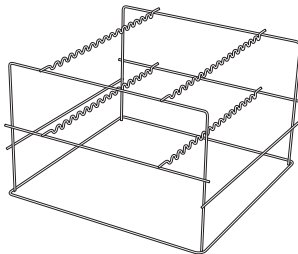フルバスケット(P.5) N-WG31 1個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>449 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>220 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>98 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">660 g</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">—</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	449 mm	奥行	220 mm	高さ	98 mm	製品質量(約)	660 g		標準収容容量	—		ミドルバスケット(P.6) N-WG32 1個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>302 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>220 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>98 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">480 g</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">—</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	302 mm	奥行	220 mm	高さ	98 mm	製品質量(約)	480 g		標準収容容量	—		ハーフバスケット(P.5) N-WG33 1個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>221 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>220 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>94 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">310 g</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">—</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	221 mm	奥行	220 mm	高さ	94 mm	製品質量(約)	310 g		標準収容容量	—		ハーフィンスツルメント ラック(P.5) N-WG34 3個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>212 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>207 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">220 g(1個)</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">棒状鋼製小物類 15本(1個)</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	212 mm	奥行	207 mm	高さ	27 mm	製品質量(約)	220 g(1個)		標準収容容量	棒状鋼製小物類 15本(1個)	
外形寸法 (約)		幅	449 mm																																																				
		奥行	220 mm																																																				
	高さ	98 mm																																																					
製品質量(約)	660 g																																																						
標準収容容量	—																																																						
外形寸法 (約)	幅	302 mm																																																					
	奥行	220 mm																																																					
	高さ	98 mm																																																					
製品質量(約)	480 g																																																						
標準収容容量	—																																																						
外形寸法 (約)	幅	221 mm																																																					
	奥行	220 mm																																																					
	高さ	94 mm																																																					
製品質量(約)	310 g																																																						
標準収容容量	—																																																						
外形寸法 (約)	幅	212 mm																																																					
	奥行	207 mm																																																					
	高さ	27 mm																																																					
製品質量(約)	220 g(1個)																																																						
標準収容容量	棒状鋼製小物類 15本(1個)																																																						
ミドルインスツルメント ラック(P.6) N-WG35 3個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>282 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>207 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">290 g(1個)</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">棒状鋼製小物類 20本(1個)</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	282 mm	奥行	207 mm	高さ	27 mm	製品質量(約)	290 g(1個)		標準収容容量	棒状鋼製小物類 20本(1個)		バキュームラック(P.7) N-WG36 1個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>204 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>201 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>131 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">360 g</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">バキュームヘッド 10本 バキュームチップ 10個</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	204 mm	奥行	201 mm	高さ	131 mm	製品質量(約)	360 g		標準収容容量	バキュームヘッド 10本 バキュームチップ 10個		ピンセットラック小(P.8) N-WG37 1個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>223 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>130 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">150 g</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">ピンセット10本</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	223 mm	奥行	130 mm	高さ	80 mm	製品質量(約)	150 g		標準収容容量	ピンセット10本		ピンセットラック大(P.9) N-WG38 1個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>223 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>181 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>83 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">170 g</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">ピンセット45本</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	223 mm	奥行	181 mm	高さ	83 mm	製品質量(約)	170 g		標準収容容量	ピンセット45本	
外形寸法 (約)		幅	282 mm																																																				
		奥行	207 mm																																																				
	高さ	27 mm																																																					
製品質量(約)	290 g(1個)																																																						
標準収容容量	棒状鋼製小物類 20本(1個)																																																						
外形寸法 (約)	幅	204 mm																																																					
	奥行	201 mm																																																					
	高さ	131 mm																																																					
製品質量(約)	360 g																																																						
標準収容容量	バキュームヘッド 10本 バキュームチップ 10個																																																						
外形寸法 (約)	幅	223 mm																																																					
	奥行	130 mm																																																					
	高さ	80 mm																																																					
製品質量(約)	150 g																																																						
標準収容容量	ピンセット10本																																																						
外形寸法 (約)	幅	223 mm																																																					
	奥行	181 mm																																																					
	高さ	83 mm																																																					
製品質量(約)	170 g																																																						
標準収容容量	ピンセット45本																																																						
哺乳瓶ラック(P.10) N-WG39 1個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>219 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>238 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>76 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">360 g</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">哺乳瓶6本</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	219 mm	奥行	238 mm	高さ	76 mm	製品質量(約)	360 g		標準収容容量	哺乳瓶6本		クスコラック(P.11) N-WG40 1個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>441 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>229 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>96 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">520 g</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">クスコ27個</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	441 mm	奥行	229 mm	高さ	96 mm	製品質量(約)	520 g		標準収容容量	クスコ27個		鉗子ラック上用(P.12) N-WG41 1個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>219 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>220 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>108 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">170 g</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">鉗子16個</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	219 mm	奥行	220 mm	高さ	108 mm	製品質量(約)	170 g		標準収容容量	鉗子16個		鉗子ラック下用(P.12) N-WG42 1個  <table><tr><td rowspan="3">外形寸法 (約)</td><td>幅</td><td>219 mm</td></tr><tr><td>奥行</td><td>220 mm</td></tr><tr><td>高さ</td><td>143 mm</td></tr><tr><td>製品質量(約)</td><td colspan="2">230 g</td></tr><tr><td>標準収容容量</td><td colspan="2">鉗子32個</td></tr></table>	外形寸法 (約)	幅	219 mm	奥行	220 mm	高さ	143 mm	製品質量(約)	230 g		標準収容容量	鉗子32個	
外形寸法 (約)		幅	219 mm																																																				
		奥行	238 mm																																																				
	高さ	76 mm																																																					
製品質量(約)	360 g																																																						
標準収容容量	哺乳瓶6本																																																						
外形寸法 (約)	幅	441 mm																																																					
	奥行	229 mm																																																					
	高さ	96 mm																																																					
製品質量(約)	520 g																																																						
標準収容容量	クスコ27個																																																						
外形寸法 (約)	幅	219 mm																																																					
	奥行	220 mm																																																					
	高さ	108 mm																																																					
製品質量(約)	170 g																																																						
標準収容容量	鉗子16個																																																						
外形寸法 (約)	幅	219 mm																																																					
	奥行	220 mm																																																					
	高さ	143 mm																																																					
製品質量(約)	230 g																																																						
標準収容容量	鉗子32個																																																						

写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

ナーシングトレイラック(P.14)


N-WG43 1個

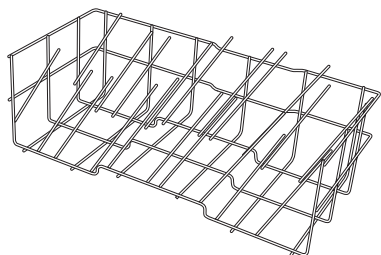

外形寸法 (約)	幅	460 mm
	奥行	209 mm
	高さ	187 mm
製品質量(約)		740 g
標準収容容量		ナーシングトレイ(大) 5個
		ナーシングトレイ(小) 10個

鼻鏡ラック(P.13)


N-WG44 1個

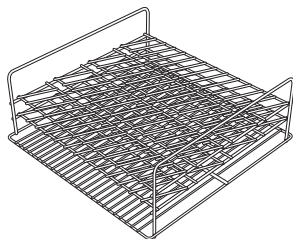

外形寸法 (約)	幅	219 mm
	奥行	220 mm
	高さ	82 mm
製品質量(約)		680 g
標準収容容量		鼻鏡48本

耳鏡ラック(P.13)

N-WG45 1個

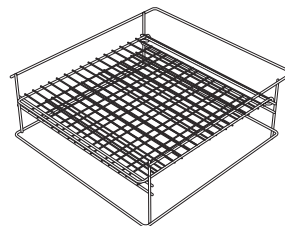


外形寸法 (約)	幅	219 mm
	奥行	235 mm
	高さ	80 mm
製品質量(約)		390 g
標準収容容量		耳鏡49個

■かごの取り付け位置

下記の位置以外に取り付けると、洗浄力が低下します。

- ピンセットラック小
- ピンセットラック大

- ミドルバスケット
- ミドルインスツルメントラック
- ハーフバスケット
- ハーフインスツルメントラック
- 哺乳瓶ラック
- 鉗子ラック上用
- 耳鏡ラック

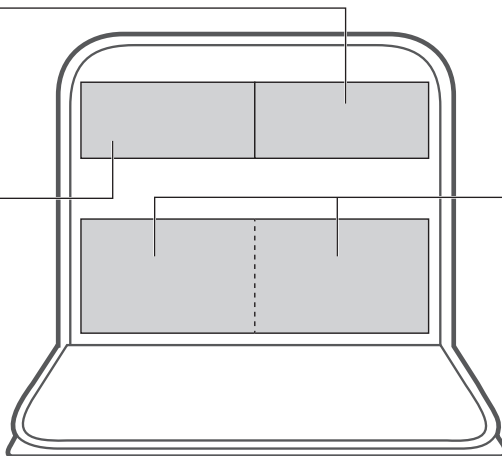

- フルバスケット
- ハーフバスケット
- ハーフインスツルメントラック
- バキュームラック
- 哺乳瓶ラック
- クスコラック
- 鉗子ラック下用
- ナーシングトレイラック
- 鼻鏡ラック
- 耳鏡ラック

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

警告

洗浄・消毒を正しく行うため

- かごは決められた位置に正しくセットする
- 滅菌処理が必要な器具は運転終了後、必要に応じてオートクレーブなどで滅菌する
- 多量の血液や汚れが付着した器具は予洗(予備洗浄)を行う
- 必ず指定の専用かごを使用し、器具を正しくセットする
- 器具のセットおよび取り出し時には必ず手袋を着用する

注意

けがを防ぐため

- 本体に強化ガラス製のものを入れない
(粉々になって飛び散り、けがのおそれ)

必ずお読みください

- 以下のものは洗浄しないでください。
本体劣化や故障の原因になります。
 - ・エアタービンなどのハンドピース(グリス等の潤滑油が飛散・付着し、乾燥時等の温度上昇による庫内変形・破損の原因)
 - ・脱脂綿などの繊維が付着、残留したままの器具
(排水動作不良の原因)
 - ・レジン、印象材、石膏等の材料が付着した器具
(材料が排出されず庫内に残留し、他の器具への付着および経路のつまり等による故障の原因)
- 次の条件に該当するものは、本機で洗浄することができません。
 - ・複雑な形状や管状、内腔形状のもの(ネブライザ、シリンジなど)
 - ・耐熱90℃以下のプラスチック製品
 - ・指定の専用かごにセットできない小さなものや軽いもの
 - ・耐水性のないもの
 - ・庫内に収まらないもの
 - ・割れやすいもの
 - ・軟膏や油脂類が付着したもの
- 次の条件に該当するものは、本機で十分に洗浄できない場合があります。
 - ・長時間放置され乾燥した汚れ
 - ・焼きついた汚れ
 - ・プラスチック製品に堆積した汚れ
- 次の条件に該当するものは、完全に乾燥することはできません。
 - ・口が小さい容器
 - ・底がへこんだり、高台(こうだい)のある容器
 - ・バキュームの内腔部分
 - ・ピンセットの板状金属が重なりあった部分
 - ・プラスチック製品
- 器具同士が重なったり、ドアが閉められないほど入れないでください。
- 器具は、ノズルに当たって回転を妨げないように注意して入れてください。
- 器具は、かごからはみ出さないようご注意ください。
- 標準収容容量を超える器具を入れないでください。
(P.2~3)
- 自動ジェット式器具洗浄機に関する取扱いは、本体の取扱説明書を確認してください。

保管方法

- 変形の原因になりますので、かごを重ねて保管しないでください。
- 塩分やイオウ分を含んだ空気などにより、悪影響の生じるおそれのない場所に保管してください。

使いかた

フルバスケット (N-WG31)

ハーフバスケット (N-WG33)

ハーフインスツルメントラック (N-WG34)


■取り付けかた

1 ハーフインスツルメントラックをフルバスケットまたはハーフバスケットにセットする


■セット方向

向きを間違えてセットすると洗浄力が低下しますので、良い例に従って、正しくセットしてください。

良い例

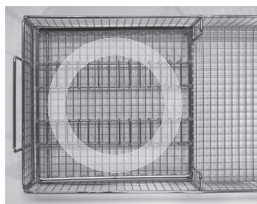


悪い例

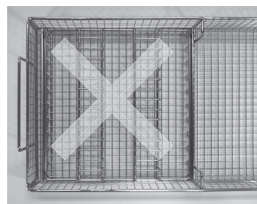


- ハーフインスツルメントラックは、必ずフルバスケットまたはハーフバスケットにセットしてお使いください。ハーフバスケットには3段、フルバスケットには左右それぞれ3段(最大6個)セットすることができます。
- バスケットに器具を直接セットした場合、洗浄力が低下したり、器具がかごから脱落する場合があります。

2 器具をセットする

3 本体標準搭載の下かごを引き出す

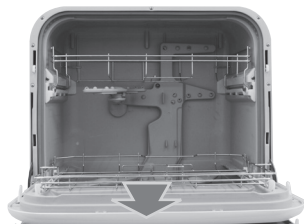

4 フルバスケットまたはハーフバスケットを下かごにセットする

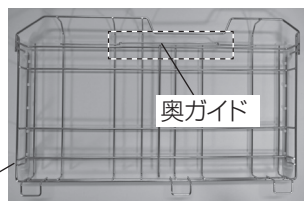

下かご

下かごの奥ガイドに乗り上げないようにしてください。


- ハーフバスケットは上かご左側にもセットできます。上かご右側にセットした場合、洗浄力が低下します。

5 下かごを戻す

■取り外しかた

取り付けかたと逆の手順で行う。

取り付け位置

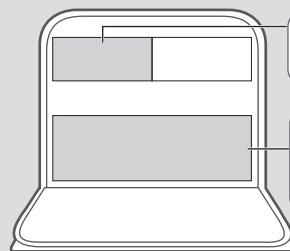

- ・ハーフバスケット
- ・ハーフインスツルメントラック
- ・ハーフバスケット
- ・フルバスケット
- ・ハーフインスツルメントラック

■器具のセット方法(フルバスケット使用時)


1 下段のハーフインスツルメントラックに器具を入れる 棒状鋼製小物類(探針類、スカルペル、捲綿子、舌圧子など)



2 中段のハーフインスツルメントラックをフルバスケットにセットする



3 中段のハーフインスツルメントラックに器具を入れる 棒状鋼製小物類(探針類、スカルペル、捲綿子、舌圧子など)

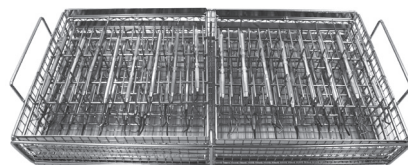


同様に上段のハーフインスツルメントラックをフルバスケットにセットし、器具を入れる。

- ・標準収容容量: 15本(ハーフインスツルメントラック 1個あたり)
- ・洗浄できる棒状鋼製小物: 長さ50~188 mm
持ち手部の幅10 mm以下

- 器具同士が重ならないようにセットしてください。
- 小さく軽い器具は、噴射によりかごから脱落する場合がありますので、洗浄しないでください。
- 器具はラックの外周に乗り上げないようにご注意ください。

良い例

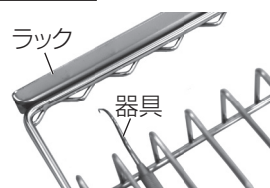

ラックの外周から離してセットしてください。

悪い例




器具がラックに乗り上げていると、ラックとの接触面に汚れが残る場合があります。

使いかた

ミドルバスケット (N-WG32)

ミドルインストルメントラック (N-WG35)

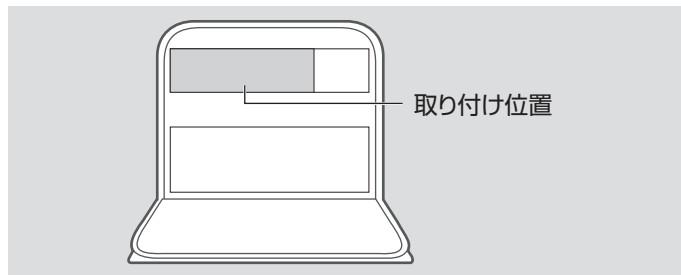

■取り付けかた

1 ミドルインストルメントラックをミドルバスケットにセットする

- ミドルインストルメントラックは3段までセットできます。




- ミドルインストルメントラックは、必ずミドルバスケットにセットしてお使いください。
- ミドルバスケットに器具を直接セットした場合、洗浄力が低下したり、器具がかごから脱落する場合があります。

2 器具をセットする

3 本体標準搭載の上かごを引き出す

4 ミドルバスケットを上かごの左側にセットする

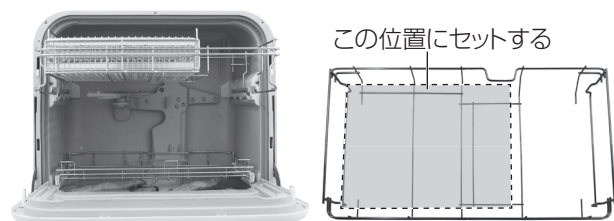


5 上かごを戻す

■取り外しかた


取り付けかたと逆の手順で行う。

■器具のセット方法


1 下段のミドルインストルメントラックに器具を入れる 棒状鋼製小物類 (探針類、スカルペル、捲綿子、舌圧子など)

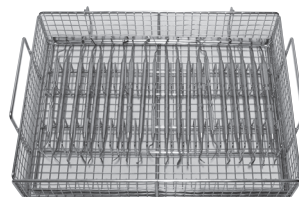

2 中段のミドルインストルメントラックをミドルバスケットにセットする

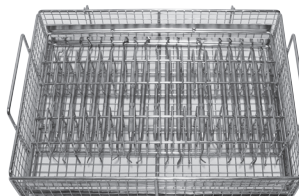

3 中段のミドルインストルメントラックに器具を入れる 棒状鋼製小物類 (探針類、スカルペル、捲綿子、舌圧子など)

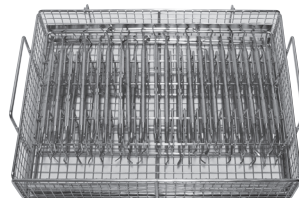

同様に上段のミドルインストルメントラックをミドルバスケットにセットし、器具を入れる。

- ・標準収容容量: 20本 (ミドルインストルメントラック 1個あたり)
- ・洗浄できる棒状鋼製小物: 長さ50~188 mm
持ち手部の幅10 mm以下

- 器具同士が重ならないようにセットしてください。
- 小さく軽い器具は、噴射によりかごから脱落する場合がありますので、洗浄しないでください。
- 器具はラックの外周に乗り上げないようにご注意ください。

良い例



ラックの外周から離してセットしてください。

悪い例




器具がラックに乗り上げていると、ラックとの接触面に汚れが残る場合があります。

バキュームラック (N-WG36)


■取り付けかた

1 本体標準搭載の下かごを引き出す

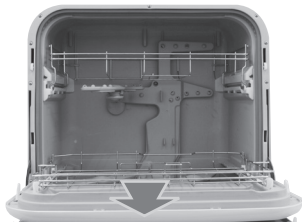

2 バキュームラックを下かごにセットする


- バキュームラックの底面凸部を、下かごの固定穴に合わせてください。

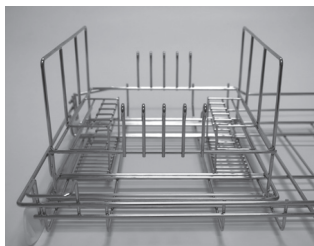


■セット方向

向きを間違えてセットすると洗浄力が低下しますので、良い例に従って、正しくセットしてください。


良い例

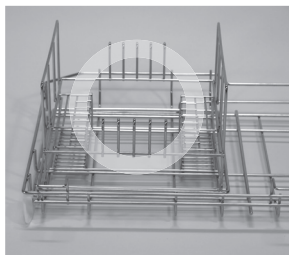

悪い例

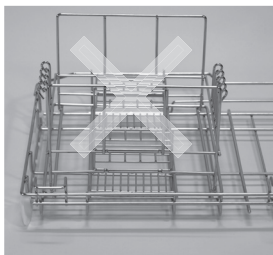


- バキュームラックは左右どちらにもセットすることができ、2つ並べて使うことができます。

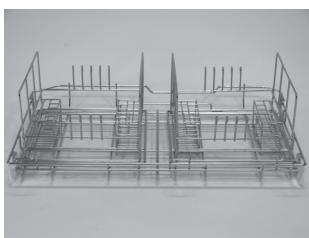

3 下かごを戻す

■取り外しかた

取り付けかたと逆の手順で行う。

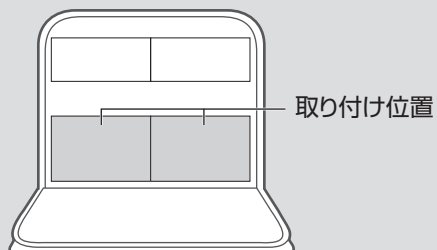


■器具のセット方法


バキュームヘッド



- 標準収容容量: バキュームヘッド10本、バキュームチップ10個
- バキューム適合サイズ: 内径φ10~11 mm
- バキュームヘッド: 長さ160 mm以下

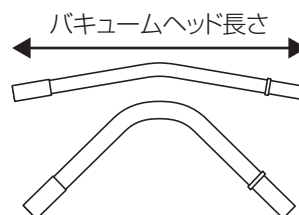

バキュームチップ

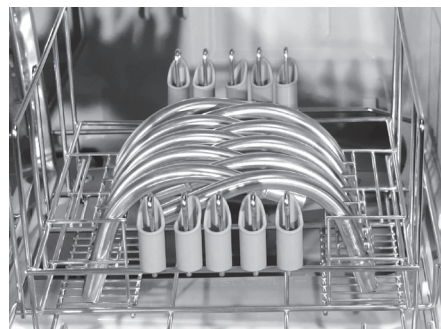

- 内側にトラップが付いたバキュームチップは奥まで差し込めないため使用できません。




使いかた

ピンセットラック小(N-WG37)


■取り付けかた

1 本体標準搭載の上かごを取り外す


- NP-TMM7-Bを使用する場合、ガーグルベース用ラックを取り外してください。

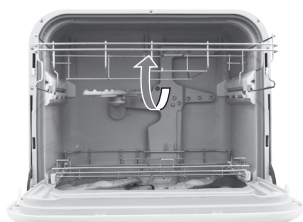


2 ピンセットラック小を上かごの右側にセットする

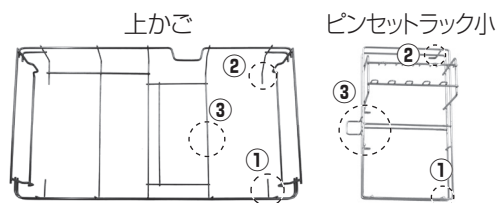


① 手前に差し込む

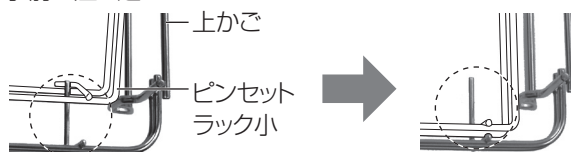

② 奥側を差し込む

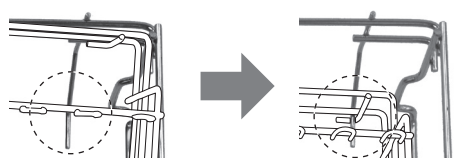

③ 引っ張りながら2か所セットする

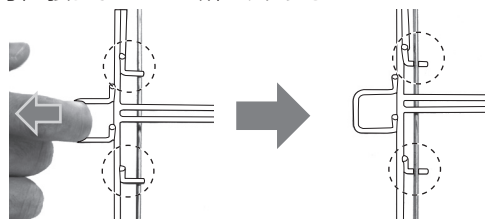


3 上かごを本体にセットする

4 器具をセットする

5 上かごを戻す


■取り外しかた

取り付けかたと逆の手順で行う。

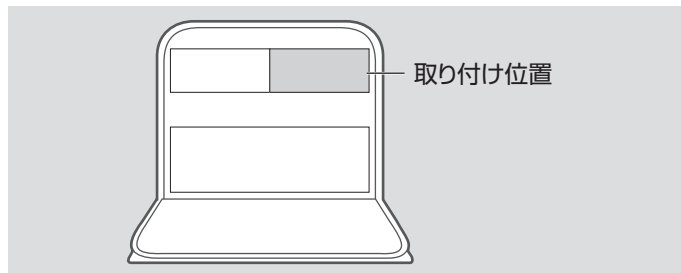


■器具のセット方法

1 先端を下にしてピンセットをセットする

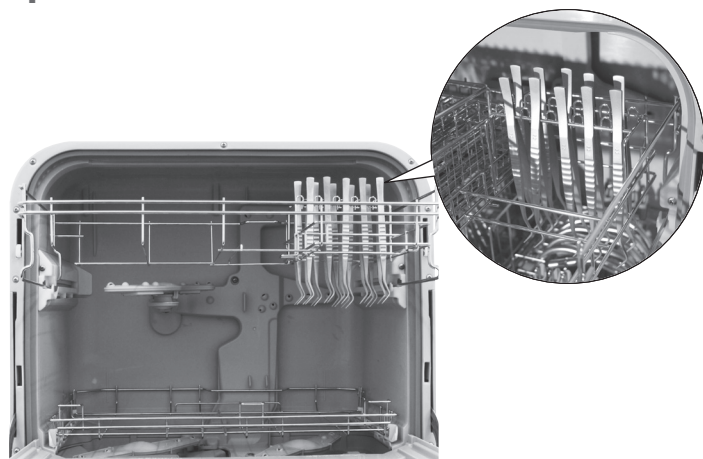

- 標準収容容量: 10本
- 洗浄できるピンセット: 長さ160 mm以下

悪い例

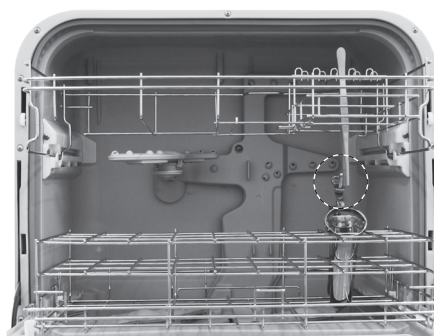

ピンセットは、庫内および下かごにセットする器具やかごに当たらないようにセットしてください。


ピンセットラック大 (N-WG38)

■取り付けかた


1 本体標準搭載の上かごを引き出す

- NP-TMM7-AおよびNP-TMM7-Bを使用する場合、付属のピンセットラック小、または、ガーグルベースン用ラックを取り外してください。


2 ピンセットラック大を上かごの右側にセットする

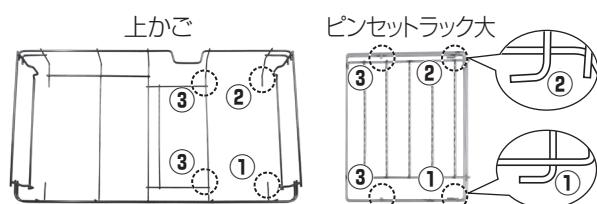


① 手前側を掛ける

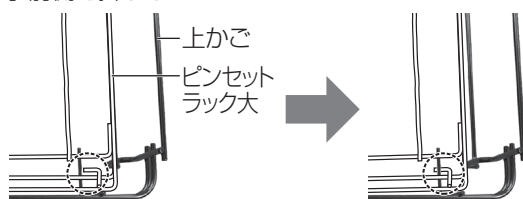

② 傾けながら奥側を掛ける

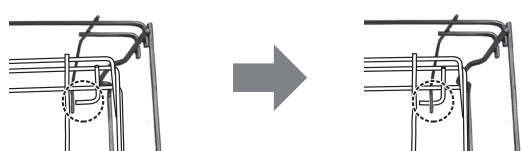

③ ピンセットラック大の左側を降ろしてセットする

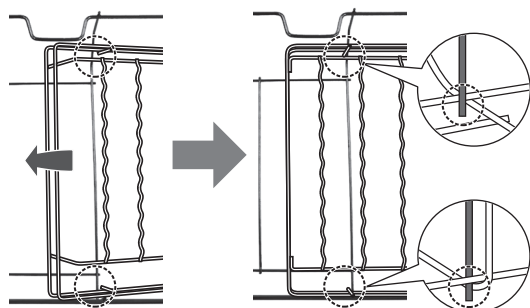

3 器具をセットする


4 上かごを戻す

■取り外しかた

取り付けかたと逆の手順で行う。

■器具のセット方法

1 先端を下にしてピンセットをセットする

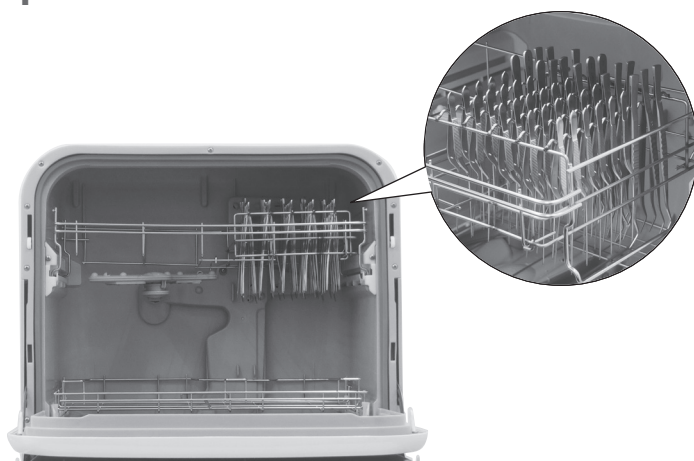


- 標準収容容量: 45本
- 洗浄できるピンセット: 長さ160 mm以下

悪い例



ピンセットは、庫内および下かごにセットする器具やかごに当たらないようにセットしてください。

凸部にセットしている 凹凸のないところにセットしている

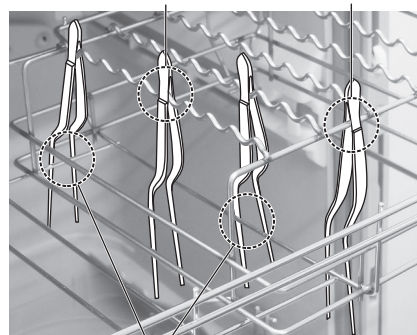

上かごに引っかかっている


使いかた

哺乳瓶ラック (N-WG39)


■取り付けかた

本体標準搭載の上かごに取り付ける場合

- 1 本体標準搭載の上かごを引き出す
- 2 哺乳瓶ラックを左側にセットする

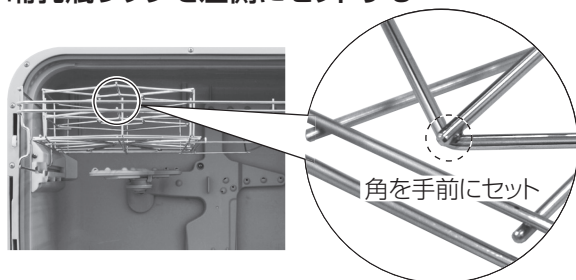

この位置にセットする

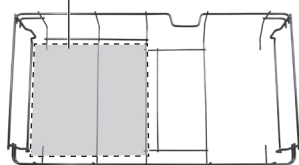


●哺乳瓶ラックを右側にセットした場合、洗浄力が低下します。

- 3 哺乳瓶をセットする
- 4 上かごを戻す

本体標準搭載の下かごに取り付ける場合

- 1 本体標準搭載の下かごを引き出す
- 2 哺乳瓶ラックをセットする


左右どちらにもセットでき、2つ並べて使うことができます。

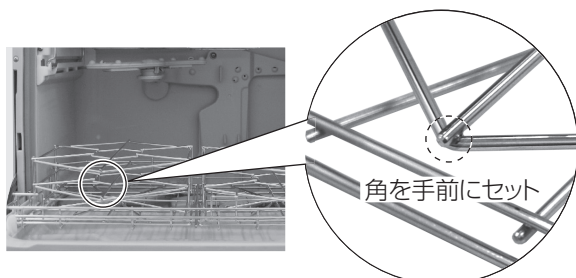

- 3 哺乳瓶をセットする
- 4 下かごを戻す

■取り外しかた


取り付けかたと逆の手順で行う。

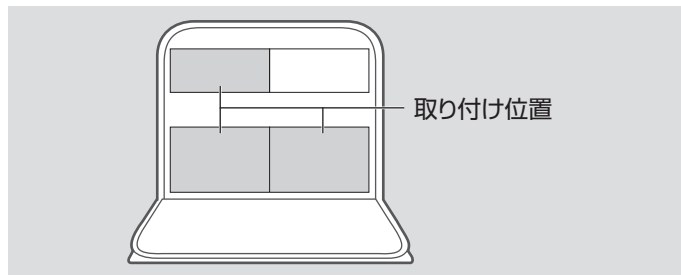

■哺乳瓶のセット方法

上かご(左)

汚れた面を矢印→方向にセットする。

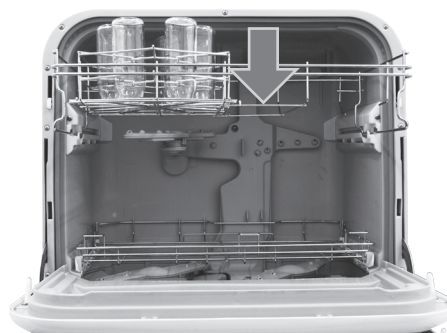

- ・標準収容容量: 6本(1個あたり)
- ・洗浄できる哺乳瓶のサイズ: 高さ76~117 mm
直径40~62 mm

下かご(左右)

汚れた面を矢印→方向にセットする。



- ・標準収容容量: 6本(1個あたり)
- ・洗浄できる哺乳瓶のサイズ: 高さ76~170 mm
直径40~62 mm


- 口が小さい、または底がへこんだり、高台(こうだい)のある哺乳瓶は、乾燥後に水が残る場合があります。
- マグタイプ(取っ手付)の哺乳瓶はセットできません。

クスコラック (N-WG40)

■取り付けかた

1 本体標準搭載の下かごを引き出す

2 クスコラックをセットする

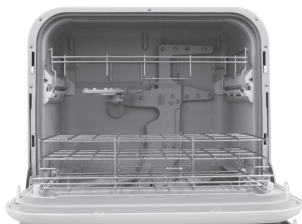


3 クスコをセットする

4 下かごを戻す

■取り外しかた

取り付けかたと逆の手順で行う。

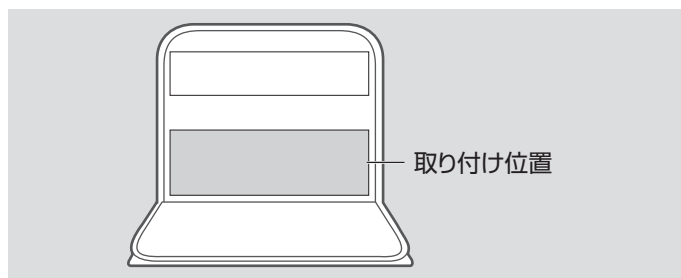

■クスコのセット方法

ネジは、できるだけ広げる



奥側からセットする。

・標準収容容量: 27個(Mサイズの場合)

●クスコ同士が当たらないようにセットしてください。

悪い例



下かごを本体に押し込んだときに洗浄機のノズル部分に当たらないようにセットしてください。

使いかた

鉗子ラック上用 (N-WG41)


鉗子ラック下用 (N-WG42)

■取り付けかた

鉗子ラック上用の取り付け

1 本体標準搭載の上かごを引き出す

2 鉗子ラック上用を上かごの左側にセットする

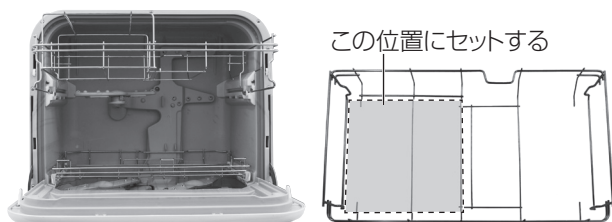

● 鉗子ラック上用を右側にセットした場合、洗浄力が低下します。

3 鉗子をセットする


4 上かごを戻す

鉗子ラック下用の取り付け

1 本体標準搭載の下かごを引き出す

2 鉗子ラック下用をセットする

左右どちらにもセットでき、2つ並べて使うことができます。

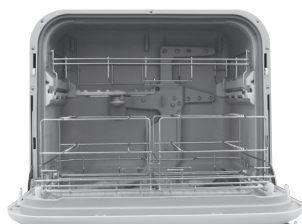

3 鉗子をセットする

4 下かごを戻す


■取り外しかた

取り付けかたと逆の手順で行う。


取り付け位置

鉗子ラック上用


鉗子ラック下用

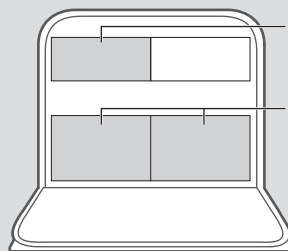

■鉗子のセット方法

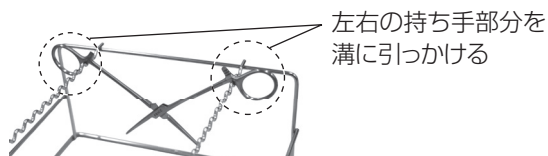


鉗子ラック上用

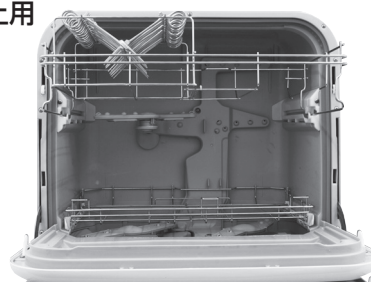

- 標準収容容量: 16個(1個あたり)
- 洗浄できる鉗子のサイズ: 140～180 mm*

鉗子ラック下用

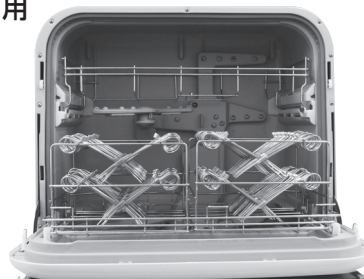

2段使用の場合

- 標準収容容量: 32個(1個あたり)
- 洗浄できる鉗子のサイズ: 140～160 mm*


1段使用の場合

- 標準収容容量: 16個(1個あたり)
- 洗浄できる鉗子のサイズ: 140～200 mm*

※ 鉗子形状により入らない場合があります。

● 鉗子同士が当たらないようにセットしてください。

悪い例

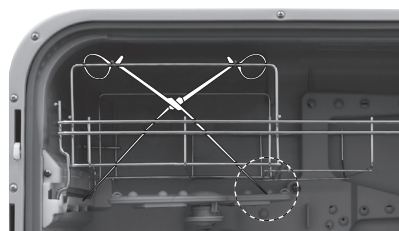

洗浄機のノズル部分に当たらないようにセットしてください。

鼻鏡ラック (N-WG44)


耳鏡ラック (N-WG45)

■取り付けかた

上かごへの取り付け

1 本体標準搭載の上かごを引き出す

2 耳鏡ラックを上かごの左側にセットする

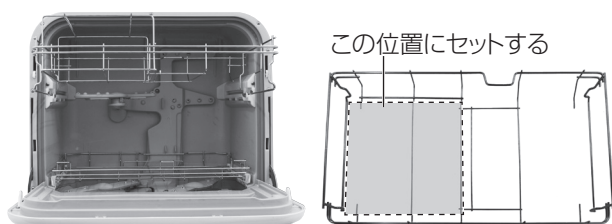

- 耳鏡ラックを右側にセットした場合、洗浄力が低下します。
- 鼻鏡ラックは上かごの左側にはセットできません。

3 耳鏡をセットする

4 上かごを戻す

下かごへの取り付け

1 本体標準搭載の下かごを引き出す


2 鼻鏡ラック、または耳鏡ラックをセットする

左右どちらにもセットでき、2つ並べて使うことができます。



3 鼻鏡、または耳鏡をセットする

- 耳鏡をセット後、耳鏡ラックのふたをしてください。

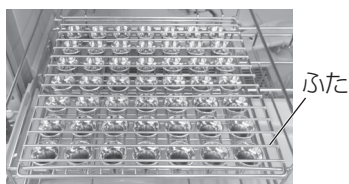

4 下かごを戻す

■取り外しかた

取り付けかたと逆の手順で行う。

取り付け位置

耳鏡ラック

● 鼻鏡ラック

● 耳鏡ラック

■器具のセット方法

鼻鏡ラック

- 標準収容容量: 鼻鏡48本
- 洗浄できる鼻鏡の種類: ハリトマン式、和辻式 (全長125~135 mm、先端長さ28 mm以下)
- キリアン式は隣の鼻鏡と先端が重ならないよう間隔をあけてセットしてください。

■セット方向

向きを間違えてセットすると洗浄力が低下しますので、良い例に従って、正しくセットしてください。


良い例



悪い例



- 鼻鏡同士が当たらないようセットしてください。

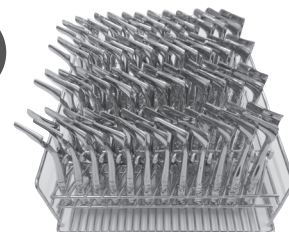

耳鏡ラック

- 標準収容容量: 耳鏡49個
- 洗浄できる耳鏡の種類: 朝顔型、トレルチ型、ルーチェ型など (後端外径φ18~25 mm、高さ37 mm以下)


- 大きいマス目に耳鏡をまっすぐセットしてください。

良い例



悪い例

- 洗浄力が低下するため、耳鏡ラックをセットした上には器具を置かないでください。

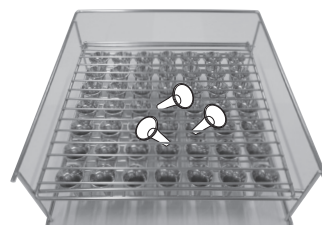

使いかた


ナーシングトレイラック (N-WG43)

■取り付けかた

- 1 本体標準搭載の下かごを引き出す
 - 2 ナーシングトレイラックをセットする
- 
- 3 ナーシングトレイをセットする
 - 4 下かごを戻す

■取り外しかた


取り付けかたと逆の手順で行う。

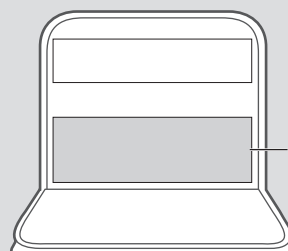


取り付け位置

■ナーシングトレイのセット方法

汚れた面を矢印→方向にセットする。

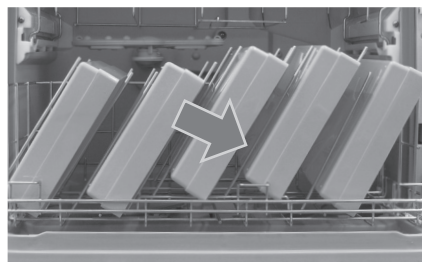

・標準収容容量: 238×171×45 mm(大)の場合 5個

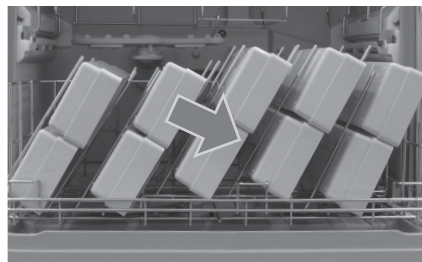

・標準収容容量: 238×84×45 mm(小)の場合 10個

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使い方・お手入れ・修理などは

まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

●製品名 自動ジェット式器具洗浄機 専用かご

- 品番
- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ N-WG31 | ☐ N-WG32 | ☐ N-WG33 |
| ☐ N-WG34 | ☐ N-WG35 | ☐ N-WG36 |
| ☐ N-WG37 | ☐ N-WG38 | ☐ N-WG39 |
| ☐ N-WG40 | ☐ N-WG41 | ☐ N-WG42 |
| ☐ N-WG43 | ☐ N-WG44 | ☐ N-WG45 |

☐ 梱包箱のラベルを参照し、品番にチェックを入れてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご依頼ください。
保証期間: お買い上げ日から1年間

■お問い合わせは、お買い求め先へご連絡ください。

■医療機器の廃棄基準、廃棄方法について

医療機器の廃棄物は、産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の資格を有する処理業者に依頼してください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。



〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下、衝撃等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ) 指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

自動ジェット式器具洗浄機 専用かご保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	☐ N-WG31 ☐ N-WG32 ☐ N-WG33 ☐ N-WG34 ☐ N-WG35 ☐ N-WG36 ☐ N-WG37 ☐ N-WG38 ☐ N-WG39 ☐ N-WG40 ☐ N-WG41 ☐ N-WG42 ☐ N-WG43 ☐ N-WG44 ☐ N-WG45
保証期間	お買い上げ日から 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —
※ 販売店	住所・販売店名 _____ 電話 () —

パナソニック株式会社

〒525-0058 滋賀県草津市野路東3丁目4番74号 TEL 077(563)5211

キリトリ線
✂

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。