

聞こえのお役立ち情報、満載
パナソニック補聴器ホームページ

panasonic.jp/hochouki

◎ホームページの内容及びデザインは予告なく変更する場合があります。

補聴器に関する別売品はこちら

補聴器の効果を発揮するため、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。しかし装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

オーダーメイド補聴器

オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、形状の作り替えを無料で行います。(購入後90日以内)
・オーダーメイドイヤチップWH-PF17、PF20の場合、形状の作り替え(無料)は購入後90日以内です。

補聴器をお買い上げになる前に、
次のような経験をお持ちの方は、耳鼻咽喉科医に、
補聴器使用についてご相談ください。

1.耳だれ、耳の痛み、めまい、耳鳴りなどの自覚症状がある。
2.聴力が急激に変化した。
3.過去に耳の手術をしたことがある。
4.耳あかが大量に出る、またはそのような体質である。

その他使用上のご注意

①適切な音量でご使用ください。②使用しないときは、電源を切りましょう。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙、騒音の多い場所でのご使用、また耳の近くで突然大きな音を出すことはおやめください。補聴器の故障や耳に悪影響を及ぼす場合があります。

愛情点検

定期的に販売店に点検をご依頼ください。

補聴器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。

こんな症状はありませんか

●ACアダプターが異常に熱い。●煙が出たり、異常なおいや音がする。●水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。●補聴器・イヤチップに耳あかがつまっていませんか。

▶

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切ったあと、コンセントからACアダプターを抜いて(充電式の場合)、必ず販売店に点検をご相談ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/about/privacy-policy

表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、
適正な表示を推進しています。

パナソニック
家電製品正規取扱店
詳しくはこちら

パナソニック補聴器相談センター

月-金曜日(祝日・年末年始、お盆を除く) 受付9時-17時30分

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

0120-045-285

携帯電話からでもご利用いただけます。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証書に関するお願い

●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保管ください。

なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店どうぞ…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック補聴器相談センターに
おたずねください。

パナソニック補聴器株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日 2025年4月1日

HI-134

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

Panasonic

補聴器
総合カタログ
2025/VOL.1



つながろう、
あたらしい世界と。




人と人をつなぐ

パナソニックの補聴器


本カタログ掲載商品の価格には、配送、設置費、工事費、増設工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

まずはご自分の「聞こえ」を知ることから、はじめましょう

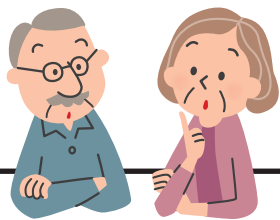

どのくらい聞こえているのか、よく分からないのですが？


→ 普段の生活を振り返り、チェックしてみましょう。

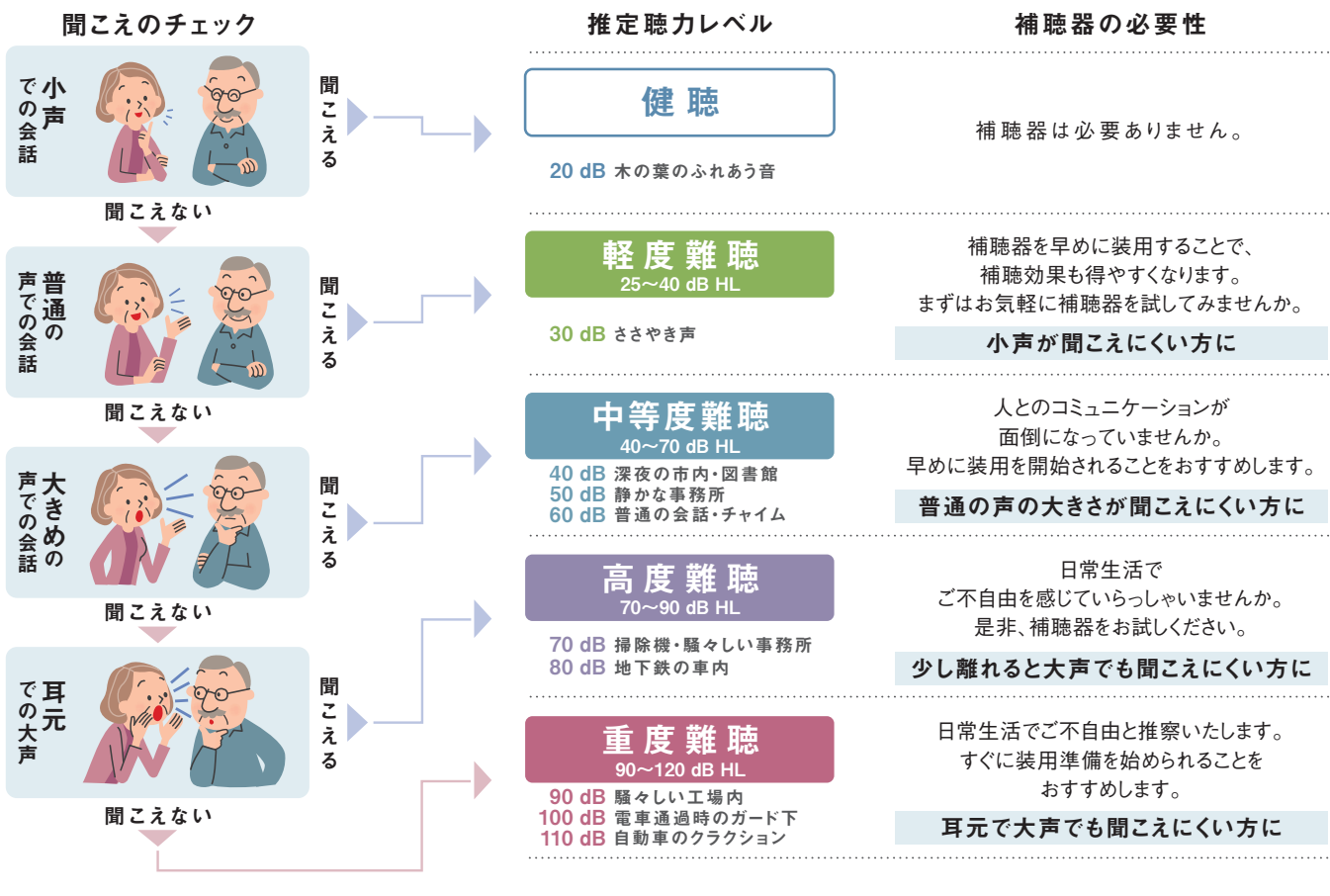

なぜ聞き取りにくくなるのですか？

→ 原因は大きく分けて3つあります。

伝音性難聴	感音性難聴	混合性難聴
鼓膜の損傷や中耳炎の後遺症などで音が伝わりにくくなることによる難聴です。医学的に治療できる可能性があります。	老化による衰えなどにより、感覚器に障害がある場合に起こる難聴です。補聴器の使用で聞こえが改善する可能性があります。	伝音性難聴と感音性難聴の両方の特徴を併せ持った難聴です。耳鼻咽喉科医の診察をお受けになることをおすすめします。
聞こえの状態はお一人おひとり異なります。耳鼻咽喉科医の診察をお受けになることをおすすめします。		

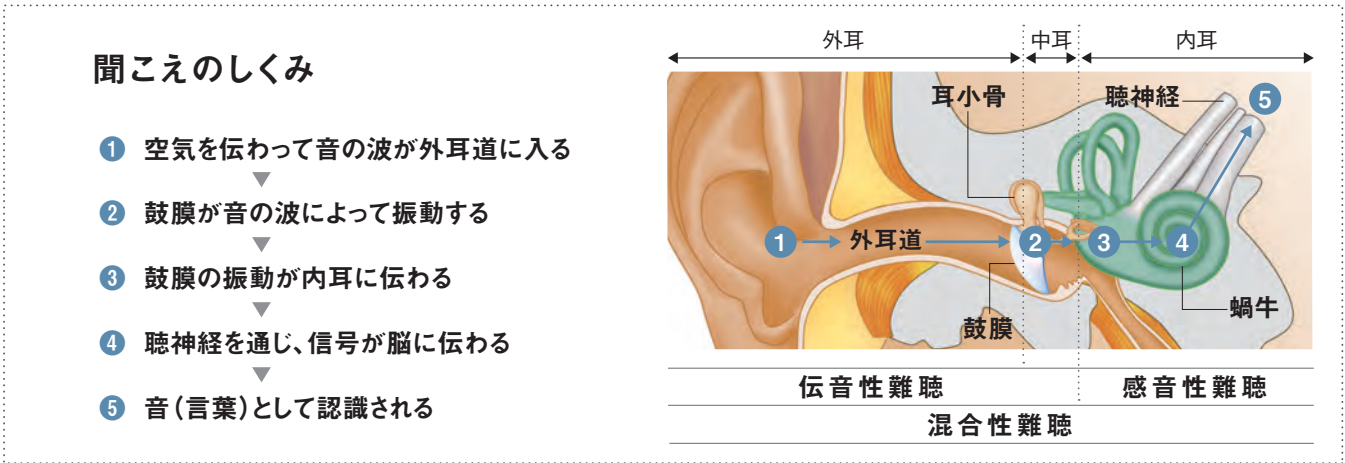


聞き取りにくくなるのは誰にでもあることでしょうか？

→ 聴力は40歳前後から、弱まると言われています。聞こえの変化は、どなたにでも起こり得ることで

加齢に伴う聴力変化

横軸の数字は音の高さ(ヘルツ)を表しています。横軸の左から右へ行くほど音が高くなります。縦軸の数字は音の大きさ(デシベル)を表しています。0デシベルは正常な方が聞くことの出来る最小の音で、数値が大きくなるほど大きい音でないと聞こえないことを示します。25デシベル以下が正常の範囲です。

参考文献
「よくわかる難聴」
出版社：金原出版 著者：立木 孝先生
※日本人聴力の加齢変化の研究、立木 孝、他、
Audiology Japan 45, 241~250, 2002

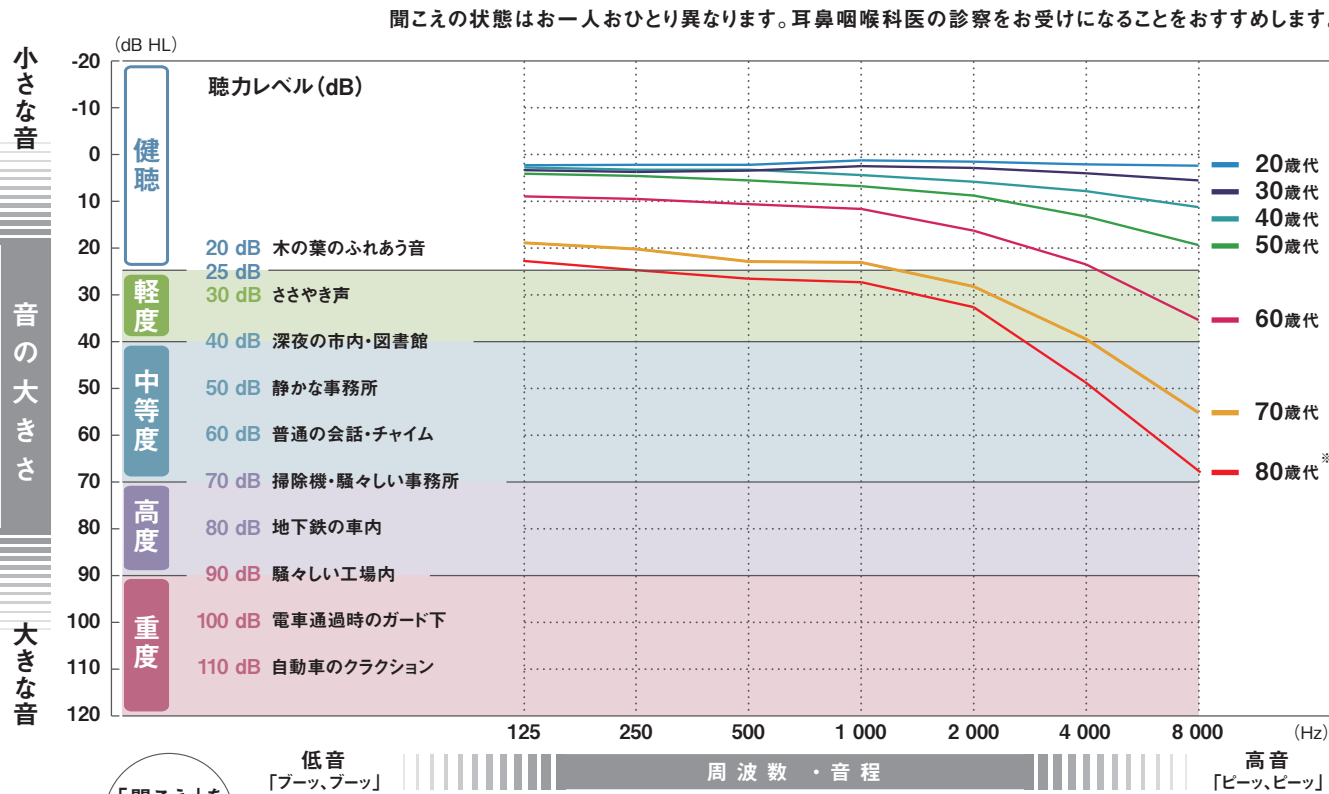

		語音明瞭度(肉声)																正解数	%	機種名
裸耳	右・左																		%	
	右・左																		%	
補聴器装用	右・左																		%	
	右・左																		%	

販売店からのご提案

あなたにおすすめの補聴器は

左: WH-

(本カタログP. __)


右: WH-

(本カタログP. __)

納得のいくまで、ご自分に合った補聴器 をお選びください


カウンセリングから点検まで、安心してご納得・ご購入いただける—8つのステップ

① カウンセリング




聞こえにくいと感じる場面などをお尋ねします。より適した補聴器を選ぶため、お困りごとやお悩みを率直にお聞かせください。

② 聴力測定




どのくらい小さな音まで聞こえるか、言葉の聞き取り具合はどうかなど、聞こえの状態を詳しく測定します。

③ 試聴




補聴器を実際に装着してつけ心地、音の大きさ、ピーピー音がないか、ご自身の声の違和感、周囲の雑音の違和感などをご確認いただきます。

④ 測定結果の説明




聴力レベルをもとに聞こえの状態をご説明します。ご自分の聞こえの状態をきちんと知っていただくことが大切だと考えています。

⑤ 補聴器選び




聞こえのレベル、ご希望やご予算に合わせて、さまざまな機種の中からあなたにより適した補聴器をご提案します。

⑥ 調整・ご購入




同じ機種の補聴器でも、お一人おひとりの調整は異なります。あなたにより適した状態に調整してからご購入いただきます。

⑦ 再調整



日常生活の中で、お気づきになる点があるかもしれません。ご希望に応じて再調整いたしますので、お気軽にご来店ください。

⑧ 定期点検




ご購入後は、電池交換、音質調整、掃除などが必要になります。より快適に長くお使いいただけるよう、お手入れいたします。

より自然な聞こえには 両耳装用をおすすめします

メガネも片側だけでは上手く機能しないように、補聴器も両耳装用がおすすめ。片耳に比べて、聞こえの機能をより引き出すことができます。

両耳装用の良さをさらに引き立たせる
ダイコティック補聴処理技術

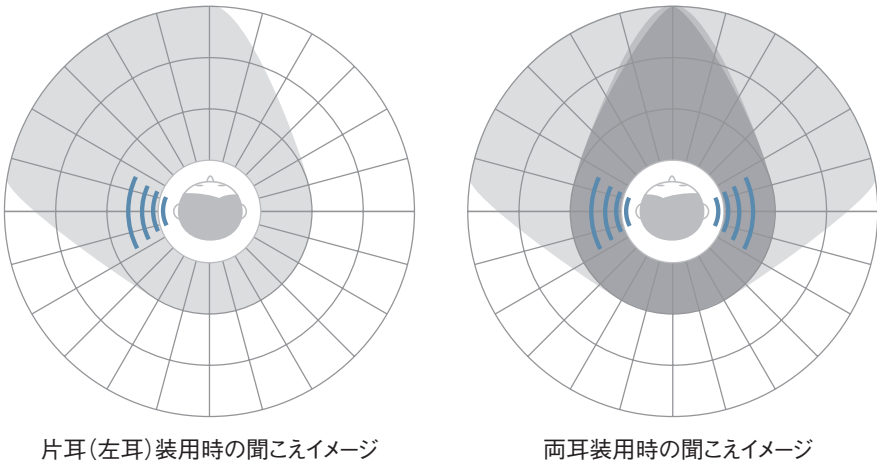

(((両耳で聞くから)))

音の臨場感が
ちがう

音を立体的にとらえることができ、より自然で臨場感豊かな世界が広がります。

騒音下でも
会話しやすい

雑踏での会話、銀行や病院で呼ばれる時など、騒がしい場所でもより聞き取りやすくなります。

耳への負担、
ストレスを低減


片耳装用に比べて補聴器の音量を上げなくても聞きやすく、疲れにくくなります。

車の接近も
わかりやすい

音の方向感や距離感がつかみやすいので、車の接近などもわかりやすくなります。


はっきりしない単語も聞き取りやすい 両耳の良さをさらに引き立たせる「聞き取りサポート」機能搭載

通常の両耳補聴の聞こえ



おださん
O D A S A N

「聞き取りサポート」機能の聞こえ
(ダイコティック補聴処理技術)



おださん
O D A S A N

ダイコティック補聴処理技術


パナソニックは、左右の耳で母音と子音を分担して聞くことで、言葉の聞き分けを助ける機能を開発しました。

● 効果には個人差があります。● 片耳装用の場合には使用できません。

対象品番

R5 シリーズ	WH-R59、R57、R55、R53
C5 シリーズ	WH-C59、C57、C55、C53
G4 シリーズ	WH-G47、G45、G43

「音は聞こえるが、言葉がはっきりしない」
という方におすすめします。

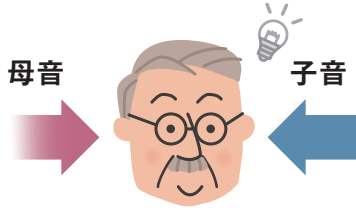

大切な補聴器をずっと快適に ご愛用いただくために

補聴器に早く慣れるには、ちょっとしたコツがあります

毎日疲れない程度（30分～1時間）で1ヶ月は使い続け、
慣れてきたら使う時間を増やしましょう。

補聴器に
慣れるための
4ステップ


- 1 静かな場所で
自分の声を、
自分で聞いてみてください。



- 2 ご家族やお友だちと
静かな場所で
会話してみてください。



- 3 テレビのニュースを
まわりの人たちと同じ音量で
聞いてみてください。

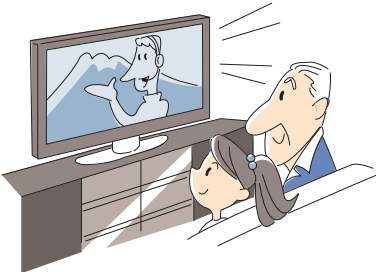

- 4 静かな場所で
4～5人の人と
話をしてみてください。



ご家族の協力も大切です

ご本人が補聴器を使いこなせるようになるまで、
あたたかな応援と協力をお願いします。
それがうれしい励みになります。



相手に注意を促し
顔を見て話しましょう。

意思を伝えるのに、
顔の表情や動作は
大切な役割を果たします。



ゆっくり、はっきり
話しましょう。

聞き取りやすいように、
丁寧な話し方で接します。



普通の大きさの声で
話しましょう。

補聴器が音を大きくするため、
大声はむしろ
聞き取りにくくなります。



言い回しをいろいろ変えて
話しましょう。

聞き取りにくいときは
同じ言葉を繰り返すより、
言い方を変える方が効果的です。




ご購入後に必要なこと

音質調整やメンテナンスを積み重ねていくことにより、お耳に合わせていきます。
より快適に長くお使いいただき、「聞こえるよろこび」をご堪能ください。

補聴器のお掃除は
こまめに。



充電電池の充電と
電池の交換時期を
お忘れなく。

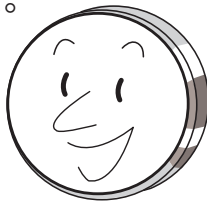

気になるときは
音質の調整をご依頼ください。




充電式
耳かけ型

R5 シリーズ 
 >> P.9～15

より心地よい装着感と
やさしさをカタチに

先進性とやさしさを兼ね備えた新しいカタチに、髪色や肌なじみが良い4色、ファッショナブルで活動的な2色をラインナップ。身に着けるアイテムとしてより心地良いものを目指しました。

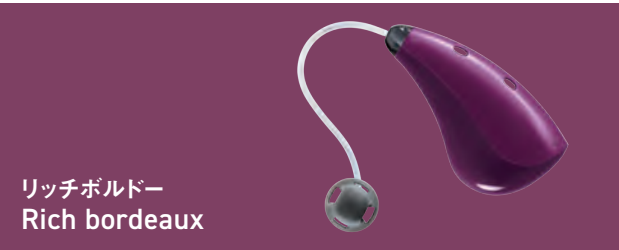

充電式 オーダーメイド
耳あな型
C5 シリーズ
>> P.9～14・P.16

 GOOD DESIGN AWARD
2024年度受賞

ファッショナブルで
ユニセックスなスキンカラー

着けていることをもっとポジティブに感じる新デザインを採用。
肌なじみが良く目立ちにくい色でありながら、
ものとしてバリューのある存在感を放ちます。



パナソニック初
充電式
オーダーメイド

充電式
耳あな型
G4 シリーズ
>> P.17～18



持ちやすく耳に着けやすい

グリップ部分をつまんでより簡単に装着できます。角がなく温かみを感じられる本体デザインを採用。
両耳モデルには気分やファッションに合わせてコーディネートできる、
8つのカラーのストラップをお選びいただけます。



充電式補聴器の特長

毎月の電池交換が不要

本体内に充電電池を内蔵。小さな電池を交換する面倒がなく、電池を買い忘れる心配もありません。

毎日の乾燥が不要

面倒な乾燥の手間がなく、サッと片付けられてすぐに使えます。乾燥剤の交換も不要です。

充電はケースに入れるだけ

ケースに入れるだけで簡単に充電。夜、寝ている間にできて便利です。

密閉構造で故障しにくい

密閉ボディだから中に汗が入りにくく、故障しにくい構造です。

充電式補聴器
ラインナップ・主な特長

充電式耳かけ型
R5

充電式耳あな型
C5

充電式耳あな型
G4

別売品

ラインナップ・他

聞こえの進化で もっとつながる


R5 / C5 シリーズ



にぎやかな場所でも 話したい人との会話がより聞き取りやすい

ボイスフォーカス (WH-R59、C59のみ搭載)

マイクの集音範囲を絞ることで騒音下でも相手の声を聞き取りやすくする指向性処理。新開発の「ボイスフォーカス」機能は、従来機種に搭載している指向性処理に比べて後ろや横からの音声をより強く抑えられるので、レストランや雑踏などの騒音下でも相手の声がより聞き取りやすくなります。

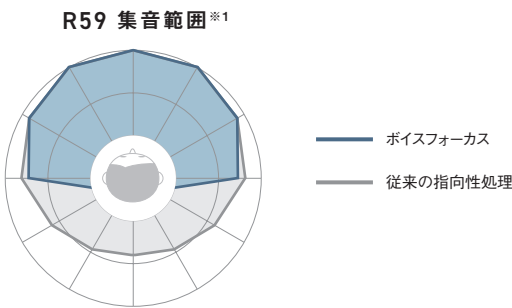

後ろや横からの
音声をカットして
正面からの会話を
際立たせる

※1 【集音範囲測定方法】
指向性処理以外の機能はすべて無効とし、各方向からの音圧レベルをボイスフォーカスおよび当社従来のカーディオイド指向性を用いて測定
●当社調べ (WH-R59で測定し、2kHzの成分を図示) ●集音範囲は使用条件によって変わります

テレビやスマホ、タブレットとつながり、 動画や音楽をより良い音で楽しめる

スマホ・タブレット連携※1

スマホやタブレットと補聴器が直接つながるので、動画や音楽をより良い音で楽しめます。

テレビアダプター

進化したテレビアダプターは、より高音質で複数の補聴器と同時に接続可能。テレビと補聴器をつなぎ、家族と同じ音量でテレビが楽しめます。

テレビアダプター
R5/C5シリーズ専用※2
WH-PM1304J




広帯域

当社従来機種に比べて広範な周波数帯域をカバー。音の表現力を高め、動画や音楽のニュアンスをよりクリアに表現します。



動画や
音楽を
楽しめる

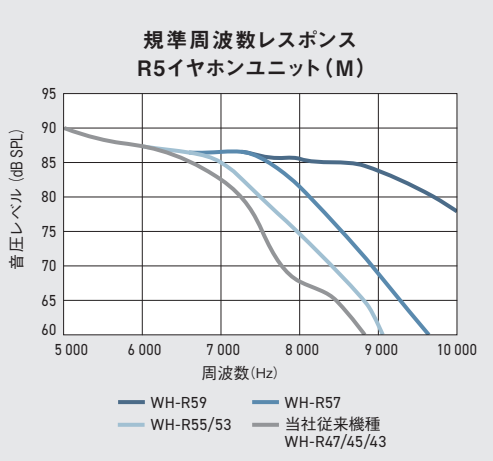

スマホと直接つながるから よりクリアな音声で電話が楽しめる

スマホ通話※1

スマホと直接つながることで、補聴されたよりクリアな音声で電話を楽しむことができます。

●屋外や周囲音のある場所での通話の際は、スマホのマイクに口元を近づけて通話ください。

電話の音が
よりハッキリ
聞こえる



マスク越しでも 相手の声がより自然で聞きやすい

マスクモード

マスクの影響で損なわれる言葉の明瞭性を補うモードを搭載。マスクをした相手の声がより聞き取りやすくなります。

マスク越しでも
聞きやすい



※1 iOS14以降を搭載したiPhone、iPad、iPod touchに対応しています。AndroidについてはLE Audioに準拠したスマホ、タブレットに対応予定。
補聴器のアップデートにより今後連携が可能となります。※2 WH-R59、R57、R55、C59、C57、C55に同梱。WH-R53、C53は別売。

毎日使うからより快適に、 使いやすいものを

R5 / C5 シリーズ

たっぷり使える電池持続時間 電池残量はアプリと音声ガイドでお知らせ

電池長持ち

一回の充電^{※1}で、より長時間の使用が可能に。
朝から夜まで安心してお使いいただけます。

	当社従来機種 WH-R47/45/43	R5	C5
補聴動作	約24時間 ^{※2}	約36時間 ^{※3}	約28時間
テレビ視聴	約8時間 ^{※2}	約12時間 ^{※3}	約10時間

●動作時間は、使用条件または補聴器の設定によって変わります。



スマホアプリで電池残量が
ひと目で分かるから安心です。



充電が少なくなっています
充電してください



補聴器を装着する時に
装着中の補聴器本体から
電池残量に応じて
音声ガイドでお知らせ。

ケースに入れるだけで、かんたん充電 キャリングケースとしても使える

電池交換が
不要

充電ケース

コンパクトでありながらも手に馴染む
上質なデザインの充電ケース。
置くだけ充電なので、
出し入れがかんたんです。



R5シリーズ充電ケース



C5シリーズ充電ケース

USB充電対応
(Type-A - Type-C)



色弱者の方でも視認性の良い
2色のLEDで充電状態を表示

充電完了
充電中



汗、水、湿気、ホコリに強く故障しにくい

IP*防水・防塵の国際保護等級

補聴器は、直接肌に触れた状態で毎日
長時間お使いいただくため、汗や湿気が
原因で故障することがあります。補聴器
をより良い状態でお使いいただけるよう、
従来より汗・水やホコリに強い製品の
実現に取り組んでいます。

防水・防塵
国際保護等級
IP68^{※1}


R5 シリーズ
C5 シリーズ

*IP保護等級は水や粉塵に対する保護の性能を表す指標です。
※1 IP68基準(密閉構造により本体内部への粉塵の侵入や、水深1mの水に
60分間浸けても本体内部に水の浸入が無い)検査をクリアしています。

密閉構造で
故障しにくい

汗対策を強化(当社従来品比)
(R5シリーズ)

汗やホコリにより強い新構造を採用

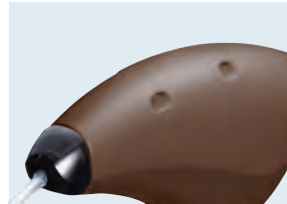

横向きマイク孔

完全防水ではありません。

補聴器を水や液体に浸したり洗ったりしないでください。補聴器内部に水が入ることがあるため、ぬれた時には良く乾燥させてから使用してください。

※1 R5シリーズ充電時間:約4時間、C5シリーズ充電時間:約3時間。
※2 WH-R47/45/43:イヤホンユニット(S)(M)の場合、イヤホンユニット(HP)の場合は、補聴動作約20時間、テレビ視聴約4時間となります。
※3 R5シリーズ:イヤホンユニット(M)の場合、イヤホンユニット(HP)の場合は、補聴動作約30時間、テレビ視聴約10時間となります。

R5 / C5 シリーズ 共通の特長

直感的に使える
スティックタイプのリモコン

音量調節は使いやすい「回す」タイプ。
LEDの光で音量もひと目で分かり、
テレビ視聴への切替えも簡単に行えます。

※P.22【無線機器使用上の注意事項】を参照。

- ブラウン：R5 シリーズ用
- ブラック：C5 シリーズ用



写真はR5シリーズのリモコンです。

スマホアプリで音量調整、
紛失した補聴器の探索もできる

スマートリモコン (スマホアプリ)

スマホで音量調節や紛失した
補聴器の探索などができる便利な
アプリケーションです。



音量調整・モード選択



補聴器を探す



ご自宅など
近いところを探す

離れた
ところを探す

アプリについて
詳しくはWEBへ



R5 シリーズ用

耳あか詰まりに
より強いイヤチップ

耳あかをブロック
する蓋構造



黒いイヤチップで
耳あかがよく見える




聞きやすさを追求した信号処理で、より快適な毎日を

「おまかせシーンセレクト」機能 (WH-R53、C53は除く)

周囲の環境に合わせて騒音を抑え、「聞こえ」を自動調節

周囲環境を
自動で判断

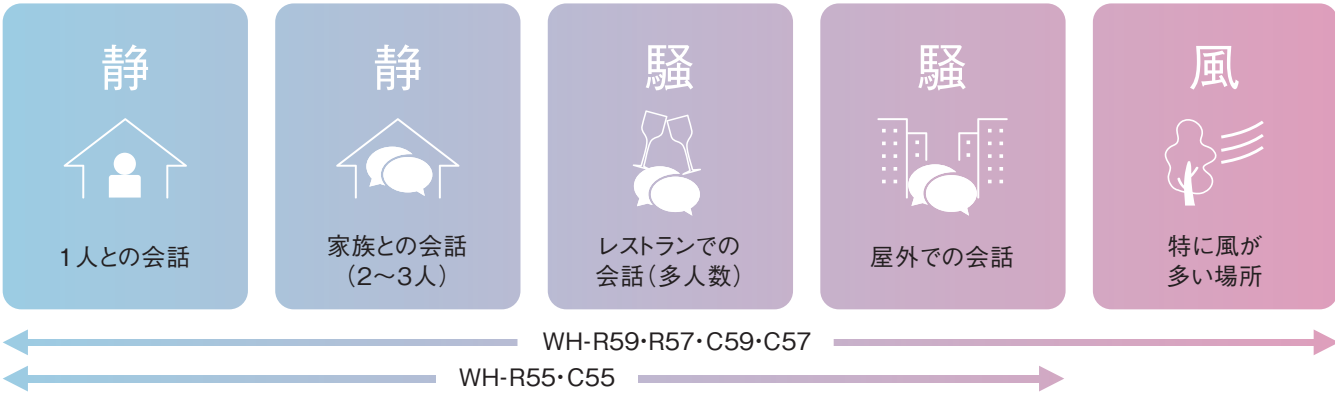

ハウリング抑制 (ICA)※1

「ピーピー」という不快なハウリングだけを
独立して抽出し、素早く抑制します。楽器
音とハウリングをより高精度で識別し、音
楽がより聞きやすい設定を選べます。



突発音抑制 (ISS)※2

突発音を抑制する専用の機能を搭載。言
葉の聞こえはそのままに、食器などのカチャ
カチャ音だけを小さくすることができます。



風雑音抑制 (WNR)※3

音をリアルタイムに分析して風雑音を検出
する機能を搭載。ポコポコと聞こえる不快
な音を抑えて、屋外での快適性を高めるこ
とができます。

ワイヤレスでテレビを
高音質のまま楽しめる連携機能※4

テレビとの接続例



接続簡単、テレビアダプターはテレビにつなぐだけで、
家族と同じ音量でテレビが楽しめます。

R5 シリーズ	WH-R59、R57、R55、R53
C5 シリーズ	WH-C59、C57、C55、C53



テレビアダプター
R5/C5シリーズ専用※5
WH-PM1304J
希望小売価格 33,000円(税込)

※1 Independent Component Analysisの略。※2 Impulsive Sound Suppressionの略。※3 Wind Noise Reductionの略。
※4 P.22【無線機器使用上の注意事項】を参照。※5 WH-R59、R57、R55、C59、C57、C55に同梱。WH-R53、C53は別売。

充電式
耳かけ型 **R5** シリーズ

耳の後ろに隠れて
目立ちにくい

先進的でありながら、心地よく快適な「やさしい」カタチ

スモーキーブラック (-K) アッシュブラウン (-T)
サンドベージュ (-C) ペールラベンダー (-P)
リッチボルドー (-V) アズールブルー (-A)

髪色や肌なじみが良い4色、
ファッショナブルで
活動的な2色の6色展開

ソリッドなツートーンカラーで
奥行きと深みのある質感

耳の後ろに隠れる小型タイプ

スリムなフォルムで、メガネや
マスク時でも邪魔になりにくい。

適応難聴度

ミドル (M) タイプ
軽 中 高 重
~85 dB HL

ハイパワー (HP)
軽 中 高 重
70~105 dB HL

防水・防塵
国際保護等級
IP68

2年間
保証

スマートリモコン対応

テレビアダプター対応

充電はケースに入れるだけ

R5 シリーズ ラインナップ	声も、音楽も、動画も妥協しない パナソニックがお届けする最高品質 プレミアム	風が強いアウトドアなど 様々な場面にも自動適応できる プレステージ	たまのお出かけなどアクティブな スタイルにも合わせやすい ハイスpek	ご家庭内中心に 日常生活をカバーする スタンダード
チャンネル数	24ch	20ch	16ch	12ch
モード数	6	5	4	3
スマホ通話	◎	◎	◎	◎
スマホで動画・音楽視聴	◎	◎	◎	◎
広帯域 (kHz)	9.5 (M)、7.5 (HP)	8 (M)、7 (HP)	7.5 (M)、6.5 (HP)	7.5 (M)、6.5 (HP)
テレビアダプター	同梱	同梱	同梱	別売
ボイスフォーカス	◎	—	—	—
おまかせシーンセレクト	◎	◎	○	—
マスクモード	◎	◎	◎	—
ハウリング抑制	◎	◎	◎	◎
突発音抑制	◎	◎	◎	○
風雑音抑制	◎	◎	○	△
環境騒音抑制	◎	◎	○	△
充電電池交換無償対応※1	1回	1回	1回	—
耳かけ型 R5 シリーズ 希望小売価格※2	<div>両耳 1,200,000円 (W-※)※3</div> <div>片耳 650,000円 (Z-※)※3</div>	<div>両耳 898,000円 (W-※)※3</div> <div>片耳 498,000円 (Z-※)※3</div>	<div>両耳 698,000円 (W-※)※3</div> <div>片耳 398,000円 (Z-※)※3</div>	<div>両耳 498,000円 (W-※)※3</div> <div>片耳 328,000円 (Z-※)※3</div>

※1 充電電池交換＋クリーニングサービス。WH-R59、R57、R55は、お買い上げから5年以内に充電電池を1回のみ無償で交換いたします。 ※2 両耳、片耳は補聴器・リモコン・充電ケース・テレビアダプター (WH-R53を除く) のセット価格です。R5シリーズ ハイパワー (HP) にはオーダーメイドイヤチップWH-PF20が装着されます。〈片耳 12,000円、両耳 24,000円 (非課税)〉
※3 品番の※には本体色が入ります。

●上記の補聴器は非課税です。記載内容は2025年4月現在のものです。

充電式
耳あな型 **C5** シリーズ

オーダーメイド
一人ひとりにぴったりの
オーダーメイド※1

ファッショナブルでユニセックスなスキンカラー

スモーキーブラック (-K) アッシュブラウン (-T)
ベージュ (-C)

一人ひとりの耳の形に
合わせて製作

耳あなにフィットする、
より自然な着け心地

耳型採取

パナソニック初
充電式
オーダーメイド

適応難聴度

ミドル (M) タイプ
軽 中 高 重
~85 dB HL

ハイパワー (HP)
軽 中 高 重
70~105 dB HL

防水・防塵
国際保護等級
IP68

2年間
保証

スマートリモコン対応

テレビアダプター対応

充電はケースに入れるだけ

C5 シリーズ ラインナップ	声も、音楽も、動画も妥協しない パナソニックがお届けする最高品質 プレミアム	風が強いアウトドアなど 様々な場面にも自動適応できる プレステージ	たまのお出かけなどアクティブな スタイルにも合わせやすい ハイスpek	ご家庭内中心に 日常生活をカバーする スタンダード
チャンネル数	24ch	20ch	16ch	12ch
モード数	6	5	4	3
スマホ通話	◎	◎	◎	◎
スマホで動画・音楽視聴	◎	◎	◎	◎
広帯域 (kHz)	9.5 (M)、7.5 (HP)	8 (M)、7 (HP)	7.5 (M)、6.5 (HP)	7.5 (M)、6.5 (HP)
テレビアダプター	同梱	同梱	同梱	別売
ボイスフォーカス	◎	—	—	—
おまかせシーンセレクト	◎	◎	○	—
マスクモード	◎	◎	◎	—
ハウリング抑制	◎	◎	◎	◎
突発音抑制	◎	◎	◎	○
風雑音抑制	◎	◎	○	△
環境騒音抑制	◎	◎	○	△
充電電池交換無償対応※2	1回	1回	1回	—
耳あな型 C5 シリーズ 希望小売価格※3	<div>両耳 1,224,000円 (W-※)※4</div> <div>片耳 662,000円 (Z-※)※4</div>	<div>両耳 922,000円 (W-※)※4</div> <div>片耳 510,000円 (Z-※)※4</div>	<div>両耳 722,000円 (W-※)※4</div> <div>片耳 410,000円 (Z-※)※4</div>	<div>両耳 522,000円 (W-※)※4</div> <div>片耳 340,000円 (Z-※)※4</div>

※1 一人おひとりの耳に合わせて作りますので、形状や部品配置が写真と異なる場合があります。 ※2 充電電池交換＋クリーニングサービス。WH-C59、C57、C55は、お買い上げから5年以内に充電電池を1回のみ無償で交換いたします。 ※3 両耳、片耳は補聴器・リモコン・充電ケース・テレビアダプター (WH-C53を除く) のセット価格です。 ※4 品番の※には本体色が入ります。

●上記の補聴器は非課税です。記載内容は2025年4月現在のものです。

ラインナップ・主な特長

充電式 耳かけ型
R5

充電式 耳あな型
C5


充電式 耳あな型
G4

別売品

ラインナップ・他

充電式
耳あな型 **G4** シリーズ

持ちやすく
耳に着けやすい

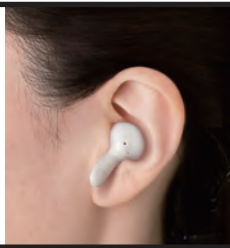

角がなく親しみやすい、
やさしいかたち



付属ストラップ（両耳モデル用）
○ ホワイト ● ダークグレー ● グレー

- 同梱のリモコン、キャリングケース、充電ケースの色はホワイトです。

GOOD DESIGN AWARD 2017
受賞

8色の“着替え”も楽しめる
スポーティなストラップ
[別売品]
希望小売価格 2,178円／各色(税込)



適応難聴度

軽 中 高 重
～80 dB HL

※1
防水・防塵
国際保護等級
IP57

2年間
保証

スマートリモコン対応

テレビアダプター対応


持ちやすく、耳に入れやすいかたち

グリップ部分をつまむだけで
上下方向と耳への挿入方向がわかり
より簡単に装着できます。



耳あなを圧迫しない心地良さ

耳あなを圧迫しないので音の
こもり感が生じにくくより自然な
聞こえを実現しました。

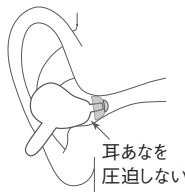

聞きやすさを追求したG4シリーズの信号処理



ハウリング抑制 (ICA)※2

「ピーピー」という不快なハウリングだけを
独立して抽出し、素早く抑制します。楽
器音とハウリングをより高精度で識別し、
音楽がより聞きやすい設定を選べます。



突発音抑制 (ISS)※3

突発音を抑制する専用の機能を搭載。
言葉の聞こえはそのままに、食器などの
カチャカチャ音だけを小さくすることがで
きます。



風雑音抑制 (WNR)※4

音をリアルタイムに分析して風雑音を検
出する機能を搭載。ポコポコと聞こえる
不快な音を抑えて、屋外での快適性を
高めることができます。

「おまかせシーンセレクト」機能

周囲の環境に合わせて騒音を抑え、「聞こえ」を自動調節。(WH-G43は除く)



WH-G47

WH-G45

※1 IP57基準(粉塵の侵入による機器の正常動作の阻害や、水深1mの水に30分間浸けても本体内部に水の侵入が無い)検査をクリアしています。
※2 Independent Component Analysisの略。※3 Impulsive Sound Suppressionの略。※4 Wind Noise Reductionの略。


●上記の補聴器は非課税です。記載内容は2025年4月現在のものです。

リモコン&スマホでかんたん操作・調節

直感的に使えるスティックタイプのリモコン

音量調節は使いやすい「回す」タイプ。
LEDの光で音量もひと目で分かり、より簡単にお使い
いただけます。

相手の声が小さい時

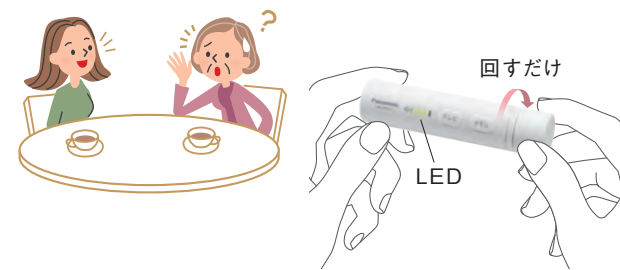

P.22【無線機器使用上の注意事項】を参照。

インテリアのように日常に溶け込み
かんたんに使える充電ケース

充電時間	約3時間
動作時間	補聴器として 約24時間 テレビ視聴※1 約 8時間

※1 別売品のテレビアダプター(WH-0M1303J)を
使用した場合
・動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の
設定によって変わります。

LED表示		充電中
		充電完了



充電はケースに
入れるだけ

スマートリモコン(スマホアプリ)

当社特定の補聴器製品とBluetooth®接続・
通信し、音量調節などの操作を行うことが
できるアプリケーションです。

補聴器を探す



ご自宅など
近いところを探す

離れた
ところを探す

アプリについて
詳しくはWEBへ



ワイヤレスでテレビを
高音質のまま楽しめる連携機能※2

テレビとの接続例



接続簡単、テレビアダプターはテレビにつなぐだけで、
家族と同じ音量でテレビが楽しめます。

テレビアダプター
G4シリーズ専用 [別売品]
WH-0M1303J
希望小売価格 **21,780円(税込)**



G4 シリーズ ラインナップ	風が強いアウトドアなど 様々な場面にも自動適応できる プレステージ	たまのお出かけなどアクティブな スタイルにも合わせやすい ハイスpek	ご家庭内中心に 日常生活をカバーする スタンダード
チャンネル数	16ch	12ch	9ch
メモリ数	5	5	4
ハウリング抑制	◎	◎	◎
突発音抑制	◎	◎	○
風雑音抑制	◎	○	△
環境騒音抑制	◎	○	△
おまかせシーンセレクト	◎	○	—
テレビ／音楽モード	◎ テレビ／音楽モード	◎ テレビ／音楽モード	○ テレビモード
充電電池交換チケット※3	○	○	—
耳あな型 G4 シリーズ 希望小売価格※4	WH-G47 両耳 869,000円(W-*)※5 片耳 484,000円(L-*/R-*)※5	WH-G45 両耳 649,000円(W-*)※5 片耳 363,000円(L-*/R-*)※5	WH-G43 両耳 437,800円(W-*)※5 片耳 247,500円(L-*/R-*)※5

※2 P.22【無線機器使用上の注意事項】を参照。※3 充電電池交換＋クリーニングサービス。WH-G47、G45には、お買い上げから5年以内に充電電池を1回交換できるチケットが付属しています。※4 両耳、片耳は補聴器・リモコン・充電ケース・キャリングケースのセット価格です。※5 品番の*には本体色が入ります。

●上記の補聴器は非課税です。記載内容は2025年4月現在のものです。

充電式補聴器
ラインナップ主な特長

充電式耳かけ型
R5

充電式耳あな型
C5


充電式耳あな型
G4

別売品

ラインナップ・他

別売品 | 補聴器をより快適に、使い続けていただくために

R5
シリーズ用



イヤホンユニット (M) ミドル

左M0 WH-PF18L0J 右M0 WH-PF18R0J
左M1 WH-PF18L1J 右M1 WH-PF18R1J
左M2 WH-PF18L2J 右M2 WH-PF18R2J
左M3 WH-PF18L3J 右M3 WH-PF18R3J

希望小売価格 22,000円

イヤチップ (クローズ) 4個入り

M WH-PB1141J
L WH-PB1142J
LL WH-PB1143J

希望小売価格 1,694円

イヤチップ (クローズ)

1個入り
S WH-PB1104J

希望小売価格 605円

イヤチップ (ダブルドーム)

1個入り
M WH-PB1107J
L WH-PB1108J

希望小売価格 605円

イヤホンユニット用
耳あかガード 3個入り
WH-PL1108J

希望小売価格 726円

イヤチップ (オープン) 4個入り

M WH-PB1144J
L WH-PB1145J
LL WH-PB1146J

希望小売価格 1,694円

イヤチップ (オープン)

1個入り
S WH-PB1101J

希望小売価格 605円

イヤチップサポーター
WH-PL1105J

希望小売価格 242円

イヤホンユニット用
耳あかガード交換ツール
(金属製)
WH-PL1106J

希望小売価格 1,210円

イヤホンユニット (HP) ハイパワー

左HP0 WH-PF19L0J 右HP0 WH-PF19R0J
左HP1 WH-PF19L1J 右HP1 WH-PF19R1J
左HP2 WH-PF19L2J 右HP2 WH-PF19R2J
左HP3 WH-PF19L3J 右HP3 WH-PF19R3J

希望小売価格 33,000円
(オーダーメイドイヤチップ付・非課税)

HP用耳あかガード

赤(右) WH-PH1303J
青(左) WH-PH1304J

希望小売価格 1,210円

ドライバー
WH-PZ1402J

希望小売価格 605円

ペントチップ
φ1.0-1.3用
WH-PH1500J

希望小売価格 363円

リモコン※1 ※2
WH-PM20-T

希望小売価格 25,300円
(電池別売)

ブラシ
WH-PZ1703J

希望小売価格 1,452円

充電ケース
WH-PK1106J

希望小売価格 25,300円
(USBケーブル、ACアダプター付)

USBケーブル
WH-PK1404J

希望小売価格 1,650円

ACアダプター
WH-PK1203J

希望小売価格 3,146円

キャリングケース
WH-PG1317J

希望小売価格 3,850円

C5
シリーズ用



充電ケース
WH-PK1105J

希望小売価格 25,300円
(USBケーブル、ACアダプター付)

USB-Cケーブル
WH-PK1404J

希望小売価格 1,650円

ACアダプター
WH-PK1203J

希望小売価格 3,146円

リモコン※1 ※2
WH-PM20

希望小売価格 25,300円
(電池別売)

ブラシ
WH-PZ1703J

希望小売価格 1,452円

耳あか防止チップ

5個入り
赤(右) WH-PH1306J
青(左) WH-PH1307J

希望小売価格 1,500円

ペントチップ

φ1.5用 WH-PH1504J
φ2.0用 WH-PH1505J
φ2.5用 WH-PH1506J
φ3.0用 WH-PH1507J

希望小売価格 1,280円

G4
シリーズ用



イヤチップ (クローズ) 4個入り

M WH-PB1141J
L WH-PB1142J
LL WH-PB1143J

希望小売価格 1,694円

イヤチップ (オープン) 4個入り

M WH-PB1144J
L WH-PB1145J
LL WH-PB1146J

希望小売価格 1,694円

充電ケース
(クリーニングクロス付)
WH-PK1103J-W (ホワイト)

希望小売価格 9,680円

USB-DCケーブル
WH-PK1403J

希望小売価格 1,573円

ACアダプター
WH-PK1203J

希望小売価格 3,146円

ネックストラップ (両耳モデル用)
(各色約55 cm)

WH-PZ1303J-V (パープル)
WH-PZ1303J-A (水色)
WH-PZ1303J-Y (黄緑色)
WH-PZ1303J-G (モスグリーン)
WH-PZ1303J-B (ネイビー)
WH-PZ1303J-W (ホワイト)
WH-PZ1303J-H (ダークグレー)
WH-PZ1303J-J (グレー)

希望小売価格 2,178円

ブラシ
WH-PZ1703J

希望小売価格 1,452円

テレビアダプター※1
(オーディオコード、USB-DCケーブル、
ACアダプター付)
WH-0M1303J

希望小売価格 21,780円

ストラップホルダーキャップ 4個入り

WH-PQ1301J-W (ホワイト)
WH-PQ1301J-C (ベージュ)
WH-PQ1301J-H (ダークグレー)

希望小売価格 1,452円

オーディオコード
(ステレオミニプラグ) (約1.5 m)
WH-PP1111J

希望小売価格 1,210円

ストラップ用アダプター 4個入り

WH-0C1300J-W (ホワイト)
WH-0C1300J-C (ベージュ)
WH-0C1300J-H (ダークグレー)

希望小売価格 1,694円

オーディオコード
(ステレオミニプラグ〜ピンプラグ)
(約1.5 m)
WH-PP1121J

希望小売価格 1,210円

イヤチップ (クローズ) 4個入り

M WH-PB1141J
L WH-PB1142J
LL WH-PB1143J

希望小売価格 1,694円

イヤチップ (オープン) 4個入り

M WH-PB1144J
L WH-PB1145J
LL WH-PB1146J

希望小売価格 1,694円

充電ケース
(クリーニングクロス付)
WH-PK1103J-W (ホワイト)

希望小売価格 9,680円

USB-DCケーブル
WH-PK1403J

希望小売価格 1,573円

ACアダプター
WH-PK1203J

希望小売価格 3,146円

ネックストラップ (両耳モデル用)
(各色約55 cm)

WH-PZ1303J-V (パープル)
WH-PZ1303J-A (水色)
WH-PZ1303J-Y (黄緑色)
WH-PZ1303J-G (モスグリーン)
WH-PZ1303J-B (ネイビー)
WH-PZ1303J-W (ホワイト)
WH-PZ1303J-H (ダークグレー)
WH-PZ1303J-J (グレー)

希望小売価格 2,178円

ブラシ
WH-PZ1703J

希望小売価格 1,452円

テレビアダプター※1
(オーディオコード、USB-DCケーブル、
ACアダプター付)
WH-0M1303J

希望小売価格 21,780円

ストラップホルダーキャップ 4個入り

WH-PQ1301J-W (ホワイト)
WH-PQ1301J-C (ベージュ)
WH-PQ1301J-H (ダークグレー)

希望小売価格 1,452円

オーディオコード
(ステレオミニプラグ) (約1.5 m)
WH-PP1111J

希望小売価格 1,210円

ストラップ用アダプター 4個入り

WH-0C1300J-W (ホワイト)
WH-0C1300J-C (ベージュ)
WH-0C1300J-H (ダークグレー)

希望小売価格 1,694円

オーディオコード
(ステレオミニプラグ〜ピンプラグ)
(約1.5 m)
WH-PP1121J

希望小売価格 1,210円

イヤホンユニット用
耳あかガード
交換ツール
(金属製)
WH-PL1106J

希望小売価格 1,210円

イヤホンユニット用
耳あかガード 3個入り
WH-PL1108J

希望小売価格 726円

イヤホンユニット (ソフトケース付)
WH-PG1315J-W (ホワイト)

希望小売価格 3,630円

ソフトケース
WH-PG1411J

希望小売価格 2,662円

イヤホンユニット用
耳あかガード 3個入り
WH-PL1108J

希望小売価格 726円

イヤホンユニット用
耳あかガード
交換ツール
(金属製)
WH-PL1106J


希望小売価格 1,210円

イヤチップ一覧

		耳あな型		RIC 型				耳 かけ型				ポケット型		耳かけ / ポケット 型								
		G4/G3 シリーズ用		R5/R4 シリーズ用		R5/R4/R1 シリーズ用		B1 シリーズ用		B1 シリーズ スリム用		WH-J25D/J25D-S用		アナログ機種用								
ダブルドーム	M	—		—			WH-PB1107J	11 mm	—			WH-PB1136J	11 mm		WH-PB1107J	11 mm	—					
	L	—		—			WH-PB1108J	13 mm	—			WH-PB1137J	13 mm		WH-PB1108J	13 mm	—					
クローズ	S		—		—		WH-PB1104J	7 mm		WH-PB1123J	8 mm		WH-PB1133J	7 mm		WH-PB1104J	7 mm		WH-PB1123J	8 mm		
	M		WH-PB1141J		9 mm		WH-PB1141J	9 mm		WH-PB1105J	9 mm		WH-PB1124J	9.2 mm		WH-PB1105J	9 mm		WH-PB1124J	9.2 mm		
	L		WH-PB1142J		11 mm		WH-PB1142J	11 mm		WH-PB1106J	11 mm		WH-PB1125J	11 mm		WH-PB1134J	9 mm		WH-PB1106J	11 mm	WH-PB1125J	11 mm
	LL		WH-PB1143J		13 mm		WH-PB1143J	13 mm		—	WH-PB1126J		12.6 mm	—		—	—		WH-PB1106J	11 mm	—	WH-PB1126J
オープン	S		—		—		WH-PB1101J	6 mm		WH-PB1119J	8 mm		WH-PB1110J	6 mm		WH-PB1101J	6 mm	—				
	M		WH-PB1144J		8 mm		WH-PB1102J	8 mm		WH-PB1120J	9.2 mm		WH-PB1102J	8 mm		—						
	L		WH-PB1145J		10 mm		WH-PB1145J	10 mm		WH-PB1103J	10 mm		WH-PB1121J	11 mm		WH-PB1112J	10 mm	WH-PB1103J	10 mm	—		
	LL		WH-PB1146J		12 mm		WH-PB1146J	12 mm		—	WH-PB1122J		12.6 mm	—		—	—	—	—			

イヤチップを合わせてご確認ください。

右図のタイプは側面を合わせてご確認ください。

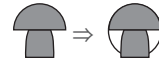

6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 原寸大サイズ (mm)

※1 補聴器本体とのペアリングが必要です。ペアリングの設定については販売店に相談ください。 ※2 P.22の【無線機器使用上の注意事項】を参照。
●上記別売品の希望小売価格は税込価格です。記載内容は2025年4月現在のものです。●イヤホン・イヤチップ・アダプターなど別売品についての詳細は、販売店におたずねください。

※1 P.22の【無線機器使用上の注意事項】を参照。
※2 補聴器と無線接続できるようにするためには、初期登録操作が必要です。販売店までご相談ください。
●上記別売品の希望小売価格は税込価格です。記載内容は2025年4月現在のものです。●イヤホン・イヤチップ・アダプターなど別売品についての詳細は、販売店におたずねください。

充電式補聴器
ライナップ主な特長

充電式耳かけ型
R5

充電式耳あな型
C5

充電式耳あな型
G4

別売品

ライナップ・他

タイプ		デジ タ ル										
		充電式耳かけ型				充電式耳あな型				充電式耳あな型		
シリーズ		R5シリーズ				C5シリーズ (オーダーメイド)				G4シリーズ		
												
品 番		WH-R59	WH-R57	WH-R55	WH-R53	WH-C59	WH-C57	WH-C55	WH-C53	WH-G47	WH-G45	WH-G43
希望小売価格 (両耳)		¥1,200,000	¥898,000	¥698,000	¥498,000	¥1,224,000	¥922,000	¥722,000	¥522,000	¥869,000	¥649,000	¥437,800
使いやすさ	充電式	○				○				○		
	防水・防塵	防水・防塵 IP68				防水・防塵 IP68				防水・防塵 IP57		
ス ペ ック	チャンネル数	24	20	16	12	24	20	16	12	16	12	9
	シーンセレクト数	おまかせ シーン5	おまかせ シーン5	おまかせ シーン4	-	おまかせ シーン5	おまかせ シーン5	おまかせ シーン4	-	おまかせ シーン5	おまかせ シーン4	-
	メモリ数／モード数	6	5	4	3	6	5	4	3	5	5	4
	適応難聴度	(M)軽度～高度 (HP)高度～重度				(M)軽度～高度 (HP)高度～重度				軽度～高度		
	使用電池	コイン型 リチウム二次電池				コイン型 リチウム二次電池				コイン型 リチウム二次電池		
	電池寿命 (時間)	連続補聴動作 (M)約36 (HP)約30		連続テレビ視聴 (M)約12 (HP)約10		連続補聴動作 約28		連続テレビ視聴 約10		連続補聴動作 約24		連続テレビ視聴 約8
	最大音響利得 (dB) [HFA-FOG]	(M)50 (HP)61				(M)57 (HP)62				42		
	90 dB入力最大出力 音圧レベル (dB SPL) [ピーク値]	(M)120 (HP)130				(M)126 (HP)130				111		
主な同梱物		・リモコン・充電ケース・ブラシ・USBケーブル ・ACアダプター・イヤホンユニット・イヤチップ ・イヤチップサポーター・テレビアダプター (WH-R53を除く)				・リモコン・充電ケース・ブラシ・USBケーブル ・ACアダプター・テレビアダプター (WH-C53を除く) ・ベントチップ (サイズに合わせて同梱)				・リモコン・充電ケース・キャリングケース ・ソフトケース・キャップ ・ネックストラップ (両耳モデル用)・イヤチップ ・ブラシ・クリーニングクロス ・単4形アルカリ乾電池 (リモコン用) ・USB-DCケーブル・ACアダプター		
販売名		R5シリーズ				C5シリーズ				G4シリーズ		
一般の名称		耳かけ型補聴器				耳あな型補聴器				耳あな型補聴器		
医療機器認証番号		305AKBZX00040000				306AABZX00012000				230AIBZX000021Z00		

日本産業規格JIS C5512:2015に基づいて測定、表示してあります。

詳細は各商品ページをご覧ください。

・電池寿命は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。 ・同梱物については、予告なしで変更する場合があります。

本体価格 (片耳本体のみ)

本体は、片耳から両耳装用への買い増しや片耳を紛失した場合にご購入いただける片耳本体のみの機種のため、この機種にはリモコン・充電ケース・キャリングケース等の同梱品は付属していません。

R5シリーズ (いずれも非課税)			G4シリーズ (いずれも非課税)		
WH-R59 (X-*)	希望小売価格	600,000円	WH-G47 (LX-*/RX-*)	希望小売価格	462,000円
WH-R57 (X-*)	希望小売価格	448,000円	WH-G45 (LX-*/RX-*)	希望小売価格	341,000円
WH-R55 (X-*)	希望小売価格	348,000円	WH-G43 (LX-*/RX-*)	希望小売価格	225,500円
WH-R53 (X-*)	希望小売価格	278,000円			
C5シリーズ (いずれも非課税)			●品番の*には本体色が入ります。 R5シリーズ…P.15 C5シリーズ…P.16 G4シリーズ…P.17参照		
WH-C59 (X-*)	希望小売価格	612,000円			
WH-C57 (X-*)	希望小売価格	460,000円			
WH-C55 (X-*)	希望小売価格	360,000円			
WH-C53 (X-*)	希望小売価格	290,000円			

イヤホンユニット (HP)／イヤモールド



お一人おひとりの耳の形に合わせてお作りします。

こんな方に
おすすめ

- ピーピーというハウリングを抑えたい
- 補聴器をしっかり耳に固定したい
- 補聴器の装着感を改善したい

無償修理保証

2年間
保証


通常のご使用での自然故障に限り
2年間無償で修理いたします。

1年間
保証

通常のご使用での自然故障に限り
1年間無償で修理いたします。

無線機器使用上の注意事項

◆周波数表示の見かた

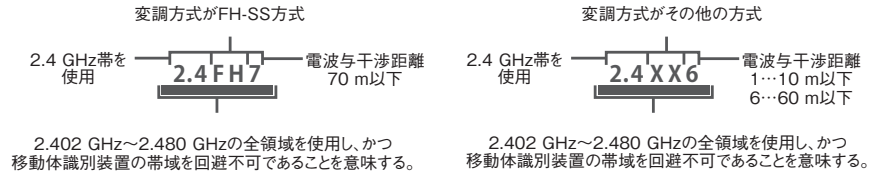

■ G4シリーズ、R5シリーズ、C5シリーズ、リモコン (WH-PM19、WH-PM20、WH-PM20-T)、テレビアダプター (WH-0M1303J、WH-PM1304J) の通信について

◆この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

②万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター (0120-045-285〈フリーダイヤル〉) にご連絡いただき、混信回避のための処置など (例えば、パーティションの設置など) についてご相談ください。

◆これらの機器は電波を使用しているため、ペースメーカー近傍 (15 cm以内) で使用しないでください。