


電気治療器 EW6021

取扱説明書

もくじ

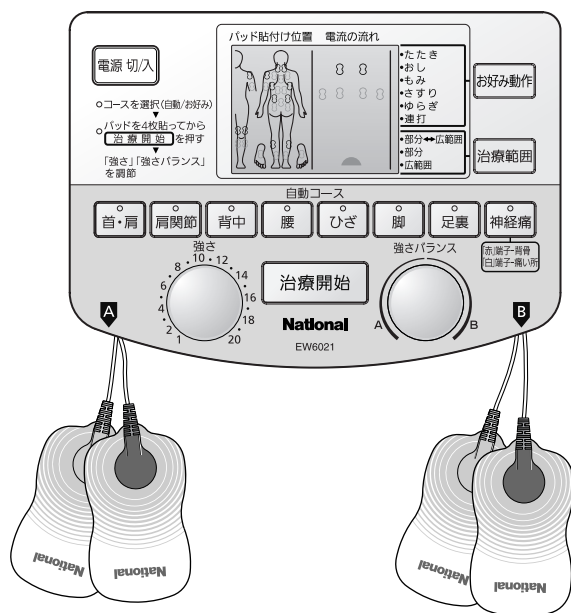

ご使用前に

安全上のご注意	2～3
各部のなまえ	4～6

使いかた

乾電池を入れる	7
コードとパッドの準備	8
自動コースで治療する	9～17
お好み動作で治療する	18～19
パッド2枚で治療する	20～21
収納する	22
パッドが付きにくくなった	23
別売品	23
その他の部位への貼りかた	24

お手入れ・保管

お手入れ・保管	25
---------	----

お知らせ

Q&A	26～27
故障かな?と思ったとき	28～29
定格・仕様	28
保証とアフターサービス	30

- お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(2～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
 また注意事項は、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
 (左図の場合は分解禁止)



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険



禁止

- 下記のような医用電気機器との併用は絶対にしない。
 (1) ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器 (2) 人工心肺等の生命維持用医用電気機器 (3) 心電計等の装着型医用電気機器
 などの各医用電気機器を使用する
 事故や身体への著しい障害をまねくおそれがあります。

⚠ 警告



必ず守る

- 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。
 (1) 急性疾患のある人 (2) 悪性腫瘍(しゅよう)のある人
 (3) 感染症疾患のある人 (4) 妊娠中、生理中、出産直後の人
 (5) 心臓に障害のある人 (6) 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期。衰弱しているとき。)
 (7) 貧血ぎみの人 (8) 適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人
 (9) 血圧に異常のある人や異常のあるとき(180mmHg以上)
 (10) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
 (11) 脊椎(せきつい)の骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなど、急性(疼(とう)痛性)疾患の人 (12) 糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害による知覚障害のある人 (13) 上記以外に特に身体に異常を感じているとき
 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 治療中にパッドを貼りかえるとき、はずすときは、必ず電源を切る。
 守らないと強いショックを受けたりヤケドのおそれがあります。
- パッドを体に貼った状態でコードを巻き取らない。
- パッドをパッド収納板に貼りつけた状態でコードを巻き取る。
 守らないとけがのおそれがあります。

⚠ 警告



禁止

- 心臓の近く、頭部、首の前側、顔、口中や陰部、皮膚疾患などには使用しない。
 事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 就寝時には使用しない。
 コードが首にからまり事故やけがのおそれがあります。また、パッドが別の場所(心臓の近く、頭部、顔、口中や陰部、皮膚疾患など)に貼りついて事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 治療以外の目的には使用しない。
 事故やけがのおそれがあります。
- 他の治療器との同時使用や塗り薬(スプレー式等含む)との併用はしない。
 事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 治療器動作中に、パッドを水につけたり、水をかけたり、入浴したりしない。
- 浴室などの湿度の高いところでは使用しない。
 強いショックを受けます。
- 治療中、パッドにベルトやネックレスなどの金属が触れないようにする。
 強いショックを受けたり、ヤケドのおそれがあります。
- お子様や自分で意思表示ができない人に使わせない。また、自分で操作できない人への使用はさせない。
 事故やけがのおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。
 事故や、トラブル、故障のおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

- 使用中に身体に異常があらわれたり感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談する。
- 本品の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談する。
 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。




禁止

- 治療中、他の人にパッドを貼りかえたりしない。
 守らないと強いショックを受けるおそれがあります。
- コードが首にからまないように注意して使用する。
 守らないと事故やけがのおそれがあります。
- 自動車などの運転の直前および運転時には使用しない。
 事故やトラブルをおこすおそれがあります。
- パッドを患部に貼りつけたまま放置しない。
 皮膚の炎症などをおこすおそれがあります。
- 1ヵ所に15分をこえての使用をしない。
 治療部位の筋肉が疲労し、体調不良をおこすおそれがあります。

各部のなまえ

〈本体〉

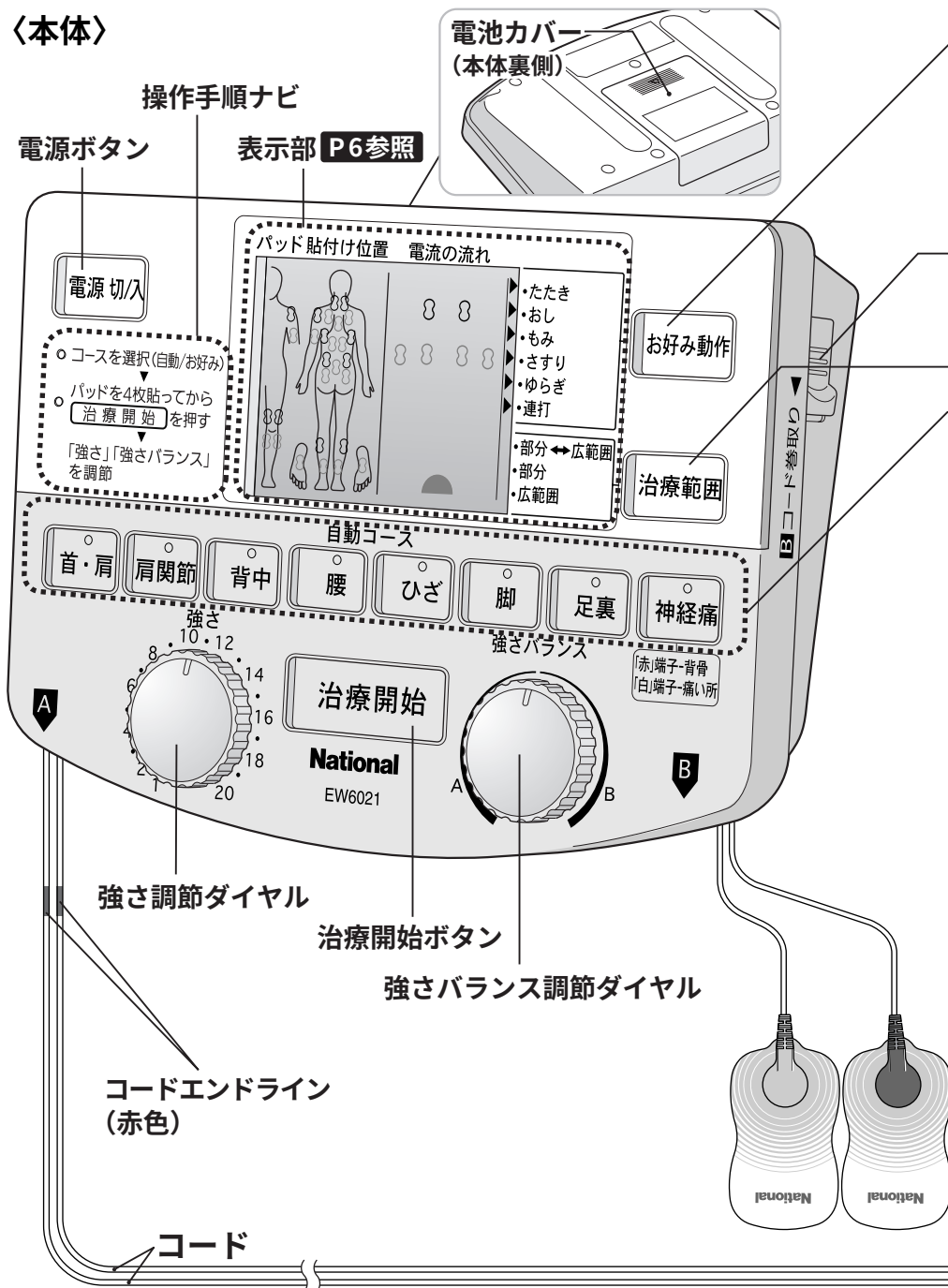

お好み動作選択ボタン


コード巻取りスイッチ (本体両側面)

スライド式でコードを収納するときに使います。


コード巻取り

治療範囲切替えボタン


自動コース選択ボタン

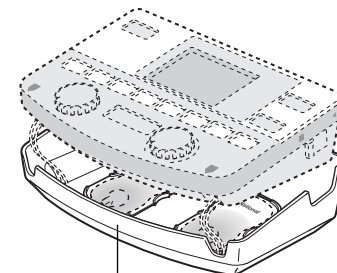

収納ケース
(収納する P22参照)

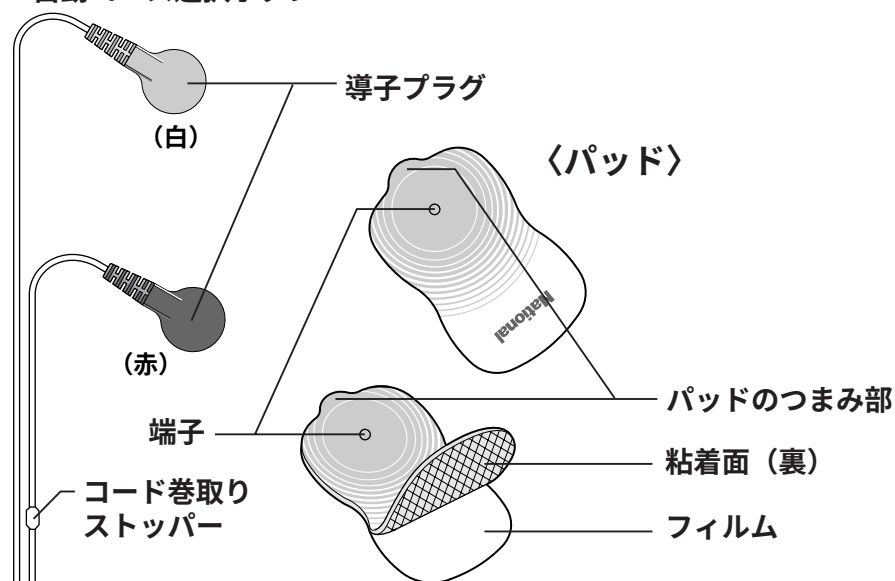

商品をご確認ください

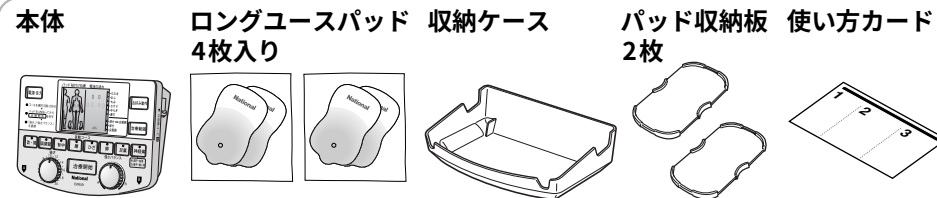

※乾電池は同梱しておりません。販売店でお求めください。(単3形乾電池 LR6×4本)
パナソニックアルカリ乾電池をおすすめします。


各部のなまえ(つづき)

〈表示部〉

パッド貼付け位置表示

選択した自動コースのパッド貼付け位置をお知らせします。


例：首・肩の場合

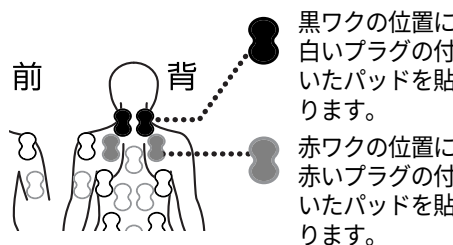


電気の流れ表示

電気の流れかたを表示します。
(パット4枚使用時のみ表示します)

例：首・肩の場合

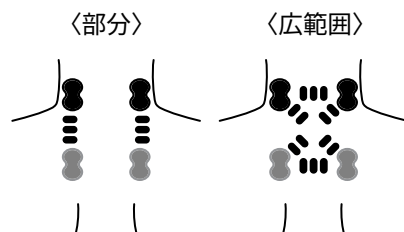

お好み動作の表示

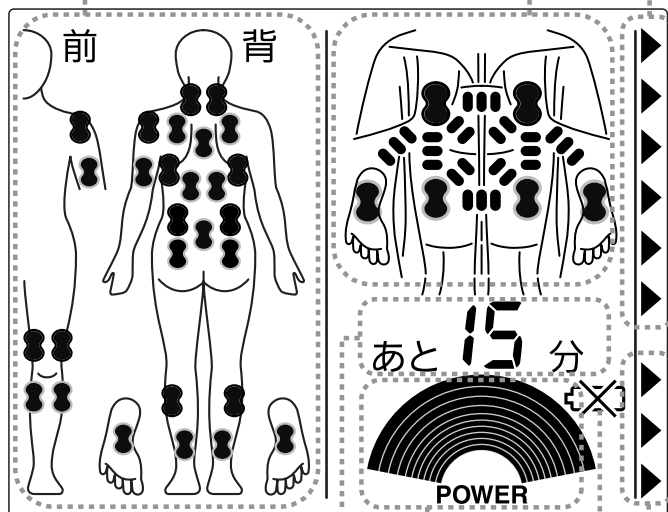

※すべて点灯した状態の
イラストです。

残り時間表示

刺激パワー表示

乾電池消耗マーク

治療範囲表示

- ・たたき
- ・おし
- ・もみ
- ・さすり
- ・ゆらぎ
- ・連打
- ・部分⇄広範囲
- ・部分
- ・広範囲

乾電池を入れる

乾電池は、付属していません。販売店で買い求めください。


ご使用にはパナソニックアルカリ乾電池をおすすめします。(単3形乾電池 LR6×4本)
マンガン乾電池またはオキシライド乾電池も使用できます。

1 本体裏面の 電池カバーをはずす

- 電池カバーの▽の所を軽く押しながら
矢印の方向にはずす

2 乾電池の⊕⊖を確認して 入れる

3 電池カバーを取り付ける

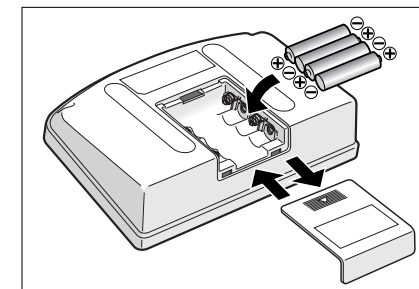

■電池寿命について

パナソニックアルカリ乾電池（単3形乾電池 LR6×4本）で約90回使えます。
(1日1回15分使用で約3カ月、室温23℃ 強さ目盛り20の場合)

乾電池取扱いについてお願い

- アルカリ乾電池以外の乾電池を使用される場合は、使用回数が極端に少なくなる場合があります。
- 電池交換は必ず同じメーカー（同じ種類）の新しい乾電池を4本同時に行ってください。
- 室温が低いとき、乾電池の寿命が短くなる場合があります。
- 使用済の乾電池は分別廃棄してください。

電池交換のめやす

乾電池消耗マーク表示時、電源ボタンを押しても表示部に何も表示されないときやマッサージの刺激が弱くなったと感じたときは、電池が消耗している場合があります。
新しい電池と交換してください。

⚠ 注意

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る
- 乾電池の⊕⊖極を確かめ、正しく入れる
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

使用前に
／使いかた

コードとパッドの準備

1 電源が「切」になっているか確認する

- ランプ、表示部消灯


2 導子プラグとパッドが接続され パッド収納板に貼られているか確認する

■初めてお使いになるとき

- パッドを透明の袋から取り出します。
- パッドについているフィルムをはがします。〈図a〉
はがしたフィルムは不要となります。
プラスチック材（PET）として捨ててください。

- パッドをパッド収納板に貼りつけます。〈図b〉

- 導子プラグをパッドにしっかり接続します。〈図c〉
- 導子プラグは赤白に色分けされていますが、
どちらのパッドにも接続できます。

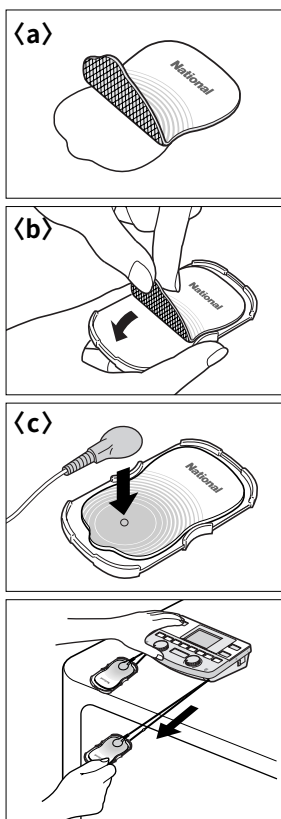


3 コードを伸ばす

- 本体とパッドを貼ったパッド収納板を持って
手前にコードを引き伸ばします。
- コードにコードエンドライン（赤色のライン）
が見えたら、それ以上引っぱらないでください。
- コードの長さはお好みで調節できます。

コード取扱いについてお願い


- 極端に曲げたり、引っぱったりしない。
- コードを持って本体をぶら下げたり、振り回したりしない。
- コードをコード巻取り口から斜め、横、後ろ方向に引っぱらない。
コードの断線や故障のおそれがあります。
- 導子プラグまたはコードのついたパッドを1つだけ持って引き伸ばさない。
コードがからまって出なくなるおそれがあります。
コードがからまり、出なくなった場合 **P25参照**

自動コースで治療する

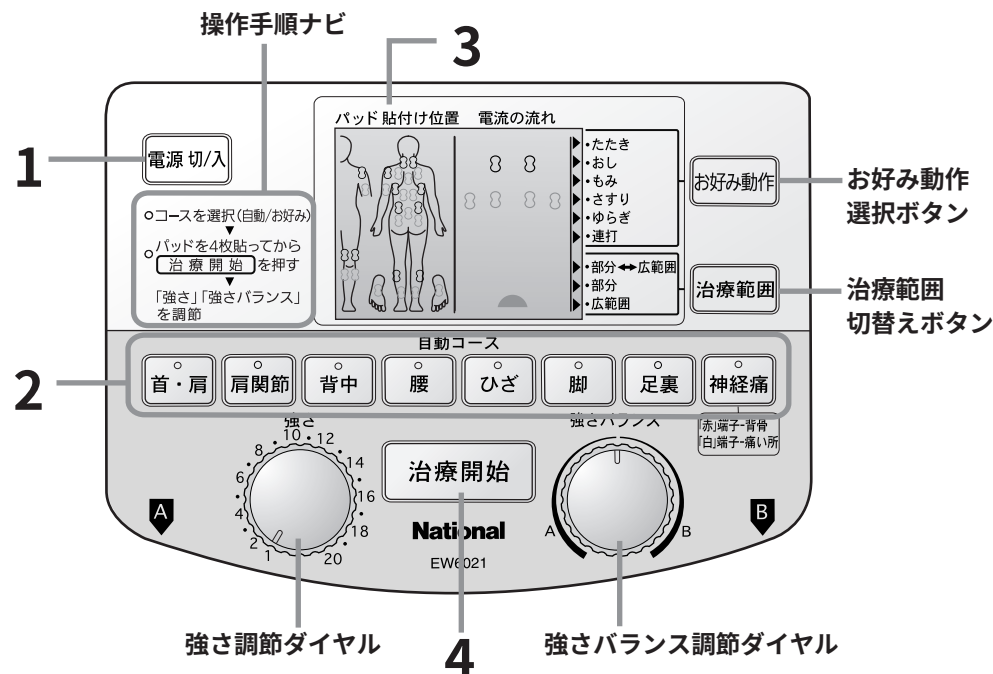


1 電源切/入を押して電源を入れる

- 自動コースの全ランプが点滅します。
- 操作手順ナビの「コースを選択」のランプが点滅
します。

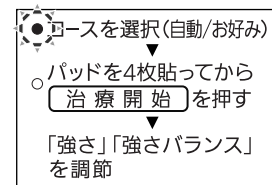


2 自動コースから1つ選んで押す

- 押したボタンが点灯し、その他のボタンは消灯します。

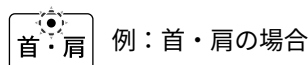

- 操作手順ナビの「パッドを4枚貼ってから…」のランプ
が点滅し、次の手順をお知らせします。
- なにも操作しない場合は約1分後に自動的に電源が切
れます。

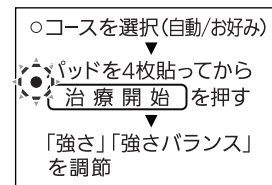

自動コースで治療する(つづき)

3 パッド貼付け位置を確認し、パッドを4枚貼る P10~15参照

●貼付け後、手順4 **P16参照** を行う

〈パッドの使いかた〉 皮膚の汗や水分、汚れはよく拭き取っておく

1枚ずつ折り曲げないように治療したい部位に貼る

●4枚パッドでの治療をおすすめします。


(A側のみ2枚でも使用できます **P20参照**)

●パッドは肌に密着させて貼ってください。

治療中にパッドが肌からはがれると、約15分後に自動的に電源が切れます。

●パッド間で刺激の強さが異なる場合があります。

刺激の強さが弱いと感じられる方のパッドの位置をずらしてください。

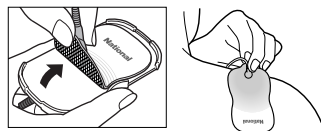

パッド取扱いについてお願い


●重ならないように貼ってください。 ●折り曲げないでください。

●粘着面はなるべく指で触らないようにしてください。

●粘着力が落ちてきたらお手入れしてください。(**P23参照**)

●パッドは濡れた状態では使用しないでください。

充分に水分を切って、粘着面を自然乾燥させてからご使用ください。

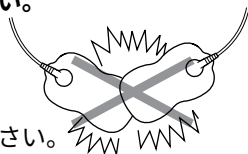

危険

- 下記のような医用電気機器との併用は絶対にしない。
(1) ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器 (2) 人工心肺等の生命維持用医用電気機器 (3) 心電計等の装着型医用電気機器などの各医用電気機器を使用の人
事故や身体への著しい障害をまねくおそれがあります。




警告

- 医師の治療を受けているときや下記の人には必ず医師と相談のうえ使用する。
(1) 急性疾患のある人 (2) 悪性腫瘍(しゅよう)のある人
(3) 感染症疾患のある人 (4) 妊娠中、生理中、出産直後の人
(5) 心臓に障害のある人 (6) 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期。衰弱しているとき。)
(7) 貧血ぎみの人 (8) 適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人 (9) 血圧に異常のある人や異常のあるとき(180mmHg以上)
(10) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
(11) 脊椎(せきつい)の骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなど、急性(疼(とう)痛性)疾患の人 (12) 糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害による知覚障害のある人 (13) 上記以外に特に身体に異常を感じているとき
守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 治療中にパッドを貼りかえるとき、はずすときは、必ず電源を切る。守らないと強いショックを受けたりヤケドのおそれがあります。
- パッドを体に貼った状態でコードを巻き取らない。
- パッドをパッド収納板に貼りつけた状態でコードを巻き取る。守らないとけがのおそれがあります。

〈パッドの貼りかた(4枚)〉


自動コースの場合

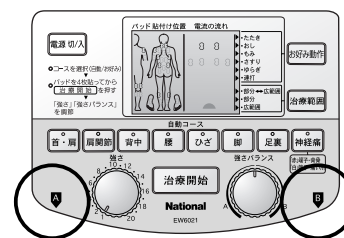

A側


B側

パッド貼付け位置

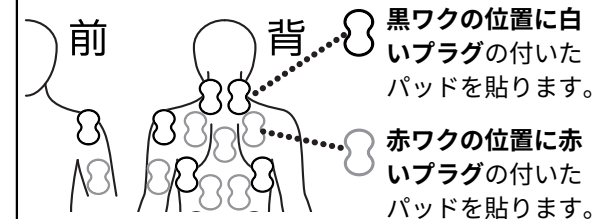


お断り：パッド貼付け位置を示すすべてのイラストはコードを省略しています。

首・肩 首すじ(首のつけ根)から肩甲骨の上部辺りまでを治療

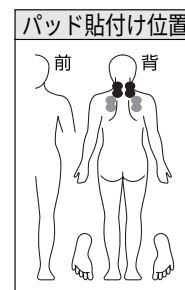


〈背〉

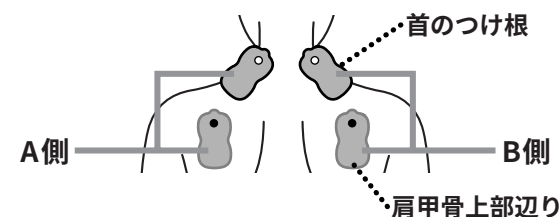

A側


B側

肩関節 肩の三角筋を治療 (左肩については、前面のパッド貼付け位置を胸の辺りに貼らないようにしてください。)

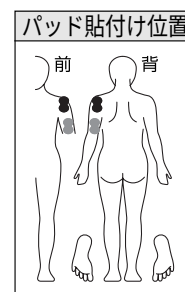

〈前〉

〈背〉

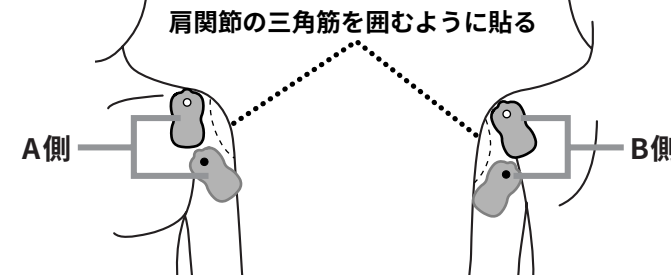



A側

B側



使いかた

自動コースで治療する(つづき)



○
背中 肩甲骨の下部辺りから胸骨の下部辺りまでを治療

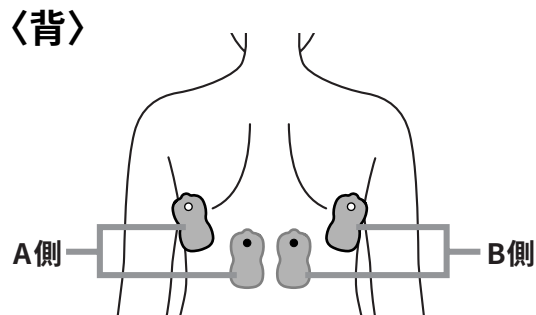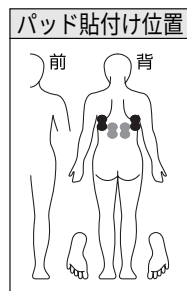



○
腰 腰まわりの筋肉（広背筋、せき柱起立筋など）を治療

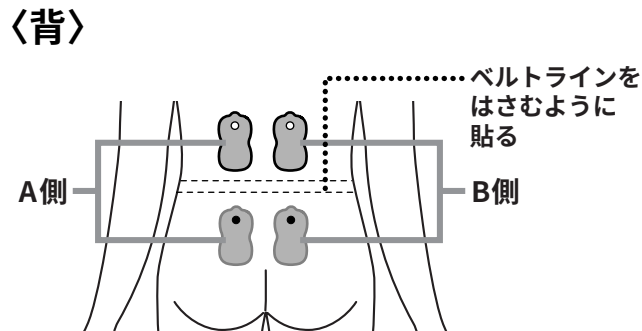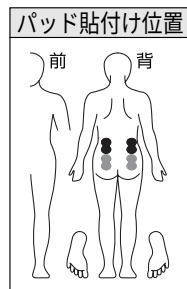



○
ひざ 片足のひざ関節を治療
(両足のひざを同時に治療もできます P24参照)

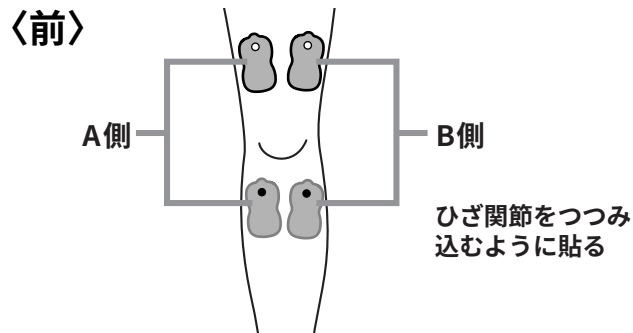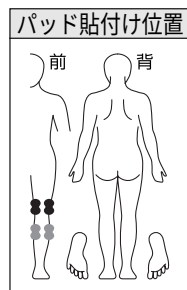

○
脚 ふくらはぎを両脚同時に治療

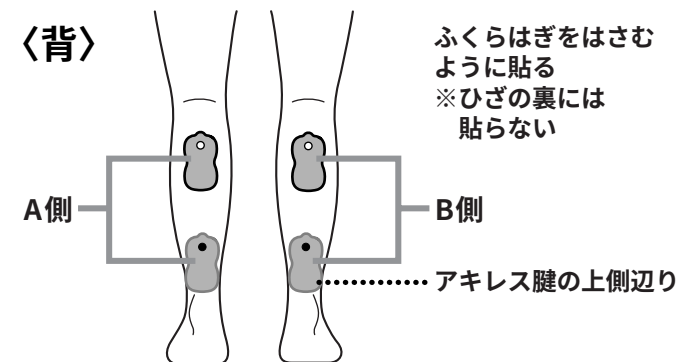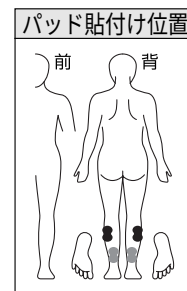

○
足裏 足裏の土ふまずからふくらはぎまでの筋肉を両足同時に治療

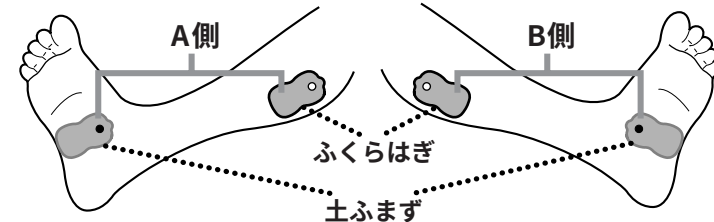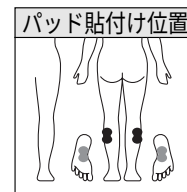

使
い
か
た


⚠ 警告

- 心臓の近く、頭部、首の前側、顔、口中や陰部、皮膚疾患などには使用しない。事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 就寝時には使用しない。コードが首にからまり事故やけがのおそれがあります。また、パッドが別の場所（心臓の近く、頭部、顔、口中や陰部、皮膚疾患など）に貼りついて事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 治療以外の目的には使用しない。事故やけがのおそれがあります。
- 他の治療器との同時使用や塗り薬（スプレー式等含む）との併用はしない。事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 治療器動作中に、パッドを水につけたり、水をかけたり、入浴したりしない。
- 浴室などの湿度の高いところでは使用しない。強いショックを受けます。
- 治療中、パッドにベルトやネックレスなどの金属が触れないようにする。強いショックを受けたり、ヤケドのおそれがあります。
- お子様や自分で意思表示ができない人に使わせない。また、自分で操作できない人への使用はさせない。事故やけがのおそれがあります。


自動コースで治療する(つづき)

神経痛

「痛みが強い」「しびれる」ときに使用してください

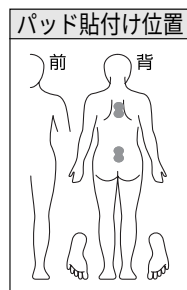

赤い導子プラグをつけたパッドを貼る位置のみ表示します。

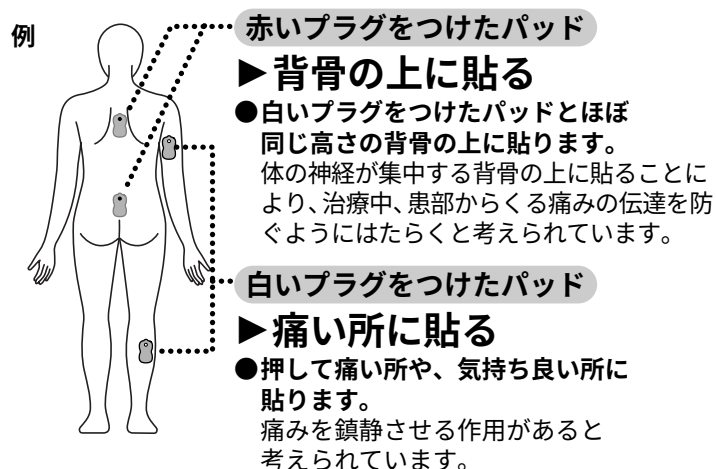



● 痛みが強く、緩和させたいときにお使いください。

● 赤いプラグのついたパッドは白いプラグのついたパッドとほぼ同じ高さの背骨の上に貼ってください。

例：肩の痛み

● 脚部の場合は腰の背骨の上に赤いプラグのついたパッドを貼ってください。

例：脚部にひろがる痛み

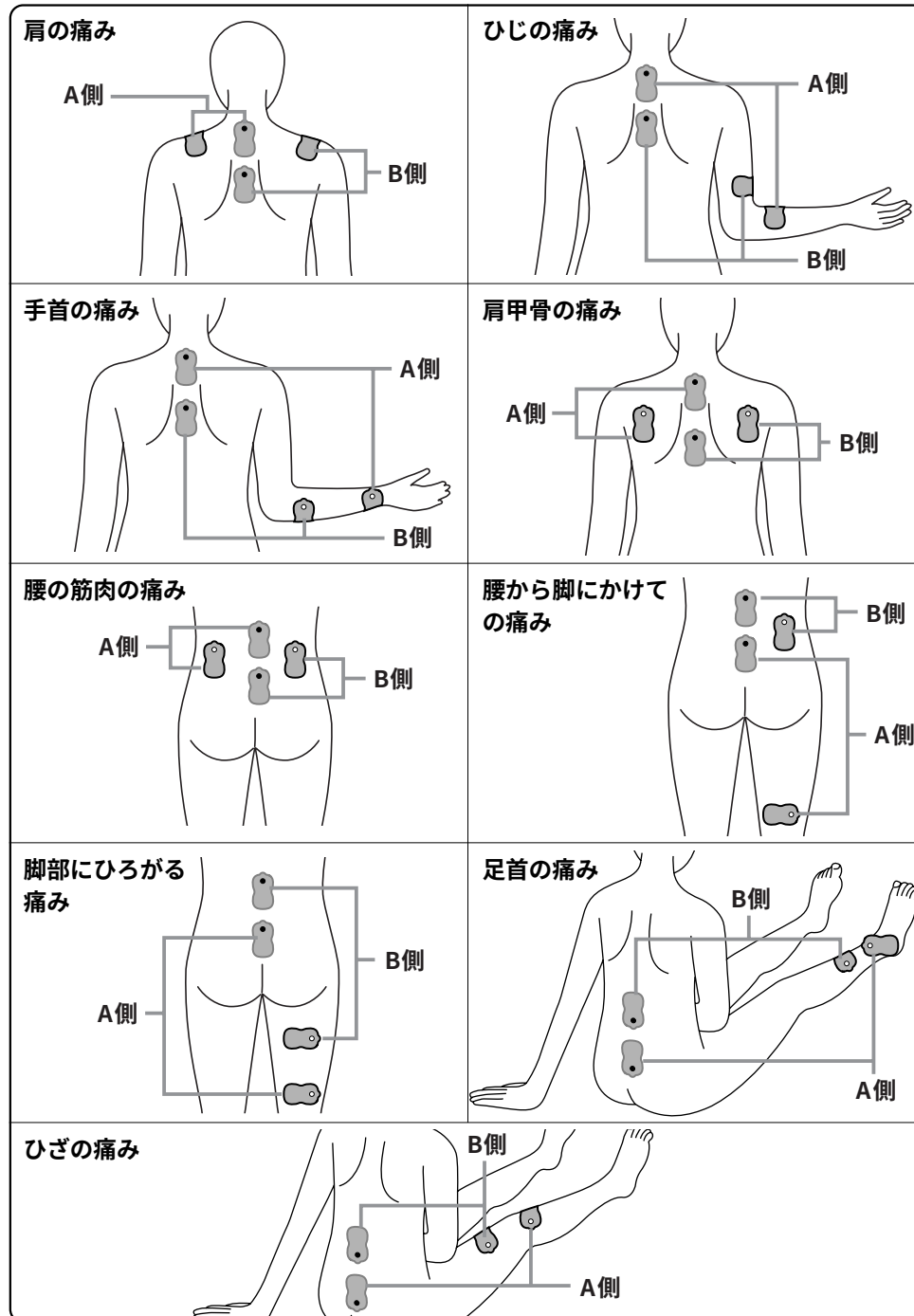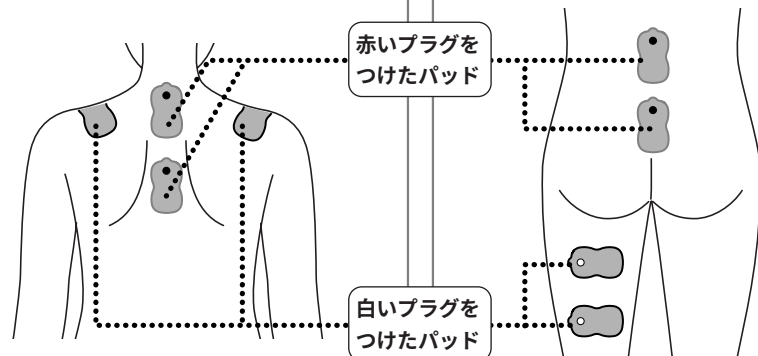


使いかた

自動コースで治療する(つづき)

4 治療開始 を押す

強さ調節ダイヤルを回す

- 治療範囲は「部分⇄広範囲」が点灯します。

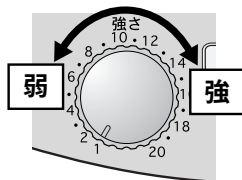

治療のめやす

時間：1カ所15分以内
回数：1カ所1日1回
強さ：心地よいと感じる程度

ソフトスタート機能

- 急に強い刺激を与えないため、弱い刺激でやさしくスタートします。

- はじめは3分間程度「1」～「2」で使い慣れてから強さを調節する。
刺激に敏感な方は、時間を短く、「1」から始めてください。
- むやみに強くしても、効果があるわけではありません。
皮膚を過剰に刺激するとヒリヒリしたり、赤くなることがあります。
- 治療開始後、約15分で自動的に電源が切れます。

■A側またはB側を重点的(強く)に治療したいとき


- 強さバランス調節ダイヤルで調節する(最大で3段階調節できます)



印を中央に合わせる



A側に回す

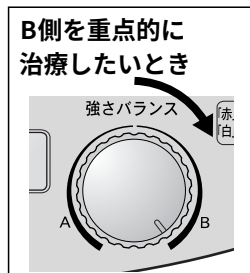

B側に回す

- 刺激の感じかたには個人差があるため、刺激部位、動作、強さによって刺激の差がわかりにくい場合があります。(2枚で使用する場合は調節できません)

5 約15分で自動的に停止し、治療終了する



- 途中で終了したいときは、電源切/入 を押してください。

治療部位を変更する

1 必ず強さ調節ダイヤルを「1」にする

2 自動コースから1つ選んで押す

- それまでの治療はただちに停止します。
- 押したボタンが点灯し、その他のボタンは消灯します。
- 操作手順ナビの「パッドを4枚貼ってから…」のランプが点滅します。
残り時間は継続して表示します

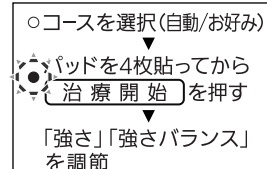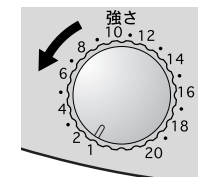

3 パッド貼付け位置を確認し、パッドを4枚貼る P10~15参照



4 治療開始 を押す

治療範囲を変更する(治療範囲を切替えて治療)

治療範囲について

〈部分〉2つのパッド間を交互に治療します。

〈広範囲〉4つのパッド間全面を同時に治療します。(4極マルチパルス方式)

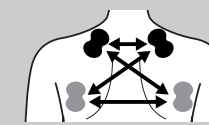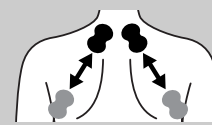


- 「部分⇄広範囲」は、「部分」と「広範囲」とをミックスしたプログラムです。
- 「脚」「足裏」「神経痛」コースでの治療範囲は「部分」のみです。

治療範囲 を押す


- 繰り返し押すと治療範囲が変更できます。

▶[部分⇄広範囲]→[部分]→[広範囲]

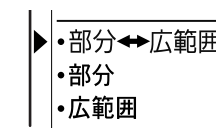


お好み動作に変更する

お好み動作 を押す P18~19参照

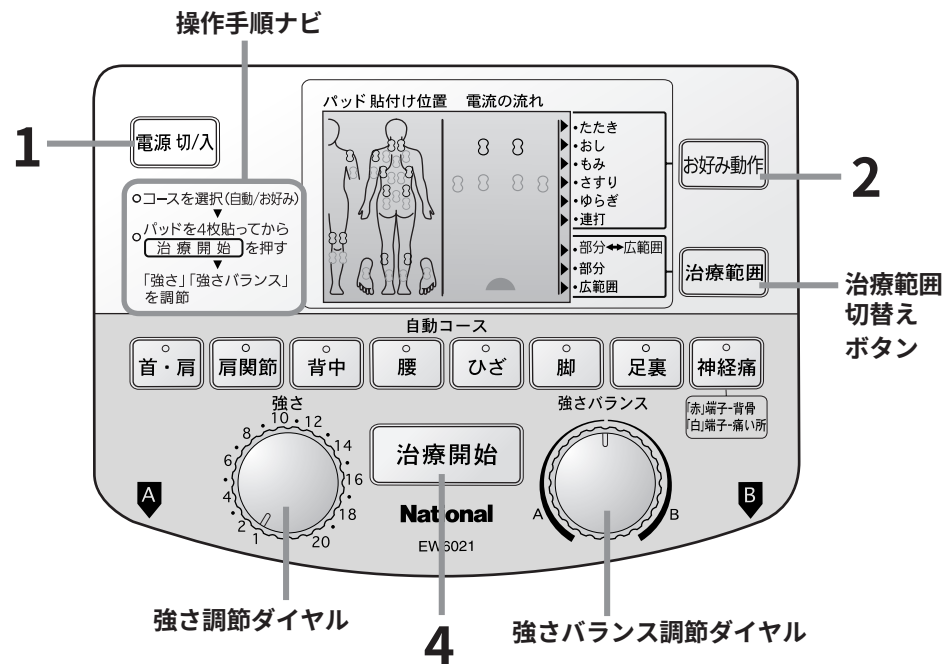


1 電源 切/入 を押して電源を入れる

- 操作手順ナビの「コースを選択」のランプが点滅します。
- 自動コースの全ランプが点滅を始めます。同時に表示部のお好み動作の表示 ▶ が点滅します。

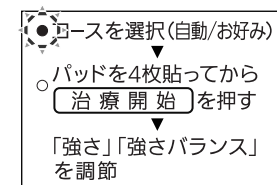


2 お好み動作 を押す

- 自動コースのランプは消灯します。
- 「たたき」に矢印が表示されます。
- 繰り返し押すとお好み動作が変更できます。
▶たたき→おし→もみ→さすり→ゆらぎ→連打

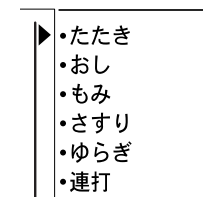

- 操作手順ナビの「パッドを4枚貼ってから…」のランプが点滅します。

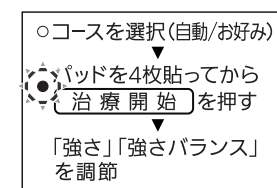

3 パッドを4枚貼る

- 4枚パッドでの治療をおすすめします。
パッドの貼りかた **P10～15参照**
(A側のみ2枚でも使用できます。 **P20参照**)

4 治療を開始する

治療開始 を押し、強さ調節・強さバランスダイヤルを回す

- 治療範囲は「部分⇄広範囲」が点灯します。
治療範囲は変更できます。 **P17参照**
- 治療開始後、約15分で自動的に電源が切れます。

5 約15分で自動的に停止し、治療を終了する

- 途中で終了したいときは、電源 切/入 を押してください。

パッド2枚で治療する


■A側のパッドを使用してください。(B側だけの治療はできません)

パッド2枚での治療は、下記のようにパッドを貼り付けてご使用ください。

●強さバランス調節はできません。 ●治療範囲は「部分」のみです。

「首」を 首・肩 で治療

首の付け根に貼る

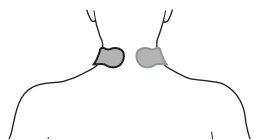


※頭部、うなじに近づけると
頭髮がパッドに貼りつい
たり後頭部への刺激感が
強くなることがあります。

「関節」を ひざ で治療


〈片方重点〉

治療したい関節を2つの
パッドで挟むように貼る

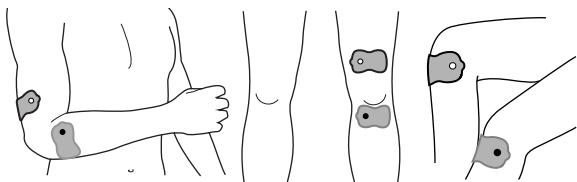


〈両ヒザ同時〉

ヒザの下側に貼る

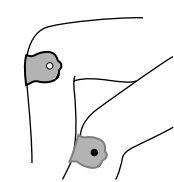

「肩」を 首・肩 で治療


背骨を中心に左右対称に
貼る

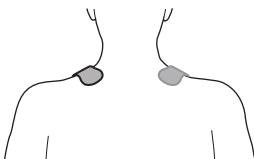

「腕」と「脚」を 脚 で治療


〈腕〉

腕の上下に貼る

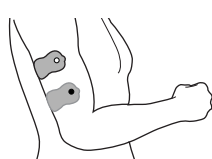


〈脚〉

ふくらはぎの上下に貼る

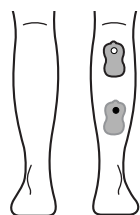

「腰」を 腰 で治療


背骨を中心に左右対称に
貼る

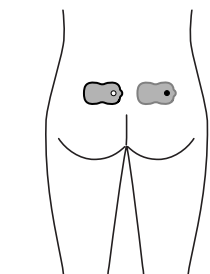


「足裏」を 足裏 で治療

〈片足重点〉

土ふまずとふくらはぎに貼る

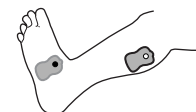

指のつけ根とかかとに貼る

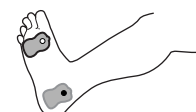

〈両足同時〉

土ふまずに貼る




神経痛

で治療


肩の痛み

白いプラグを
つけたパッド


赤いプラグを
つけたパッド

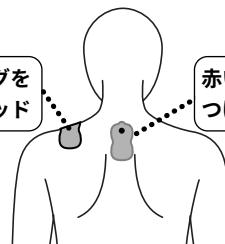


ひじの痛み

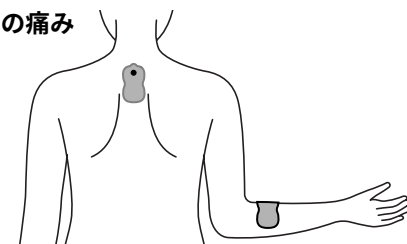


手首の痛み

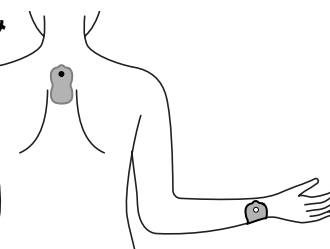


肩甲骨の痛み

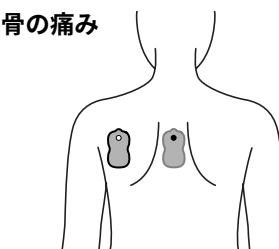


腰の筋肉の痛み

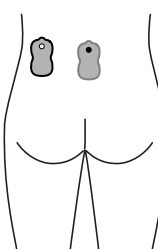


腰から脚 にかけて の痛み

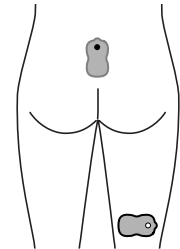


脚部にひろがる 痛み

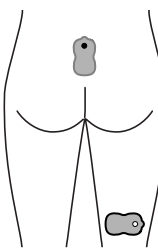

足首の痛み

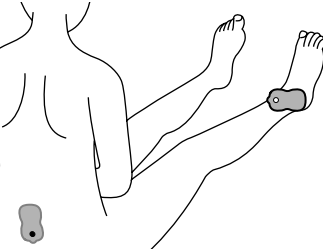

ひざの痛み

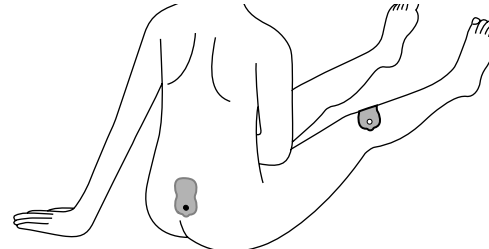

使
い
か
た


収納する

1 電源「切」になっているか 確認する

- ランプ、表示部消灯


2 パッドを 肌からはがす

- パッドを肌からはがすときはつまみ部を持って
ゆっくりとはがしてください。
いきおいよくはがすと肌かぶれを起こすおそれがあります

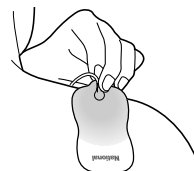


3 パッドをパッド収納板に 貼りつける

- パッドはパッド収納板に必ず貼ってください。
ホコリなどの汚れがつくと、治療時にははがれやすくなります
- コードはねじれをなくした状態で貼りつけてください。
コード巻取りが最後までできなくなる可能性があります

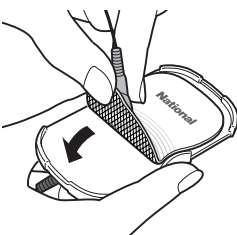


4 コードを巻き取る

- 本体側面のコード巻取りスイッチを矢印の方向にスライドする。
- コードはねじれないようにして巻き取る。
コードがねじれた状態で巻き取ると最後まで巻き取らない場合があります
- コード巻き取りが途中で止まった場合は少しコードを引き伸ばして再度コード巻き取る。
いきおいよく巻き取るとけがのおそれがあるため安全上ゆるめに設定しています

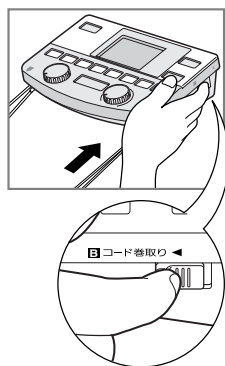

5 パッド収納板を収納ケースに 収納する

- パッドを貼りつけたパッド収納板を
収納ケースの中に、入れる。

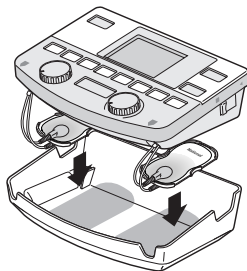

6 本体を 収納ケースの上に置く


- コードが本体とケースの間にはさまらないよう
ご注意ください。
断線の原因になります

パッドがつきにくくなったら

- パッド使用回数の寿命は約400回程度（水洗いした場合）です。
- パッドに汚れがつき粘着力が落ちた場合（ご使用15～20回程度を目安）は、水洗いすることにより粘着力が回復します。水洗いは、20回程度可能です。（水洗いの頻度、肌の状態、保管状態などで寿命が短くなる場合があります）


1 パッドから導子プラグを外す

- 導子プラグの接続部が水にぬれると
さびるおそれがあります。

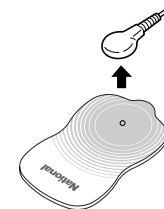

2 粘着面を 少量の水道水の流水で10秒 以内に指先で軽く洗う

- つまやブラシなどでこすらない。
- 水中につけない。
- もみ洗い、つけ置きはしない。

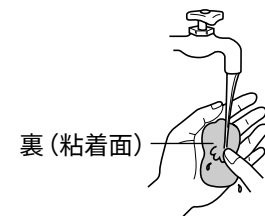

3 十分に水をきり、 粘着面を上にして、

表面の水気がなくなるまで自然乾燥させてから、
パッド収納板に貼りつける

- 水洗い後に粘着面をティッシュや布で拭かないでください。
粘着面に貼りつき取れにくくなる場合があります。
誤って粘着面に貼りついたときは、無理にはがさず
水でぬらすと簡単にはがれます。
- パッドは消耗品です。粘着面がいたんだ場合には別売品を
お求めください。



使
い
か
た

別売品



ロングユースパッド EW0603P
(2枚入り)


- 4枚同時に交換する場合は2個必要になります。

その他の部位への貼りかた

〈肩の上部の痛み〉


○ 首・肩 を選択

● 肩の広範囲を治療

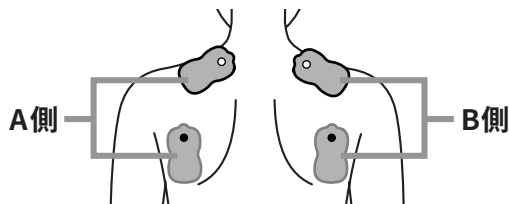


〈腰の内側の痛み〉

○ 腰 を選択

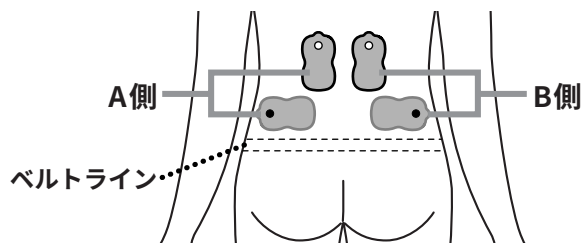

〈腰の外側の痛み〉


○ 腰 を選択

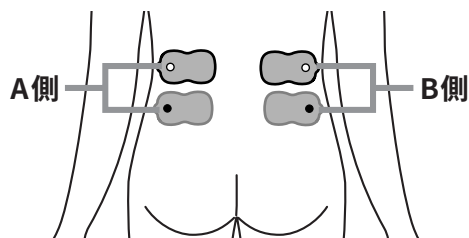

〈両ひざの痛み〉


○ ひざ を選択

※治療範囲は「部分」で治療してください。

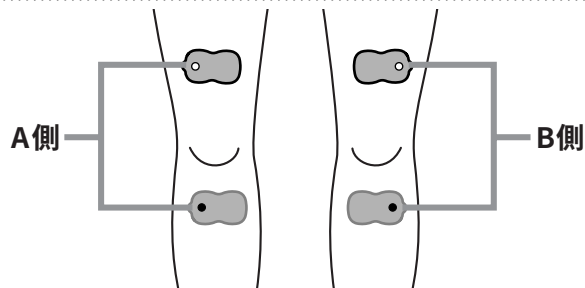






〈両足の裏側の痛み〉

○ 足裏 を選択

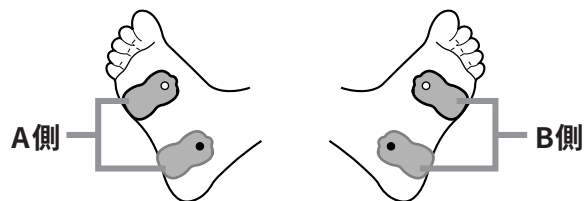

お手入れ・保管

必ず電源「切」の状態で行ってください。(ピリピリ感の原因)

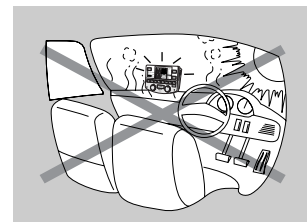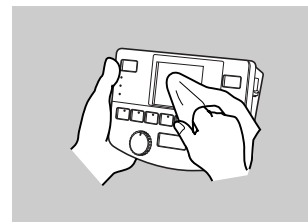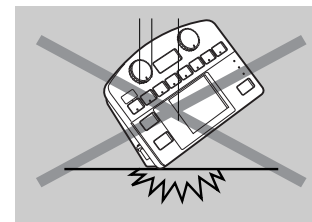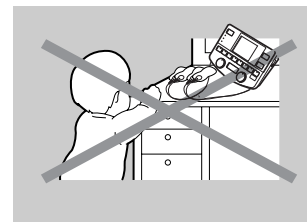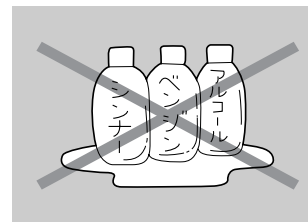

本体の汚れはぬるま湯を含ませた布でふく

- シンナーやベンジン、アルコールは絶対使用しない。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 本体を分解したり、高いところから落としたり、無理な力を加えたりしない。
- 温度、湿度の高いところや直射日光の当たる所に置かない。
- 長時間使用しないときは電池を取り出して保管する。




注意

- お子様の手の届く所に保管しないでください。
事故やトラブルのおそれがあります。

コードがからまり、出なくなった場合

- 1 コードを無理に引っばらずに、
パッド収納板に両方のパッドを貼ります。
- 2 コード巻取りスイッチを矢印の方向に
スライドさせたまま、2枚のパッドを
貼ったパッド収納板を持って、
ゆっくり手前に引っ張り出して
ください。

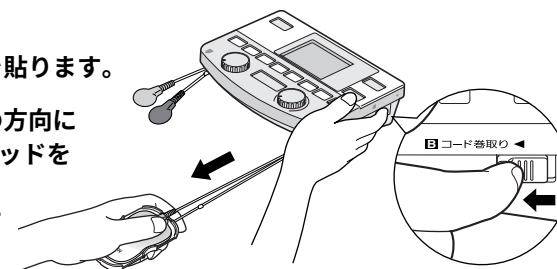

※コードに折りぐせやねじれがつかますと、コードの巻取りがしにくくなる場合があります。その際にはコードを布等で軽くはさみ、汚れをふきとるようにして、折りぐせやねじれをとってください。

使
い
か
た

お
手
入
れ
・
保
管

電気（低周波）療法や4極マルチパルス方式などについてQ&Aでお答えします。

■電気（低周波）療法とは

微弱な電気（低周波）を人体に通し、その刺激で筋肉を直接マッサージして、興奮した神経をしずめ、血行を促進し、コリによる痛みなどが自然に回復するように手助けする物理療法です。

- Q.1** どの位の時間治療すればいいの？
A.1 ▶ 一カ所約15分が基本治療時間です。これ以上つづけると、逆効果になることがあります。
- Q.2** 何カ所も治療して良いですか？
A.2 ▶ 一日に何カ所治療しても構いませんが、一カ所15分以内という制限を守ってください。
- Q.3** いつ治療するのが効果的？
A.3 ▶ お風呂上がりに治療するのが適しています。ご使用の際は、必ず皮膚の汗や水分をよく拭き取ってお使いください。体が暖まっていて、血行促進効果も高まります。
- Q.4** 何故使ってはいけないときがあるの？
A.4 ▶ ●発熱時：さらに病気を悪化させるおそれがあります。
 ●生理中：サイクルを狂わせたり、体調をくずす原因。
 ●妊娠中、産後：ホルモンのバランスがくずれています。
 ●高血圧：血管に大きな負担となります。特に頭部では絶対に使用しないで。
 以上の様な場合は必ず医師と相談してください。
- Q.5** たたき、もみ、おし、さすり、ゆらぎ、連打などの刺激がありますが、どのように効果が違うのですか？
A.5 ▶ 電気（低周波）治療では目的によって1200Hzまでの周波数を選んで使用します。周波数ごとに下記のような特徴があると言われています。
低い周波数の特性：
 筋肉こり解消や痛み緩和の持続性に優れると言われており、筋収縮運動によるポンプ作用で血行促進させたり、痛み抑制物質の分泌を促す効果があると言われています。この商品には3～8Hz（たたき）、40Hz（おし）、50Hz（もみ）、83.3Hz（連打）の4種類の低い周波数が使用されています。
高い周波数の特性：
 低い周波数と比較し、筋収縮をおこしにくく刺激が弱く感じられますが、痛み緩和の即効性に優れ、痛みの伝達をブロックする効果があると言われています。この商品には100Hz（さすり）、120Hz、1200Hzの3種類の高い周波数が使用されています。

- Q.6** 肩こりとは？
A.6 ▶ 肩こりは、かたよった姿勢からくる疲労がもとで肩や背中の筋肉の血行が悪くなるために起こるものと考えられています。放置すると習慣化しやすく、早目の手当が大切です。適切な運動等で筋肉の緊張をほぐし、筋肉内に蓄積した疲労物質を分散させて血行を促進することにより、痛みをやわらげることができます。
- Q.7** 神経痛とは？
A.7 ▶ 神経痛は、各種の原因により、神経が圧迫されて痛みやしびれを感じるものと考えられています。寒さや冷え、感冒や過労などを原因とする種類の神経痛は、患部の血行を促進し、周辺の筋肉の緊張をほぐすことにより、痛みやしびれをやわらげることができます。
- Q.8** なぜ「神経痛」のときだけパッドを背骨の上に貼るの？
A.8 ▶ 体で感じる痛みは神経が集中する背骨を通して脳に通じ、そこではじめて痛みを感じると考えられています。赤いプラグをつけたパッドでは、背骨の上に貼ることで治療中、患部からくる痛みの伝達を防ぐようにはたらし、白いプラグをつけたパッドでは、痛みを鎮静させる作用があると考えられています。
- Q.9** 4極マルチパルス方式とは？
A.9 ▶ **4極マルチパルス方式** **2枚パッド方式**

 痛みのある筋肉を直接治療しながら、その痛みにつながる周りの筋肉もまとめて治療する方法が4極マルチパルス方式です。実際に筋肉はいろんな方向に繊維が流れています。筋肉の繊維に沿って電流を流すことで、より筋肉が伸縮しやすく治療効果が高まります。各部位の筋肉の繊維方向を考えてパッドを貼り、4つの電極から流れる電気刺激を自動的にコントロールし、筋肉をしっかり収縮させ、痛みを緩和させる方式です。

故障かな？と思ったとき

下記の点検をお願いします。

こんなとき	原因と処置
● 電源ランプが点灯しない ● 刺激が全く感じられない	▶ 電池が消耗または、逆入れになっていませんか？ P7参照 ▶ パッドを正しく貼っていますか？ P10～15参照 ▶ 電池収納部のホコリや異物を取り除く
● 刺激が弱い ● ピリピリする ● 2ヵ所同時治療をすると刺激に差を感じる	▶ パッドの汚れの付着や治療部位の汗などによって感じかたに差が出ることがあります。 P23参照
● 強くしても刺激が弱いまたは感じない	▶ 貼付け位置をずらす P11～15、20～21、24参照 ▶ 肌をむしタオルなどで湿らせてから使用する
● 使用中、急に強いショックを受けた	▶ パッドがはがれたり、粘着力が弱ったりしていませんか？ P23参照
● パッドを貼っているのに「パッドを4枚貼ってから…」のランプが点滅したままになっている	▶ パッドがはずれていませんか？ パッドがしっかり肌に密着するよう貼り直してください。（パッドの粘着力が弱い場合は水洗いしてください） P23参照

こんなとき	原因と処置
● パッドの粘着面が変色した	▶ ご使用になる状況によって変色することもあります。性能に問題はありません。そのままご使用ください。
● 使用中、マークが出て、出力が停止してしまった	▶ 乾電池が消耗していませんか？ P7参照 （乾電池が消耗していますので交換してください）
● マークが出たり出なかったりする	▶ 治療のコースや強さによって出力の大小が異なるため、コースや強さを切替えるとマークが出て使えないときがあります。また、マークが再び消えて使えるようになったりすることがあります。 P7参照 （乾電池が消耗していますので交換してください）
● マークが出たのに使えるときがある	▶ 使用中にマークが出た乾電池でも、電源を切ってしばらくすると電池性能が若干回復し、ご使用になれる場合があります。 P7参照 （乾電池が消耗していますので交換してください）
● コードが出ない ● コードがもどらない	▶ コードがからまっていますか？ P25参照 コードエンドライン（赤色）が見えていたらそれ以上ひっぱらないでください。

定格・仕様

販売名	電気治療器 EW6021	本体寸法	高さ51×幅191×奥行138mm
電源	単3形乾電池 4本	質量	約435g（乾電池含まず）
類別	家庭用電気治療器	製造販売業者	松下電工株式会社 彦根工場 滋賀県彦根市岡町33番地
一般的名称	家庭用低周波治療器 （JMDNコード70986000）	製造業者	北京松下電工有限公司 中華人民共和国北京市 経済技術開発区同濟北路1号
医療機器の種類	管理医療機器		
医療機器認証番号	218AKBZX00003000		

点検後なお異常がある

◇お願い◇
この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

使用を中止



警告

● 絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。事故や、トラブル、故障のおそれがあります。

● しばらく使用しても効果があらわれない場合、医師または専門家に相談してください。

お知らせ

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店・購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの電気治療器の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の28～29頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

- **保証期間中は** お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは** お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事後へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365** ハイ 365日
(全国共通番号)
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401  名古屋 ☎052-551-7900 
東京 ☎03-5392-7190  福岡 ☎092-622-0531 

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

ご注意 ・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

0504

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

2006年2月20日作成(新様式)第1版 Y.NO1

EW6021(W903060211)

Printed in China

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル 電気治療器保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW6021		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 電 話 () —		
※ 販売店	住所・氏名 電話 () —		

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

キリトリ線