

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 保証書について

この製品には保証書を別途添付しております。  
保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。  
保証期間はご購入日より1年間です。  
但し、営業用としてお使いのときは、保証期間は3ヵ月にさせていただきます。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのナショナルアーバンの補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の17～18頁に従ってご確認ください、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は  
お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(出来るだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービスについてご不明な点は  
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部

〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33 TEL (0749) 23 - 1511

S NO.1

National  
松下電工

保管用

保証書別添

医療用具許可番号  
25BZ0087

# ナショナル アーバン EP779 取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

A&I 快適を科学します

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



## 注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例



記号は、**禁止**の行為を示しています。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。  
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



## 警告



必ず守る

- 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえご使用ください。  
事故や体調不良を起こすおそれがあります。  
(1)心臓に障害のある人 (2)ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人  
(3)悪性腫瘍のある人 (4)妊娠中や生理中の人 (5)背骨に異常のある人や曲がっている人  
(6)かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 (7)肩粗しょう症の人  
(8)急性症状のある人 (9)安静を必要とする人 (10)上記以外に特に身体に異常を感じているとき
- マッサージ使用中やリクライニング操作、脚のせ台を出し入れするときは、必ず周囲に人やペットがいないことをご確認ください。  
事故やけがを起こすおそれがあります。



禁止

- お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせないでください。  
事故やけがを起こすおそれがあります。
- 布地が破れた状態(内部機構が露出等)では使用しないでください。すぐに修理を依頼してください。  
事故やけがを起こすおそれがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。  
火災や感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。  
火災や感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電やショート・発火の原因になります。
- 操作器に水などをこぼさないでください。  
感電やショート・発火の原因になります。



分解禁止

- 絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。  
発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。



## 注意



禁止

- 自分で意思表示ができない人に使わせないでください。また、身体の不自由な方だけのご使用はお避けください。  
事故やけがのおそれがあります。
- 素肌では使用しないでください。  
けがをするおそれがあります。
- 頭・ひじ・ひざ・腹部には使用しないでください。また、もみ玉部に手や足をはさまないでください。  
けがをするおそれがあります。(首筋などには、柔らかいタオル等をあててご使用ください)
- 電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。  
感電やショート・発火のおそれがあります。
- 電源ボックスのコンセントは、大容量の機器(ドライヤー・掃除機等)には使用しないでください。  
ショートや発火のおそれがあります。
- 浴室など湿気の多い場所で使わないでください。  
感電及び故障の原因になります。
- 脚のせ台を手動で操作するときは、必ずレバーで操作してください。  
脚のせ台を直接手で引き上げると、ロックがかからないことがあり  
事故やけがのおそれがあります。
- 背もたれと座のすき間に手や足を入れないでください。  
事故やけがのおそれがあります。
- 頭部に髪ざりなどの固いものをつけて使用しないでください。  
事故やけがのおそれがあります。
- 人を乗せたまま移動しないでください。  
転倒してけがのおそれがあります。



必ず守る

- もみ玉の位置を確認の上、ゆっくり座ってください。  
事故やけがのおそれがあります。
- マッサージは1回15分以内に。また同一カ所への使用は5分以内にしてください。  
長時間の連続使用は逆効果やけがのおそれがあります。
- 使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。  
事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- 使用後は電源スイッチを必ず「切」にし、施錠スイッチを「閉」にしてください。  
子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。  
ショートや発火のおそれがあります。
- 脚のせ台には座らないでください。また、脚のせ台をだしたまま、座ったり立ち上がったりしないでください。  
事故やけがのおそれがあります。
- 水平な場所で使用してください。  
本体が倒れて事故のおそれがあります。
- はじめは弱い刺激でマッサージしてください。  
けがのおそれがあります。



アース線接続

- 安全のためにアースを確実に取り付けてください。  
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。(アースの取り付けは3ページを参照してください)



電源プラグを抜く

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。  
感電やけがをするおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショート・発火のおそれがあります。
- 動かない場合や、異常を感じたときは、使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いてください。  
感電や発火のおそれがあります。
- 停電のときは直ちに電源プラグを抜いてください。  
復帰したとき、事故やけがのおそれがあります。



# 各部のなまえとはたらき

## 本体

### 背クッション

- ファスナーで着脱可能。14ページ
- マッサージが弱く感じる場合はとりはずしてご使用ください。

### 本体操作盤

- 操作器の乾電池が切れたときでもご使用できます。5ページ

### 受信部

### 脚のせ台

- 側面のレバーで脚のせ台だけ出し入れできます。13ページ

- 脚振動マッサージ付

### 電源ボックス

#### 電源スイッチ

#### 施錠スイッチ

#### コンセント

- フットマッサージャー用コンセント付(最大300Wまで)

### 注意

- 大容量の機器(ドライヤー・掃除機等)には使わないでください。ショートや発火のおそれがあります。

### 枕

- ホックで着脱可能。14ページ
- 背クッションに装着する。
- マッサージをするときは、後ろにはねあげてください。

### もみ機構部(もみ玉)

### 背もたれ

- もみ機構部内蔵

### ひじ掛け

### 受信部

### 操作器ポケット

### 別売枕カバー取付面ファスナー

### アース端子

### キャスター

- 移動に便利です。

- アース線の接続について。
- アース線を椅子本体のアース端子(ねじ)に接続します。(アース線は付属してありません)
- コンセントにアース端子がついている場合は、アース端子にアース線を接続します。
- コンセントにアース端子がない場合やご不明な場合は、お買上げの販売店にご相談ください。(アース工事は電気工事士による第三種接地工事が必要です)
- 水道管やガス管には、絶対に接続しないでください。

### 注意

- 安全のためにアースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

## 操作器

この商品はワイヤレス型操作器(赤外線方式)です。お使いになる前に、「操作のしかた」(5~6ページ)をよく読んでうえて正しくお使いください。

### 送信確認ランプ

- 操作機から本体に信号を送信するときに点灯します。

### 送信部

5ページ

### 動作表示部

#### コース表示

- 自動コース名を点灯してお知らせします。

#### やわらかモード表示

- 自動コースのやわらかモード選択時に点灯します。

#### お好み動作表示

- お好み動作時、選んだ動作を点灯してお知らせします。
- マッサージ終了後、もみ玉が上部に移動時(収納動作)に点滅します。

### 脚振動ランプ

- 脚のせ台の振動マッサージ動作時に点灯します。

#### 調節機能お知らせ表示

- お好み動作の場合、その動作で使える調節機能を点灯します。(動作によって使える調節機能は異なります)

#### 乾電池寿命表示

- 乾電池の寿命が残り少なくなったときに点灯します。
- 点灯した場合は、すみやかに乾電池を交換してください。

### 停止ボタン

- マッサージを急いで止めたいときに押す。もみ玉はその場で停止します。

### 入切ボタン

- 押す。動作をはじめます。
- 再び押す。上部に移動して停止します。

### 脚振動ボタン

- 脚のせ台の振動マッサージをはじめます。

### リクライニングボタン

- リクライニングをするとき、もとに戻すときに押し続けます。

## 自動コース(ふたを閉じる)

### 肩位置合わせスイッチ

10ページ

### 自動コースボタン

「上半身」「首・肩」「腰」の3つのコース  
9ページ

### やわらかボタン

- 自動コースをやわらかモードに切替えます。10ページ

## お好み動作(ふたを開ける)

### 動作ボタン

- お好みのマッサージを選びます。

### 上下調節ボタン

- お好みの高さになるまで押し続ける。
- 動作表示部で( )が点滅します。

### 強さ調節ボタン

- お好みの強さになるまで押し続ける。
- 動作表示部で+( - )が点滅します。

### 幅切替ボタン

- もみ玉の幅を切替えます。
- 選んでいる状態を動作表示部に表示します。

### 範囲切替ボタン

- 上下に移動する範囲を切替えます。
- 選んでいる状態を動作表示部に表示します。


# 操作器の準備と使い方

このページの内容をよく読んだうえで正しくご使用ください。

## 操作器の準備

操作器に単3アルカリ乾電池2本を入れる。

1 カバーを開ける。

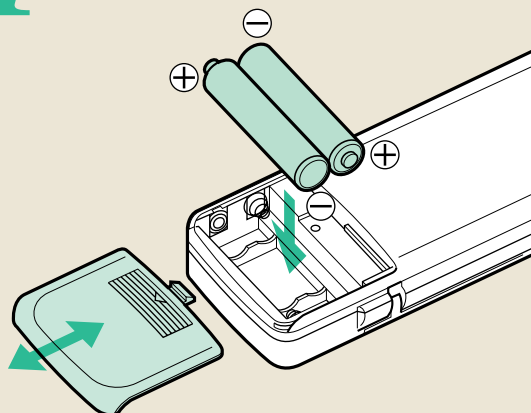

2  $\oplus$  $\ominus$ を正しく入れ  
カバーを閉める。

付属品の乾電池は動作確認用に用意しているものです。(寿命が短い場合があります)

### 乾電池について

必ずナショナルアルカリ乾電池を使用してください。(アルカリ乾電池専用)

乾電池の寿命は、約1年(ナショナルアルカリ乾電池をご使用のとき)ですが、次のようなときはすみやかに2本とも交換してください。

- 動作表示部に「」が表示されたとき。
- 操作器で動作切替えがしにくくなったとき。

乾電池を交換するときは

- 2本とも新しいもの、同じ種類のものとの交換してください。
- $\oplus$ と $\ominus$ の向きを表示どおり正しく入れてください。

長時間ご使用にならないときは、乾電池をはずして保管してください。

乾電池の取り扱いに関しては、乾電池本体に記載してある注意事項をよくお読みのうえ正しくお使いください。


## 操作のしかた

- 操作器の送信部(送信方向)が椅子本体受信部に向く姿勢でご使用ください。


起きているとき

リクライニングしているとき

良い  
送信姿勢

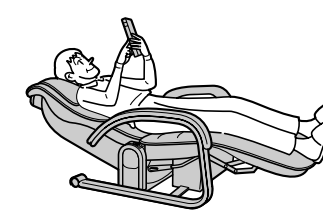

悪い  
送信姿勢

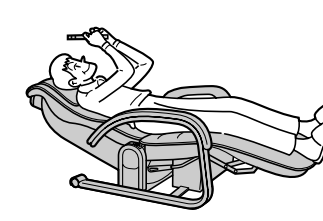

- 信号を受けると、本体からピッという受信音がします。
- リクライニングボタン、上下調節ボタン、強弱調節ボタンはピーピーという連続音がするまで押し続けます。
- 受信音がしない場合は、操作器の位置をずらして、再度、ボタンを押してください。
- 信号の届く範囲は約2mです。

## 操作上ご注意

- 操作器送信部や椅子本体受信部をふさぐと操作できません。  
操作器送信部をふさぐような持ち方をしないでください。  
椅子本体受信部が、背クッションやひざ掛け等でかくれないようにしてください。
- 本体受信部に直射日光や照明器具の強い光があたらないようにしてください。  
信号を受けとれなくなる場合があります。
- マッサージをするときは、入/切ボタンを押し、ピッという受信音や、もみ玉が動きだしたことを必ず確認してください。  
入/切ボタンによる動作開始の信号を受け付けてからでないとい他のマッサージ操作はできません。
- 操作器にもタイマーが内蔵してあります。入/切ボタンを押してから約15分後、自動的に動作表示部に「」が点滅し、本体から、ピーピーという連続音 約15秒後に消えます。  
但し、本体タイマーと操作器タイマーはずれることがあります。(自動コース時最大約4分)
- 操作器に無理な力を加えたり、落下させたりしないでください。  
けがや故障のおそれがあります。

## 本体操作盤について

- 操作器の乾電池が切れているときでも、マッサージ(上半身コース)や、椅子の操作ができます。

### 入/切ボタン

- 押す  
上半身コースをはじめます。
- 再び押す  
上部に移動して停止します。

### リクライニングボタン

- リクライニングをするとき  
もとに戻すときに押しつづけます。

### 停止ボタン

- マッサージを急いで止めたいときに押す。  
もみ玉はその場で停止します。

### 脚振動ボタン

- 脚のせたい振動マッサージをはじめます。






## 送信部と受信部

- ご使用の前に送信部と受信部の位置、および送信部からの送信方向を確認してください。

送信部

送信方向

受信部

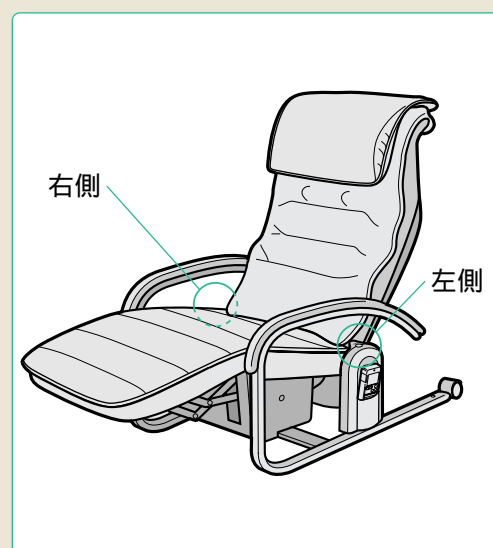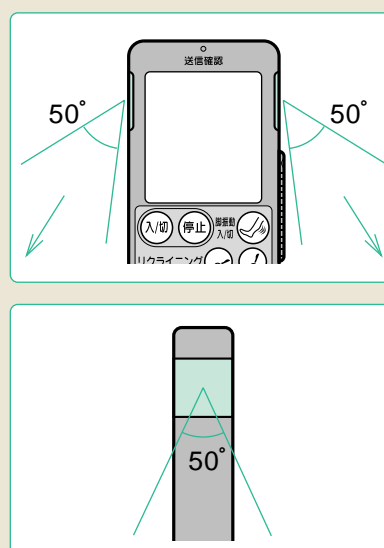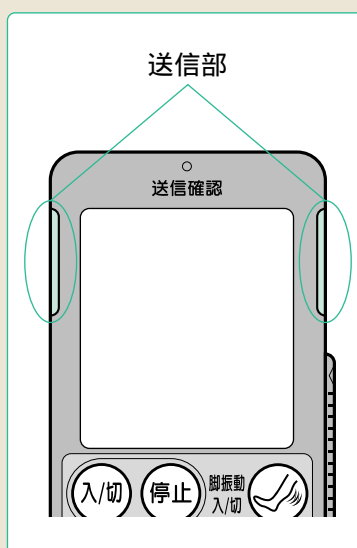



# ご使用の前に

## 使用場所について

室内でリクライニングができる  
スペースを確保する。

壁とのスキ間に40cm以上確保してください。

- 壁との距離は枕がおおよその目安です。約40cm



## 使用場所の注意




- 浴室など湿気の多い場所はさけてください。
- 直射日光が毎日長時間当たる所、ストーブの近くなど直接高温になる所はさけてください。

- 床をキズつけるおそれがありますのでマット等をしくことをおすすめします。

## 警告

- 布地が破れた状態では使用しないでください。すぐに修理を依頼してください。事故やけがを起こすおそれがあります。
- お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせないでください。事故やけがを起こすおそれがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電やショート・発火の原因になります。
- 操作器に水をこぼさないでください。感電やショート・発火の原因になります。

## 梱包箱から取り出したときのみの設定

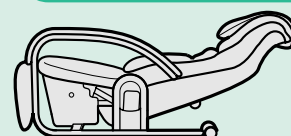

商品お届け用の状態(左図)になっているときは、正常なリクライニング動作ができません。

設置する場所を決め、アースを取り付け、リクライニングできるスペースを確保したら、電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込み、下記の初期設定をしてください。



- ①脚のせ台が収納されている状態で、操作器のリクライニングボタン④を押す。
- ②背もたれの動きが完全に止まったら、ボタンから手をはなす。この操作をする際、脚のせ台は絶対にレバーで出さないでください。故障するおそれがあります。

商品お届け用の状態に戻すことはできません。

## 注意

- もみ玉の位置を確認の上、ゆっくり座ってください。事故やけがのおそれがあります。
- 浴室など湿気の多い場所で使わないでください。感電及び故障の原因になります。
- 電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。感電やショート・発火のおそれがあります。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。ショートや発火のおそれがあります。
- 動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いてください。すぐに点検修理を依頼してください。感電や発火のおそれがあります。
- 頭部に髪がざりなどの固いものをつけて使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。
- 水平な場所で使用してください。本体が倒れて事故のおそれがあります。

## マッサージの前に

### 1 後ろを確認する。

- 障害物やお子様に注意してください。

### 2 電源を入れる。

1. プラグを差し込む。

AC  
100V



2. 施錠スイッチをお手持ちの鍵のようなもので「開」にする。



3. 電源スイッチを「入」にする。

### 3 自動コースか お好み動作を選ぶ。

#### 自動コースの場合


ふたを閉じる



9ページ

#### お好み動作の場合


ふたを開ける

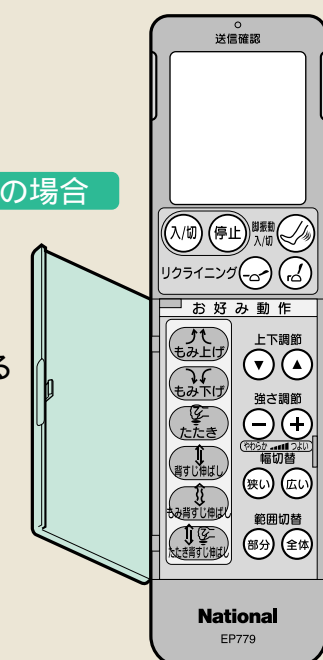

11ページ


- ご使用中、無理な力がかかった場合、安全のためにもみ玉の動きが止まる場合があります。そのときは体を浮かし気味にしてご使用ください。万ーピピッという警告音が鳴り、マッサージ機が停止した場合、操作器ポケットの横にある電源スイッチを一度切り、数秒後に再度「入」にしてから操作器の入切ボタンを押してください。特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

# 自動コースでマッサージ

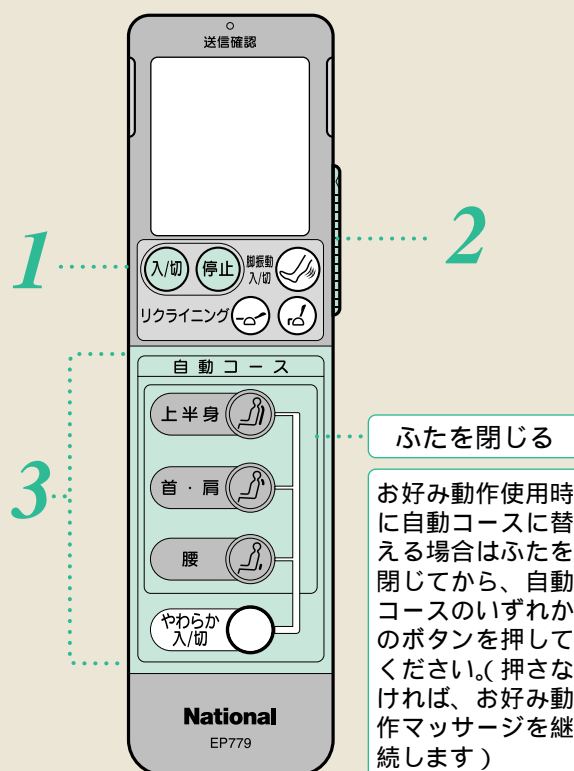

## 1 入/切 押す。

- ピッという受信音になり、もみ玉が動き出します。
- 動作表示部のコース表示をします。

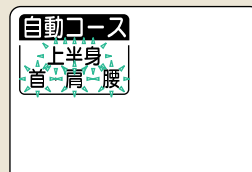


- 肩位置で「もみ下げ」動作をはじめます。「もみ下げ」動作中に、肩位置を合わせてください。(約15秒間)


- 約15分後、もみ玉が上部に移動して停止します。

## 2 肩位置を合わせる。

- 動作表示部が点滅中に自分の肩位置に合うように1～7の中から選ぶ。

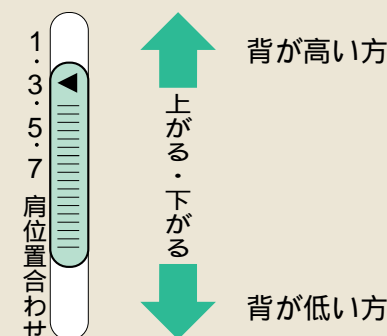

- マッサージ途中でも肩位置合わせの変更ができます。
- マッサージ中にリクライニング調節をしたときや、座る位置を変えたときは肩位置がずれますので再度肩位置を調節してください。

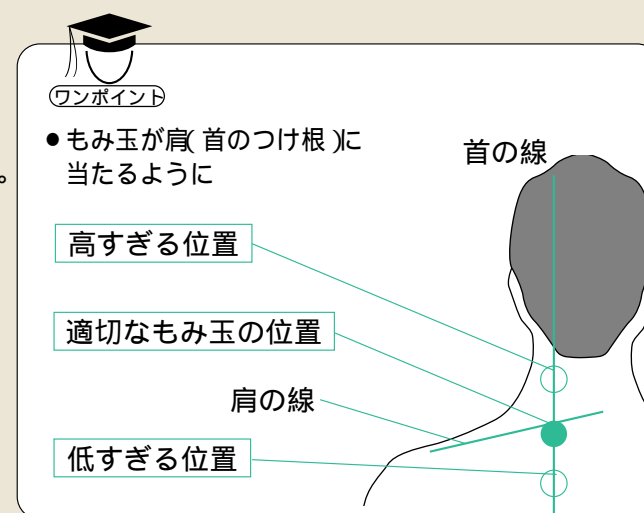

- 上下約10 の範囲で調節できます。
- 肩位置が合わないときは、体をずらして調節してください。


### 警告

- 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
  - (1)心臓に障害のある人
  - (2)ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
  - (3)悪性腫瘍のある人
  - (4)妊娠中や生理中の人
  - (5)背骨に異常のある人や曲がっている人
  - (6)かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
  - (7)肩粗しょう症の人
  - (8)急性症状のある人
  - (9)安静を必要とする人
  - (10)上記以外に特に身体に異常を感じているとき
- マッサージ使用中やリクライニング操作、脚のせ台を出し入れするときは、必ず周囲に人やペットがいないことをご確認ください。事故やけがを起こすおそれがあります。

### 注意

- 自分で意思表示ができない人に使わせないでください。また、身体の不自由な方だけのご使用はお避けください。事故やけがのおそれがあります。
- 使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- 頭・ひじ・ひざ・腹部には使用しないでください。また、もみ玉部に手や足をはさまないでください。けがをするおそれがあります。
- 素肌では使用しないでください。けがをするおそれがあります。
- マッサージは1回15分以内に、また同一カ所への使用は5分以内にしてください。長時間の連続使用は逆効果やけがのおそれがあります。
- はじめは弱い刺激でマッサージしてください。けがのおそれがあります。

## 3 自動コースボタンを押す

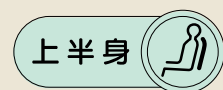

お好みの自動コースボタンを押す。(ピッという受信音)

- 選んだコースを動作表示部に表示します。
- 途中で別のコースのボタンを押すと変更できます。
- 押さない場合は、上半身コースを開始します。

### 使いすぎ防止タイマー(内蔵)

- 操作器の入切ボタンを押すと使いすぎを防ぐためのタイマーが
- 約15分でタイマーが切れ、もみ玉が上部に移動して止まり、動作
- 再度ご使用のときは、入切ボタンを押してください。

マッサージが強すぎる方のために

### やわらかモード



やわらかボタンを押す。(ピッという受信音)



- 動作表示部の「やわらか」を表示。

マッサージが全体的に弱くなり、やわらかなマッサージに切り替わります。(コース内容は変わりません)

- 自動コースの途中からでも、「やわらか」モードに変更できます。
- 再度押すと解除されます。

作動します。表示が消えます。

コース内容終了後、自動的にもみ玉が上部に移動して停止。

- ピーピーという連続音がします。
- 再度動かす場合は 入/切 押す。
- 再度 入/切 押す。
- もみ玉が上部に移動して停止します。(ピーピーという連続音)
- 移動中は動作ランプが点滅します。

急いで止めたいとき 停止 押す。


- 全ての動作がその場で停止します。
- もみ玉が収納状態(上部で停止)にならず、座り心地をそこなおそれがあります。

約15分後、もみ玉は上部に移動して停止。

- 再度動かす場合は 入/切 押す。




# お好み動作マッサージ

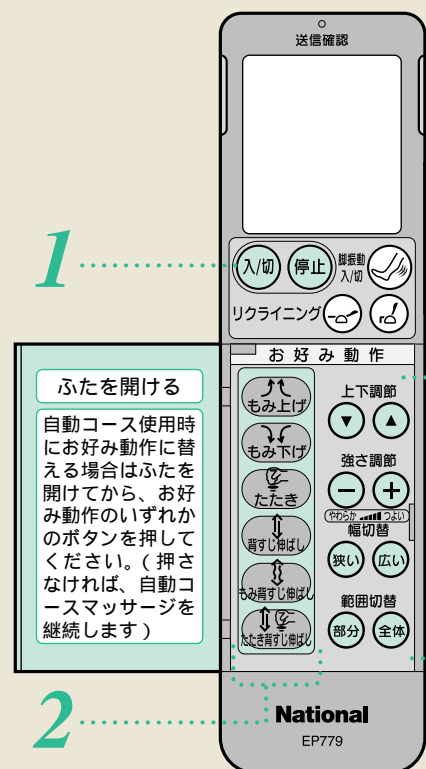

## 1 入/切 押す。


- ピッという受信音になり、もみ玉が動き出します。
- 動作表示部の「お好み動作」を表示します。
- もみ上げ動作をはじめます。

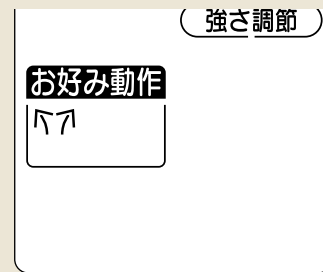

- 約15分後、もみ玉が上部に移動して停止します。

## 2 動作を選ぶ。

お好みの動作ボタンを押す。  
(ピッという受信音)

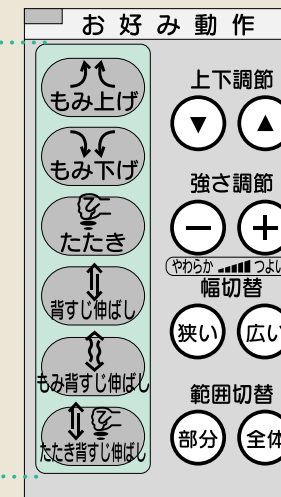


- 選んだ動作を動作表示部に表示します。

### 上手なマッサージの手順



- 1 体をなじませる為、はじめは「背すじ伸ばし」。
- 2 次にコリの部分を中心に周辺をもみやたたきでマッサージ。

首・肩の場合 背中の場合 腰の場合

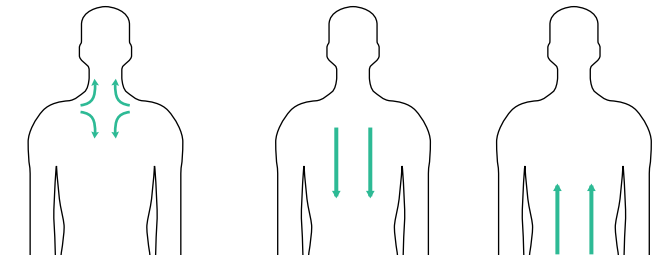

首はもみ上げで肩はもみ下げで 背中はもみ下げで上から下へ 腰はもみ上げで下から上へ

- 3 仕上げには「背すじ伸ばし」で、もみほぐした後の筋肉の緊張をやわらげます。

### 警告

- 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- (1) 心臓に障害のある人
- (2) パーサーメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
- (3) 悪性腫瘍のある人
- (4) 妊娠中や生理中の人
- (5) 背骨に異常のある人や曲がっている人
- (6) かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- (7) 骨粗しょう症の人
- (8) 急性症状のある人
- (9) 安静を必要とする人
- (10) 上記以外に特に身体に異常を感じているとき
- マッサージ使用中やリクライニング操作、脚のせ台を出し入れするときは、必ず周囲に人やペットがいないことをご確認ください。事故やけがを起こすおそれがあります。

### 注意

- 自分で意思表示ができない人に使わせないでください。また、身体の不自由な方だけのご使用はお避けください。事故やけがのおそれがあります。
- 使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- 頭・ひじ・ひざ・腹部には使用しないでください。また、もみ玉部に手や足をはさまないでください。けがをするおそれがあります。
- 素肌では使用しないでください。けがをするおそれがあります。
- マッサージは1回15分以内に、また同一カ所への使用は5分以内にしてください。長時間の連続使用は逆効果やけがのおそれがあります。
- はじめは弱い刺激でマッサージしてください。けがのおそれがあります。

## 3 調節する。 (動作表示部に表示されている機能だけ調節することができます)

### もみ玉の高さを調節する。




押している間、もみ玉が移動します。

(ピーピーという連続音)

- 「背すじ伸ばし」「もみ背すじ伸ばし」「たたき背すじ伸ばし」の時は、このボタンで途中反転します。(最上位置または最下位置では自動的に反転します)

### もみ玉の強さを調節する。

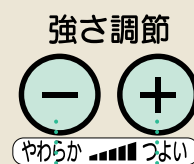


押している間、もみ玉が身体方向にせり出したり、ひっこんだりします。(ピーピーという連続音)

- 限界までくると動きが止まります。

### もみ玉の間隔を切り替える。

「たたき」「背すじ伸ばし」「たたき背すじ伸ばし」のとき。(ピッという受信音)

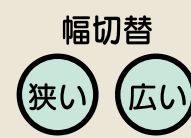


- 狭い・広いの2段階

狭い.....約8.5cm

広い.....約11cm

### 移動する範囲を切り替える。

「背すじ伸ばし」「もみ背すじ伸ばし」「たたき背すじ伸ばし」のとき。

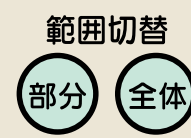

- 部分・全体の2段階

部分.....約12cm

全体.....約60cm

- 「部分」のときは上下調節ボタンでもみ玉の高さを調節できます。

### マッサージを途中でやめたいとき。

- 再度 入/切 押す。
- もみ玉が上部に移動して停止します。(ピーピーという連続音)
- 移動中は動作ランプが点滅します。

### 急いで止めたいとき 停止 押す。

- 全ての動作がその場で停止します。
- もみ玉が収納状態(上部で停止)にならず、座り心地をそこなうおそれがあります。

### 約15分後、もみ玉は上部に移動して停止。

- 再度動かす場合は 入/切 押す。

- 左右のもみ玉の高さ(強さ)が異なって感じられる場合がありますが、

構造上やむをえず発生するもので故障ではありません。

# 椅子の機能(リクライニング・脚振動マッサージなど)

## リクライニング

### 倒すとき

お好みの角度になるまで

👉 を押し続ける。

### 戻すとき

お好みの角度になるまで

👈 を押し続ける。




本体操作盤を使用して操作するとき。



倒す

戻す

●脚のせ台は背もたれと連動して動きます。

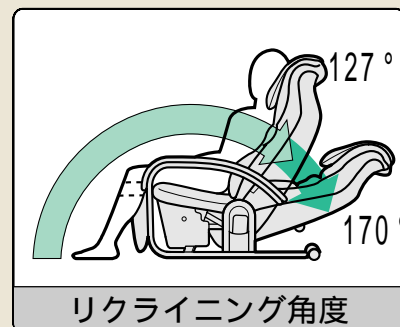

リクライニング角度



- リクライニングするときは、壁までの障害物やお子様に注意してください。
- 安全のために、もみ機構部(もみ玉)の位置を確認した上で、ゆっくりともたれてください。

## 脚のせ台の出し入れ

- 側面のレバーで脚のせ台だけを、出し入れすることができます。

### 出すとき

ロックボタンを押しながら、レバーを後方に倒す。

- 必ず最後まで(ロックがかかるまで)倒してください。
- 脚のせ台をレバーで出し入れするときは、脚を浮かせ気味にして操作してください。



ロックボタン

出す

収納

### ⚠️ 注意

- 脚のせ台には座らないでください。また、脚のせ台をだしたまま、座ったり立ち上がったりしないでください。事故やけがのおそれがあります。
- 脚のせ台を手動で操作するときは、必ずレバーで操作してください。脚のせ台を直接手で引き上げると、ロックがかからないことがあります。事故やけがのおそれがあります。
- 背もたれと座のすき間に手や足を入れないでください。事故やけがのおそれがあります。

### 収納するとき

ロックボタンを押しながら、レバーを引き上げる。

### ⚠️ 警告


- お子様に使わせないでください。事故やけがを起こすおそれがあります。
- マッサージ使用中やリクライニング操作するときは必ず周囲に人やペットがいないことをご確認ください。事故やけがを起こすおそれがあります。

## リクライニングや脚のせ台操作時のご注意

- リクライニング動作中に無理な力がかかった場合(障害物にあたる等)安全のために動きが止まる場合があります。そのときは障害物をとりのぞいてください。万一、ピピピッという警告音が鳴り動きが停止した場合は操作器ポケットの横にある電源スイッチを一度切り、数秒後に「入」にしてから再度操作してください。
- 電動リクライニングをする場合、脚のせ台の動きと連動して、レバーも自動的に動きますのでご注意ください。
- 脚のせ台をレバーで出したときは、必ずレバーで収納してください。(👈 を押しても、脚のせ台は自動的に動きません)
- 背もたれが倒れている(完全に起きていない)場合、脚のせ台を完全に収納することはできません。(レバーで操作するときも同様)👈 を押して、背もたれを完全に起こすと自動的に脚のせ台も収納します。(レバーで出した時は、背もたれを完全に起こしてからレバーで収納してください)
- 脚のせ台の最大高さ(角度)は電動リクライニング時と、レバーでの操作時とは若干異なります。

## 脚振動マッサージ

👉 を押す。

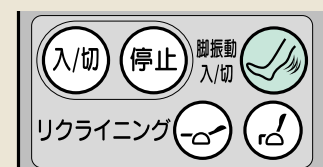

- 動作表示部に表示します。

脚振動 入


- 約30分で自動的に停止します。

止めたいときは、再度👉を押す。

- 本体操作盤で操作するとき。



## 背クッション・枕

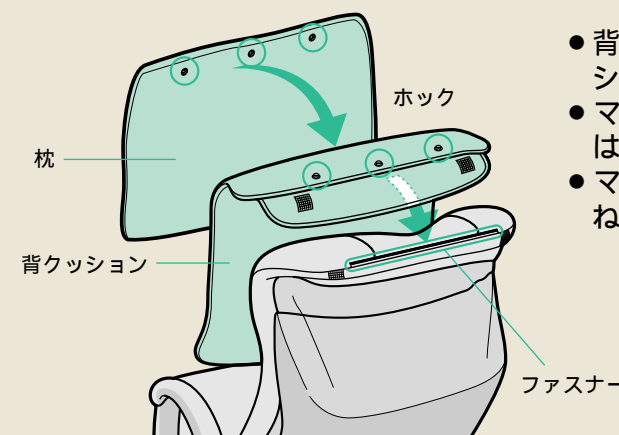

- 背クッションは椅子本体へファスナーで、枕は背クッションへフックで着脱する。
- マッサージが弱く感じる場合は、背クッションをとりはずしてご使用ください。
- マッサージをする時は、枕をとりはずすか、後方へはね上げてからのご使用をおすすめします。




# マッサージの内容


所要時間 50Hz地域約15分  
(全てのコース) 60Hz地域約12分

## 自動コースの基本動作


### 上半身コース

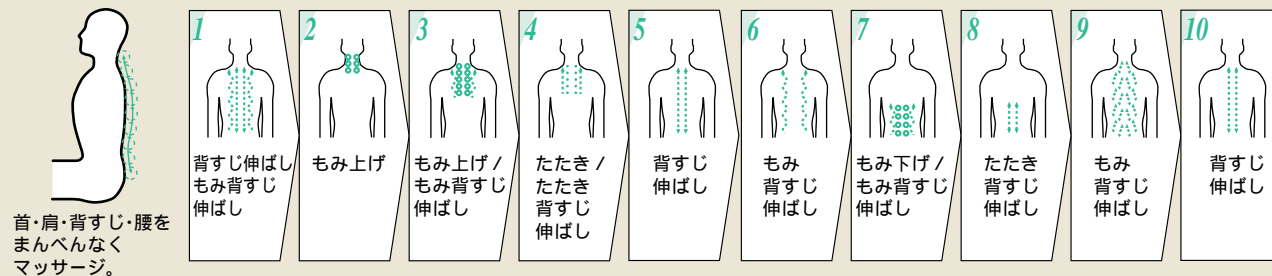

### 首・肩コース

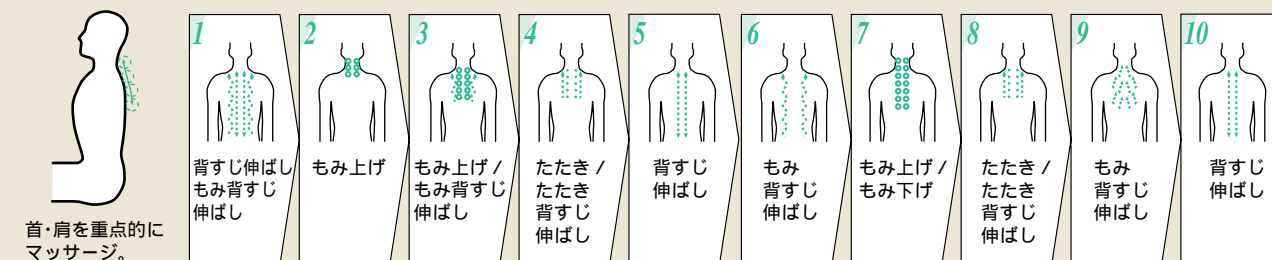


### 腰コース

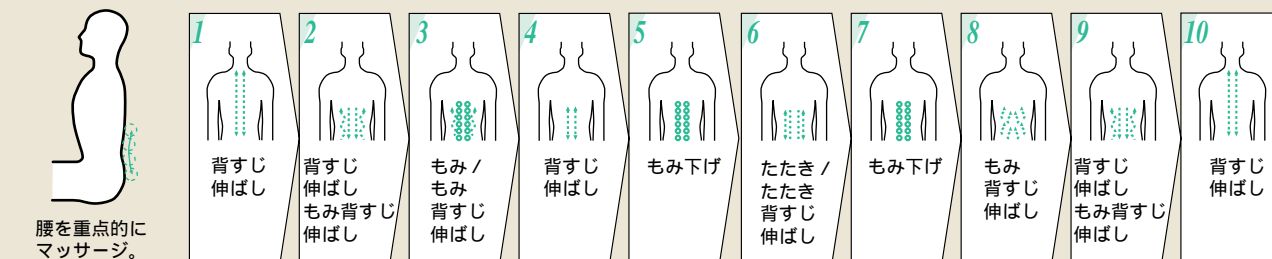

上記の図は、本来の動作を分かりやすく解説するため省略してあります。

## マッサージの出来る範囲

もみ上げ  
もみ下げ  
もみ背すじ伸ばし

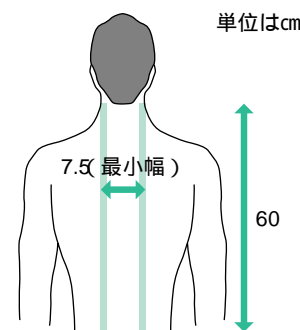


幅切替はできません。

●首～腰▶幅は約7.5 (最小幅)

強さ調節

●もみ上げもみ下げ:弱～強▶約4.5cmもみ玉が身体方向にせり出します。  
●もみ背すじ伸ばし:弱～強▶約1.5cmもみ玉が身体方向にせり出します。

たたき  
背すじ伸ばし  
たたき  
背すじ伸ばし

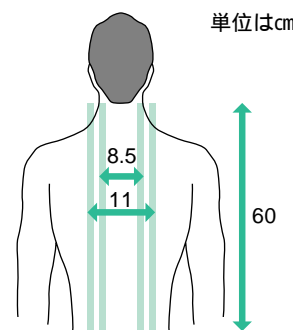

幅切替

●首～腰▶幅は約8.5又は11 の2段階。

強さ調節


●たたき:弱～強▶約4.5cmもみ玉が身体方向にせり出します。  
●背すじ伸ばし:弱～強▶約1.5cmもみ玉が身体方向にせり出します。  
たたき背すじ伸ばし

# 使い終わったら

## 電源を切る。

マッサージ使用時に電源を切らない。

●もみ玉が突出したままになる場合があります。

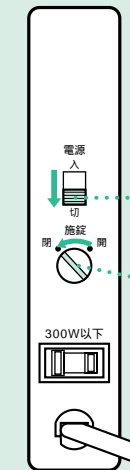

- 1 電源スイッチを「切」にする。
- 2 施錠スイッチを「閉」にする。
- 3 プラグを抜く。

## ⚠ 注意

- 使用後は電源スイッチを必ず「切」にし、施錠スイッチを「閉」にしてください。子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショート・発火のおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

## お手入れのしかた

### 背クッション・枕・本体合成皮革部

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。(化学ぞうきんなどは使用しないでください)
- 万一汚れたときは、中性洗剤を3～5%位にぬるま湯でうすめ、柔らかい布をひたし、よく絞って表面をたたくように拭きとってください。そのあと、水でひたした布をよく絞って洗剤液を拭きとり、柔らかい乾いた布で軽く拭いたあと、自然乾燥させてください。(ドライヤーなどで急激に乾燥しないでください)
- ビニール製品などを長時間接触させていると変色の原因になりますので注意してください。

### 本体布部

- 布地の汚れは、石ケン液でブラシ洗浄した後、水を含ませた布でふきとり自然乾燥させる。

### 肘部・プラスチック・パイプ部・操作器

- 石ケン液を含ませた布をよく絞って拭く。



## ⚠ 警告



- 絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり異常動作してけがをするおそれがあります。

## ⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電ややけどをするおそれがあります。
- 人を乗せたまま移動しないでください。転倒してけがのおそれがあります。


## 移動するとき

- 前面を浮かし、押して移動。(もみ玉を収納状態にして、少しリクライニングすると移動しやすくなります)
- 人をのせたまま移動しない。
- 床をキズつけるおそれがありますので、マット等を敷いてゆっくり移動してください。

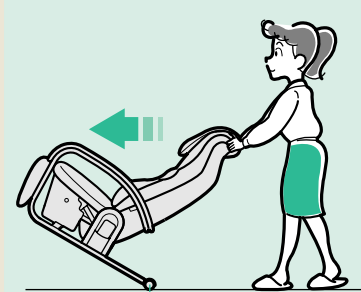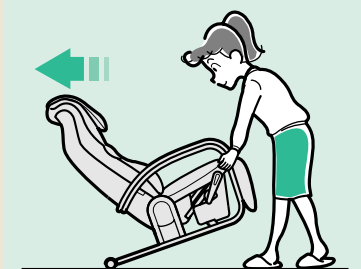

キャスター付

# こんな異常を感じたら

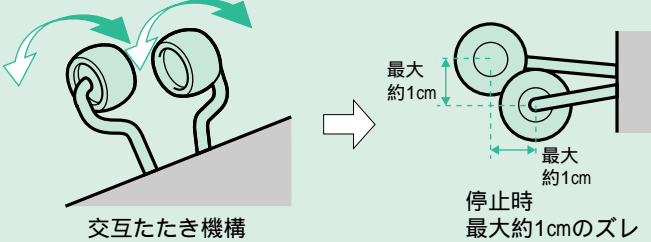症 状	考えられる原因
動作しない。	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ コードが断線している。</li><li>▶ 電源プラグが抜けている。</li><li>▶ 椅子の電源スイッチが「切」になっている。 <small>P8参照</small></li><li>▶ 操作器の入/切ボタンを押していない。 <small>P9、11参照</small></li><li>▶ 入/切ボタンを押しても、本体が受信できていない。 <small>P6参照</small></li><li>▶ タイマーが働き、停止した状態になっている。 <small>P9参照</small></li></ul>
ボタンを押しても動作が切替わらない。	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 操作器からの送信が本体で受信できていない。 <small>P6参照</small></li></ul>
操作器の動作表示部の表示と実際のもみ玉の動きが異なる。	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 操作器からの送信が本体で受信できていない。 <small>P6参照</small></li></ul>
お好み動作マッサージ (自動コースマッサージ)に切替わらない。	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 操作器のふたがしまっている。</li><li>▶ 操作器のふたをあけて、ボタンを押していない。 <small>P9、11参照</small></li></ul>
動作時の音 たたき動作時の動作音 (上部では音が大きくなります) 強弱調節時の音 上下動作時のカタカタ音 もみ動作時のもみ玉と布のすれ る音(キュッキュッ音) 歯車のジージー音 もみ玉(押し)から(引き)に変わ る際の音(カクン音)	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 構造上やむをえず発生するもので、機能等に影響ありません。</li></ul>
もみ玉が途中でとまる。	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ もみ玉が上下するとき、壁や障害物に当たっている。 <small>P7参照</small></li><li>▶ もみ玉に無理な力がかかっている。 ▶ 体を浮かせ気味にしてみる。</li></ul>
もみ玉の位置が肩まで来ない。	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 肩位置合わせスイッチが設定されていない。 <small>P10参照</small></li></ul>
左右のもみ玉の高さが異なる。 (左右の強さが異なる)	<p>交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生するもので故障ではありません。</p> <div><p>交互たたき機構</p><p>最大 約1cm</p><p>最大 約1cm</p><p>停止時 最大約1cmのズレ</p></div>
破損してしまった。	
電源コード、プラグが異常に熱い。	

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止

## お願い

このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

## 警告

- 絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。  
発火したり、異常動作してけがを  
するおそれがあります。

## 別売品のご紹介

### 専用枕カバー

- 枕の汚れ防止のために用意しております。

EP7555-Q(ベージュ) 標準価格1,500円(税別)

# 定格・仕様

使用電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	155W
型式認可番号	▽ 91-56779
医療用具許可番号	25BZ0087
もみ速さ	50Hz...約23回/分 60Hz...約28回/分
もみ幅	肩腰部...約7.5cm
たたき速さ	50Hz...約430回/分(片側) 60Hz...約500回/分(片側)
上下移動速さ	50Hz...約40秒で1往復 60Hz...約33秒で1往復
背すじ伸ばし幅 たたき幅	狭い...約8.5cm 広い...約11cm
もみ玉上下 移動範囲	約60cm
部分 背すじ伸ばし	約12cmの範囲で自動反復
強弱調節	もみ玉突出量約4.5cm(無段階)
肩位置合わせ	7段階
タイマー	約15分
脚振動	50Hz.....約2600回/分 60Hz.....約3000回/分 タイマー...約30分
大 き さ	● リクライニングしていないとき (脚のせ台収納) 高さ100×幅68×奥行87cm ● リクライニングしたとき (脚のせ台は水平) 高さ57×幅68×奥行170cm
リクライニング角度	約127～170度
質 量 (重量)	約45kg
付 属 品	背クッション・枕・操作器 アルカリ単三乾電池(2本)

張地/合成皮革●背・座部  
T(ダークブラウン)ポリウレタン...100%

