

保管用

保証書別添

NAiS 電動ケアベッド

EU8002-T
EU8001-T

取扱説明書





お買い上げありがとうございました。

- ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- この説明書は取り出しやすいところに保管してください。


安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分してます。


いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意	人が重傷を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例










記号は、**禁止**の行為を示しています。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。







記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。
図の中に具体的な禁止内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）が描かれています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 警告	
 必ず守る	ご使用の際には必ず医師に相談の上お使いください。 お使いになる方の症状により、ベッドの背上げ、膝上げによって症状を悪化させるおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●操作するときは必ず周囲に人やペットなどがいないことを確認してください。●取付金具の固定用ねじ（2ヶ所）は、しっかりと締めてください。●必ずベッドの頭側に頭がくるようにして使用してください。●うつ伏せや、横向きに寝た状態で、背上げはしないでください。 守らないと事故やけがの原因となります。●必ず交流100Vで使用してください。●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 守らないと感電や発熱による火災のおそれがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●お子様には使用させないでください。●ベッドの上で遊ぶ、ベッドの上で飛びはねるなど介護用ベッドの用途以外では使用しないでください。●取扱説明書の内容が理解できない方が操作する恐れのある場合は、必ずコントローラーのロックキーを抜き、必要なとき以外は動作させないでください。●ベッドの下にもぐり込んだり、動く部分に頭、足、腕などを入れないでください。●サイドガード等から頭や手、足を通したままベッドを動作させないでください。●ボトム（背用）やボトム（脚用）が水平でない状態ではその上に腰かけないでください。●マットレスなしでは使用しないでください。 守らないと事故やけがの原因となります。


 警告	
 禁止	コントローラーやモーター部には水などをこぼさないでください。 感電やショート、発火のおそれがあります。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったりしないでください。また重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
	電源コードや電源プラグがいたんだり熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電やショート、発火のおそれがあります。
 分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。

 注意	
 必ず守る	電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 守らないと感電やショートして発火の原因となります。
	動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼してください。 守らないと感電や発火の原因となります。
 禁止	湿気や砂、ほこりが多い所では使用しないでください。 守らないと火災・感電の原因になります。
	ベッドの近くで、ストーブなどの熱器具は使用しないでください。 守らないと変質・変形・火災の原因になります。
 電源プラグを抜く	長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

もくじ



安全上のご注意	1
各部のなまえとはたらき	3
コントローラーの使いかた	5
使いかた	7
<ul style="list-style-type: none"> ● ベッドの高さを上げる・下げる ● 背を上げる・下げる ● 膝を上げる・下げる ● 背と膝を同時に上げる・下げる 	
オプションの取り付けと使いかた	9
<ul style="list-style-type: none"> ● キャスター ● ハイトスペーサー ● 畳用脚 ● オーバーテーブル ● マットレス ● リネン類 	
トラブル時の処置について	11
<ul style="list-style-type: none"> ● 停電のとき ● 背上げ状態で故障のとき 	
お手入れ	12
故障かな？と思ったとき	13
定格・仕様	14
保証とアフターサービス	裏表紙

各部のなまえとはたらき

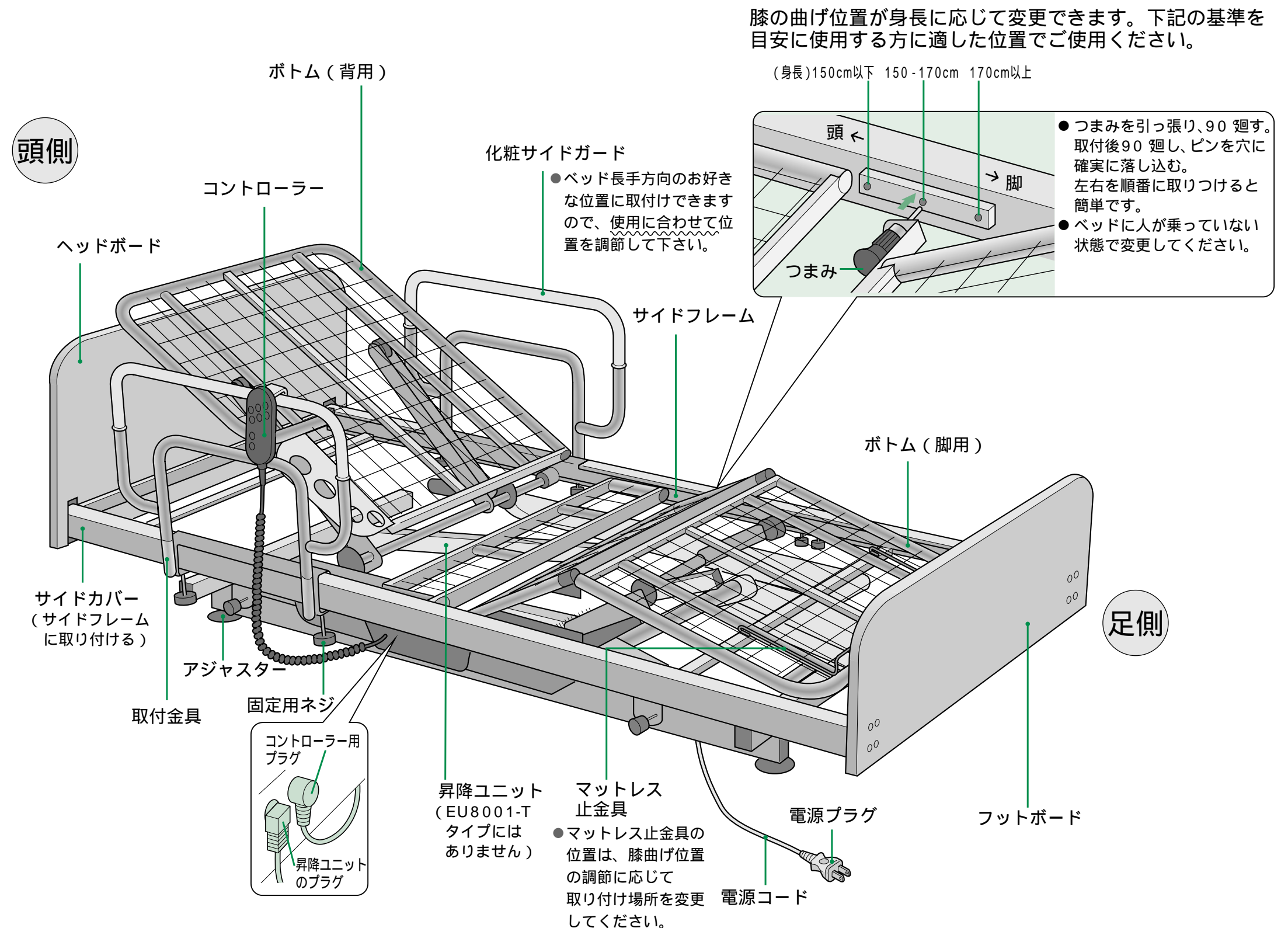


コントローラーの使い方

EU8002-Tタイプ

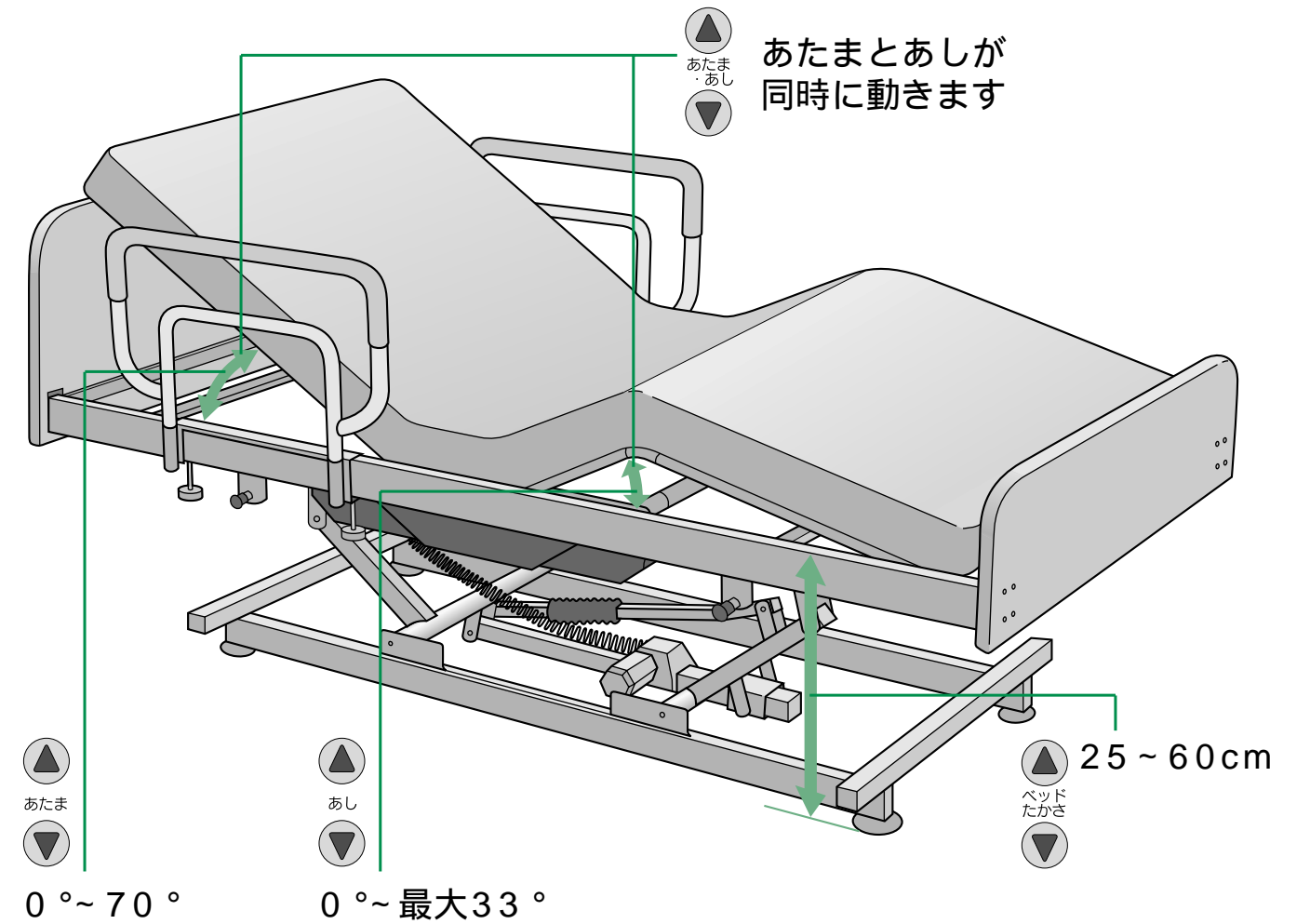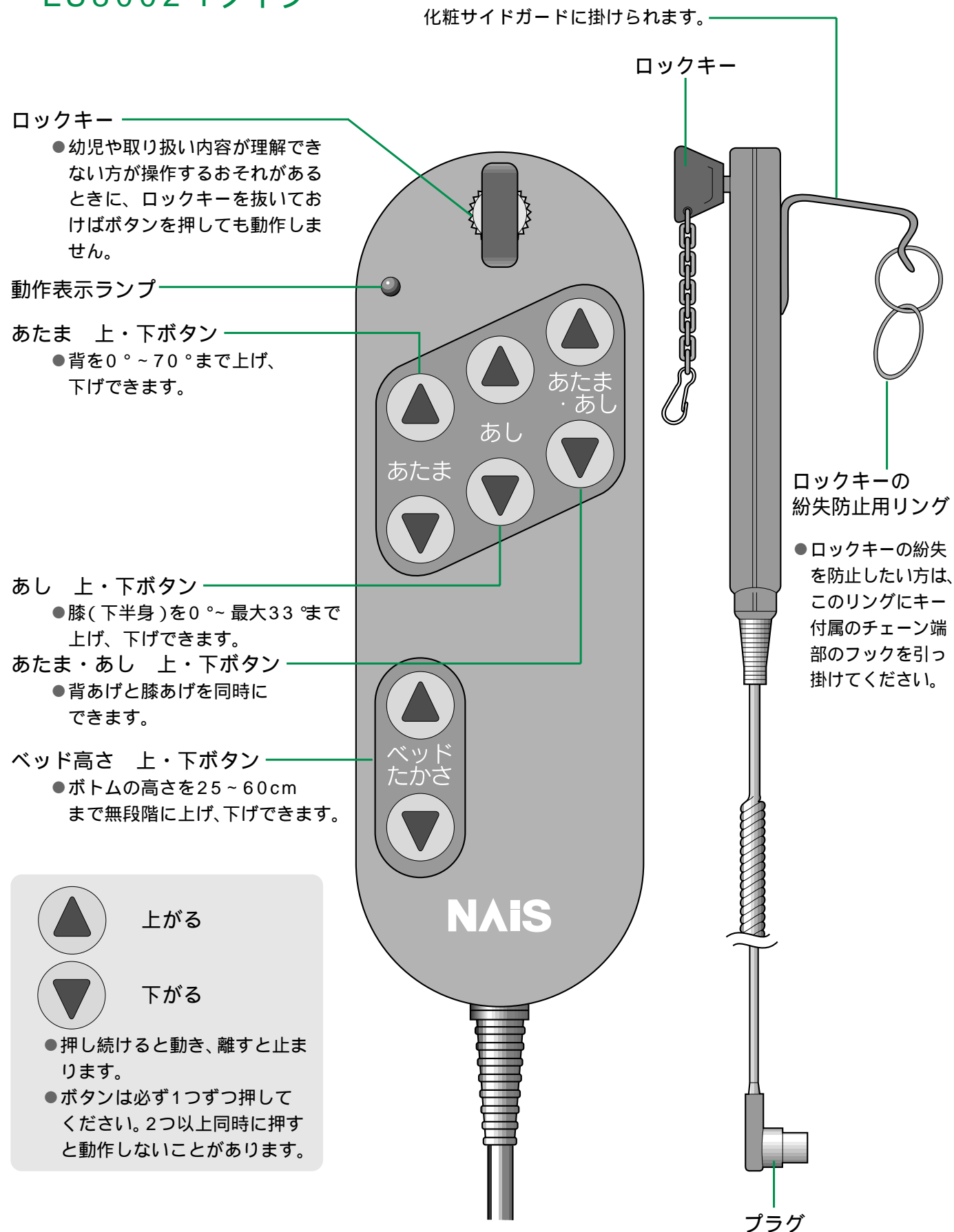


EU8001-Tタイプ

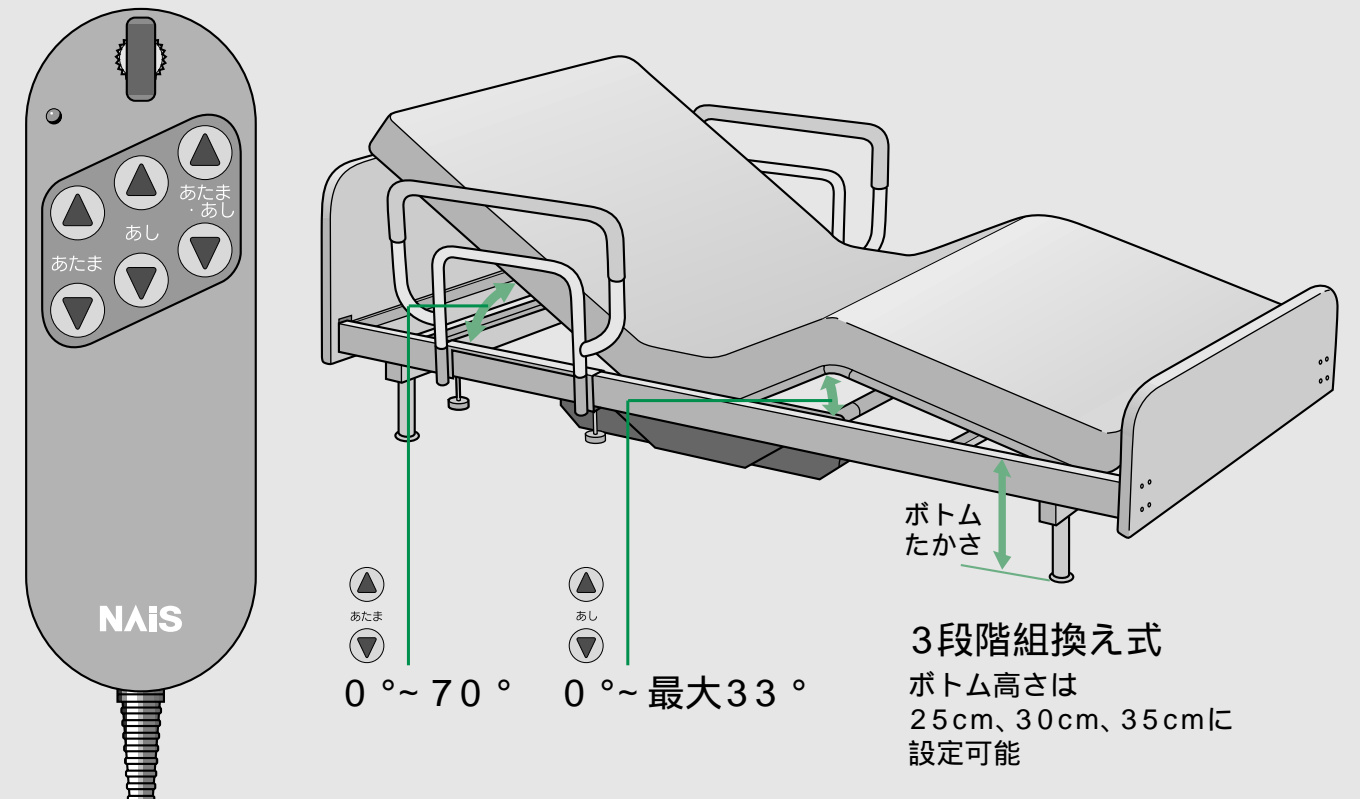

使いかた


操作の前に必ずベッドの下など、周囲の安全を確認してください。

ベッドの高さを上げる・下げる

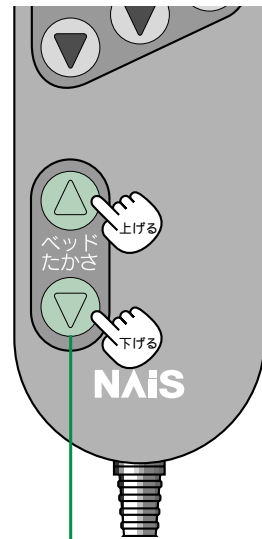


お好みの高さになるまで押し続ける。

- 床からのボトムの高さを25cmから60cmまで無段階に調節できます。(EU8002-T)

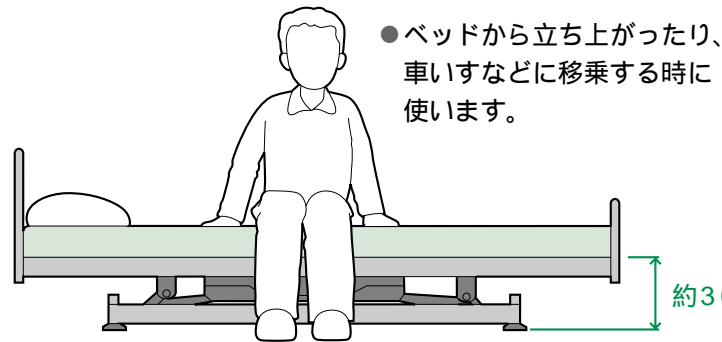


- ベッドから立ち上がった時、車いすなどに移乗する時に使います。

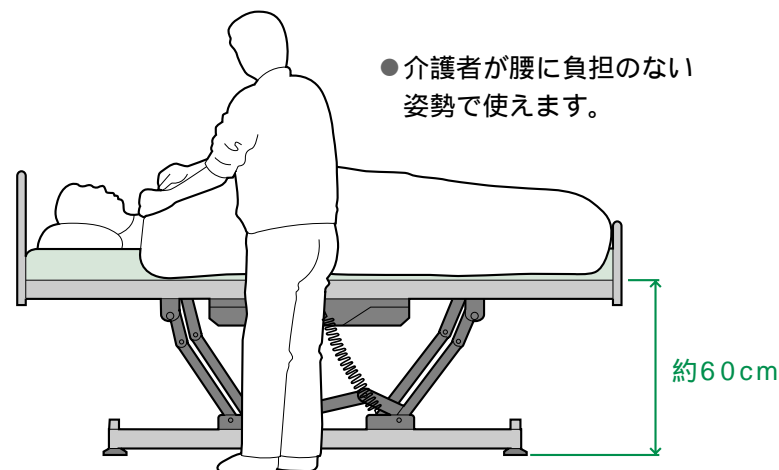

- 介護者が腰に負担のない姿勢で使えます。

EU8001-Tタイプ


調節用脚を使って、お好みの高さ(25、30、35cm)に組換えができます。

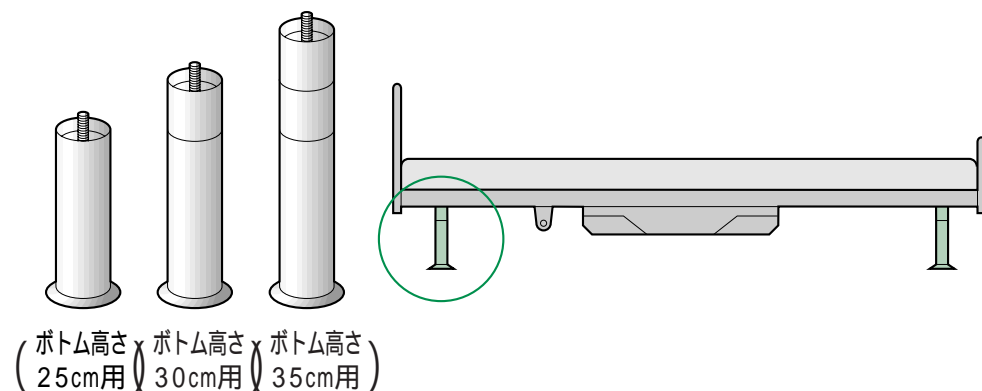

警告

- ベッドを上げ・下げするときは、必ずベッドの下などに人やペットがいないことを確認してください。
- ベッドを上げるときには必ずベッド上のテーブルなどに体はさまれないようにご注意ください。事故やけがのおそれがあります。

背を上げる・下げる

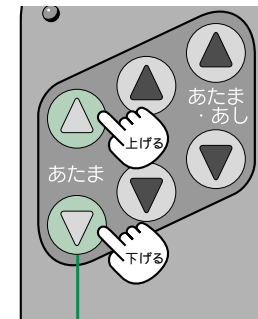

お好みの角度になるまで押し続ける。

- 体のズレや腹部の圧迫が少なく、0°～70°までボトム(背用)を起こせます。
- 食事やテレビなどを見る時に使ったり、起き上がる時に使ってください。




- ポイント**
- まず膝を少し上げてから背を上げてください。お尻の位置が安定し、体が下方にズリ落ちません。
 - 体が正しい位置(ボトム(背用)の曲がる位置に腰がある)にあることを確認してください。

警告


- 頭、足、腕などを化粧サイドガード等から出したまま使用しないでください。
- 身体がうつ伏せや横向き状態で背を上げないでください。
- 背や膝を上げるときには、必ずベッド上のテーブルなどに体はさまれることのないようにご注意ください。以上のことを守らないと事故やけがのおそれがあります。

膝を上げる・下げる

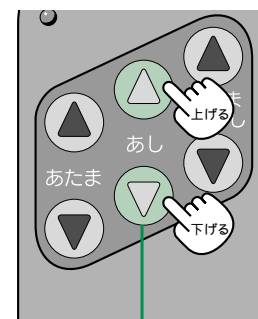


お好みの角度になるまで押し続ける。

- ボトム(脚用)を0°～最大33°まで上げられます。
- 背上げの時の体のズレを防げます。
- 介護時、脚部を上げるのに使ってください。

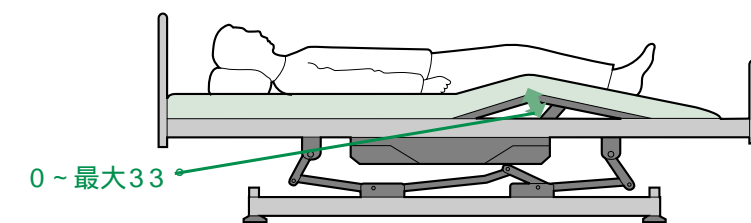


背と膝を同時に上げる・下げる

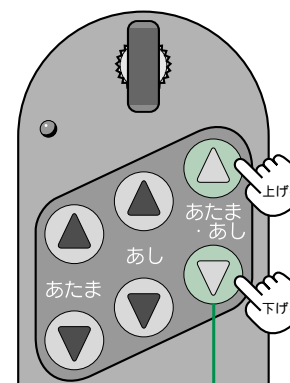

お好みの角度になるまで押し続ける。


- 1つのボタンで背と膝が同時に上げ下げでき、起きあがった姿勢が安定します。

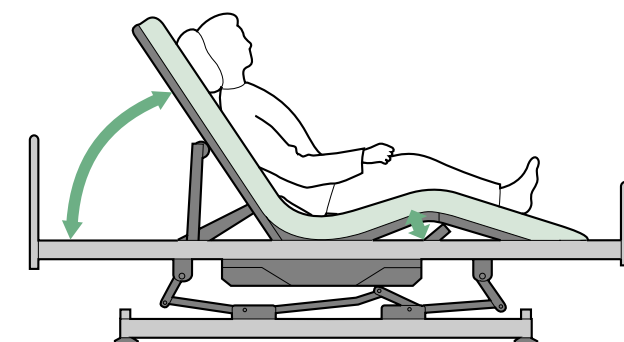

オプションの取り付けと使いかた



取り付け方法はそれぞれの説明書をご覧ください。

オプション取り付け例

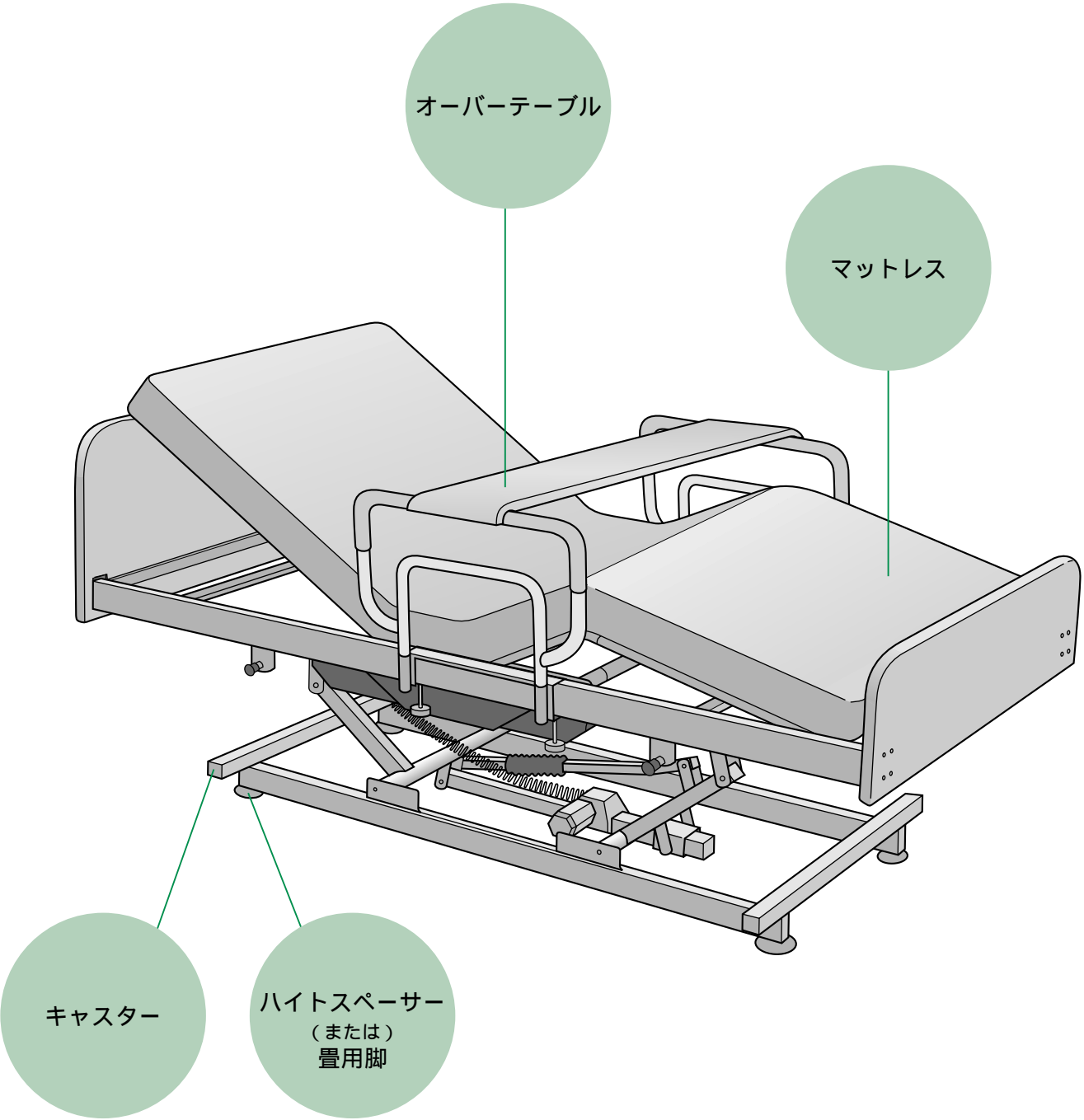

キャスト



取り付けておくとベッドの移動が簡単です。ほこりのたまりやすいベッドの下の掃除もらくらく。(キャスト取り付け時はアジャスターを外して下さい。)

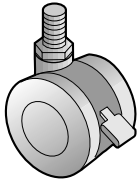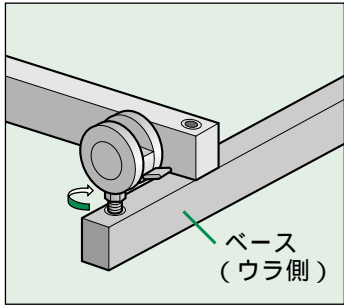

- キャストに取替えてもボトムの高さはほとんど変わりません。



ハイтスペーサー

市販の床走行式介護用リフトを使用するときの脚部のすきま確保のために使用します。

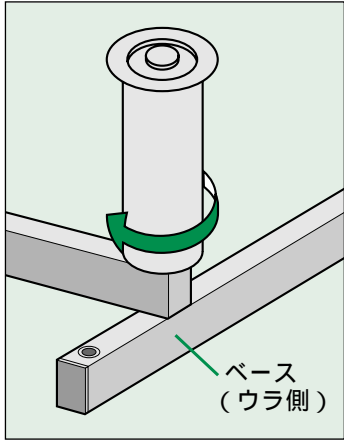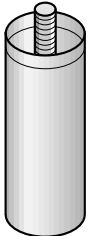


畳用脚

畳の上にベッドを置く時に使用すれば、畳の沈み込みが軽減されます。

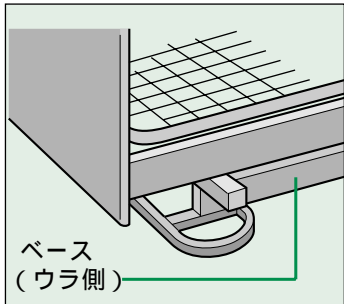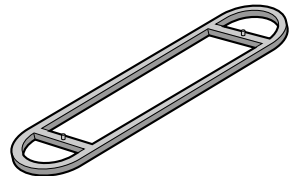

オーバーテーブル


ベッドの上での食事などに使えます。取り付けには、化粧サイドガードが必要です。

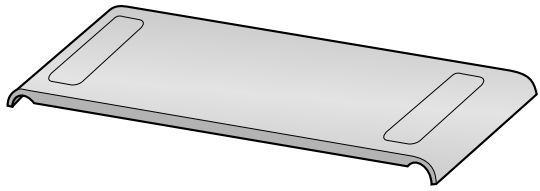

マットレス

- マットレスは必ず当社のものお使いください。
 - マットレスは症状に合わせて選んでください。
 - ベッドサイドに座ったり、ベッドで寝返りをしたりするときにはかためのマットレスが有効です。
 - ベッド上での生活が長く床ずれのしやすい方には、体重を分散させるやわらかめのものが適します。
- 用途に応じ、次の2タイプをご用意しております。詳細は、カタログをご覧ください。

- ファイバークッションマットレス-H
- ラテックスマットレス

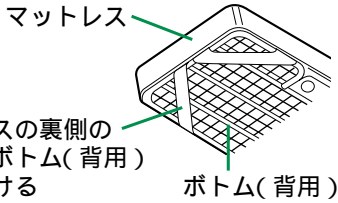

リネン類

リネン3点セット...ベッドパット、ピロケース、ボックスシーツの各1点セット

- ご家庭で洗濯いただけます。

トラブル時の処置について

停電のとき

ベッドを高くした状態および、背上げ、膝上げの状態のまま停電で止まってしまったときは、非常用電池を内蔵していますのでコントローラーを使って下げてください。

- 非常用電池は、停電時の一度程度の動作にしか対応していませんので、ベッド高さや背・膝を下げたあとは電気が通電されるまでベッドを動作させないでください。
(非常用電池：DC9Vアルカリ電池は、一度使用した後または、約2年で交換してください)




背上げ状態で故障のとき

背上げ状態のまま故障してしまったときは、販売店にご連絡ください。やむをえず急を要する場合、背上げ角度が約45度以内であれば下の方法で水平に戻せます。

ボトム（背用）を水平に戻す方法

1. ベッドから人をおろす。
2. コンセントから電源プラグを抜く。
3. ボトムを支えながらモーターをはずす。

図のモーターのフタを矢印方向にスライドさせる。
モーターケースを上から強く押さえて下側にはずす。
ボトム（背用）を支えながら水平に戻してください。

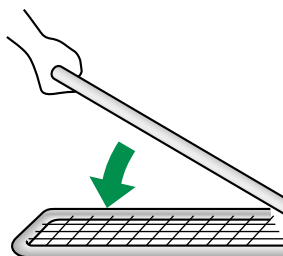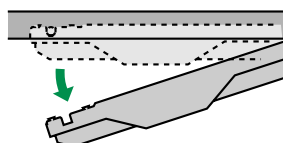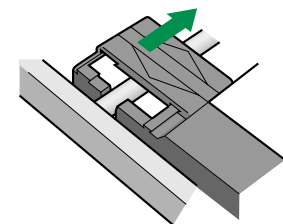

⚠ 注意

- 必ずベッドから人をおろして作業してください。
 - モーターを外すと、ボトム（背用）は自由に動きますので、手で支えてください。
- 以上のことを守らないと事故やけがのおそれがあります。

お手入れ


木 部

化粧サイドガード / サイドカバー


- 水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってからふいた後、乾いた布でふきとります。

マットレス

- 定期的に風通しの良いところに陰干ししてください。

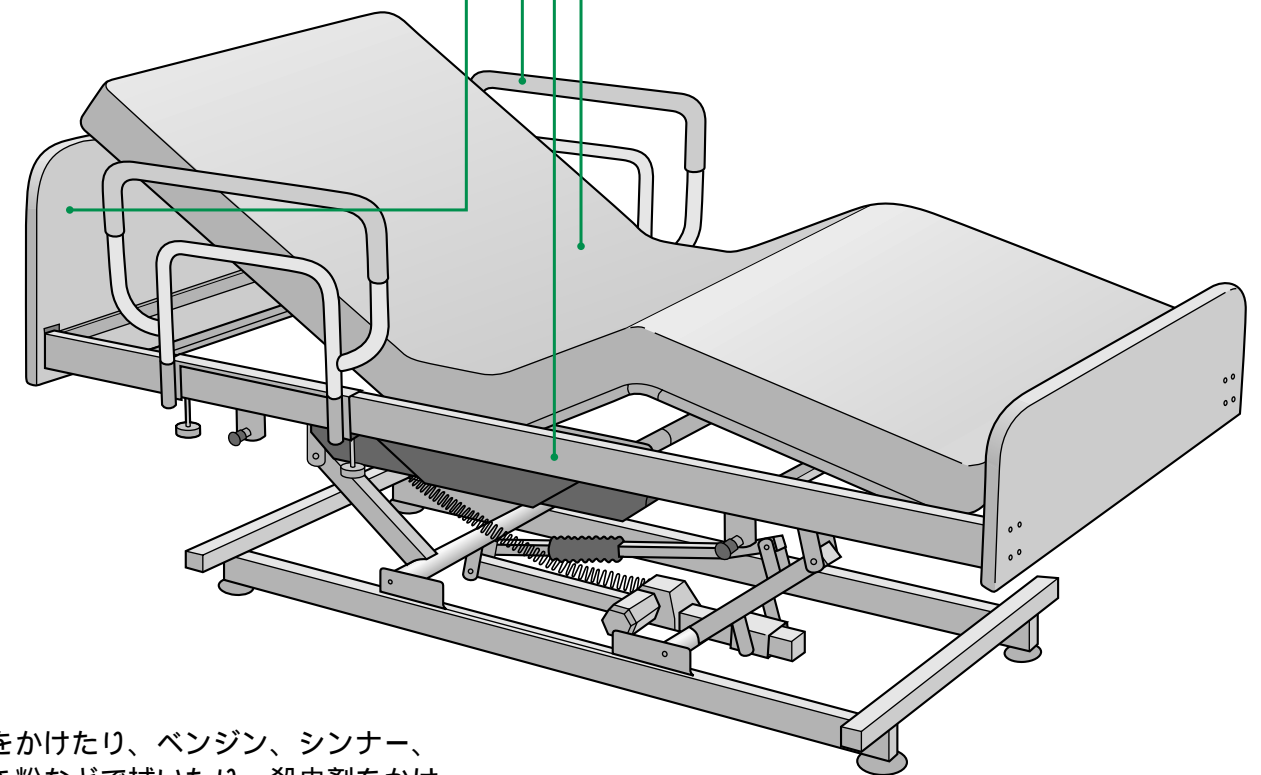

- 水をかけたり、ベンジン、シンナー、磨き粉などで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。

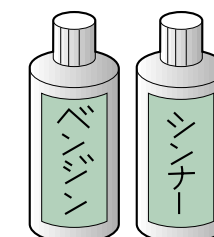

⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 抜かないと感電のおそれがあります。

故障かな？と思ったとき

症 状	チェック内容	処 理
手元スイッチを押しても動かない	動作表示ランプが点灯しない	→ 電源プラグが外れていませんか？ → コンセントに電気がきていますか？ → コントローラーのプラグがモーターの差し込み口から外れていませんか？ → ロックキーが外れていませんか？
	動作表示ランプが点灯しても上下昇降しない	→ 昇降ユニットのプラグがモーターの差し込み口から外れていませんか？
	動作表示ランプが点灯しても膝が下がらない	→ マットレスをご使用ですか？
	動作表示ランプの点灯が薄く、動作のスピードが遅い	→ コンセントが外れていませんか？ → コンセントに電気がきていますか？
	十分な、角度・高さにまで動作しない	→ 動くところにものがはさまっていませんか？
化粧サイドガードがぐらぐらする	→ 取付金具は、確実に取り付けられていますか？	→ 取り付け金具を、サイドフレームに上下ともはめ込み、固定ネジを確実に締めてください

定格・仕様

品番		EU8002-T	EU8001-T
機種		3モータータイプ	2モータータイプ
定格電圧		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		90W	50W
非常用電源		DC9V , アルカリ電池	
寸法		最外形寸法 全幅98cm×全長205cm（本体部91cm幅でマットレス対応）	
質量（重量）		（標準装備）94kg	（標準装備）63kg
動作	背上げ	0°～70°電動無段階調節	
	膝上げ	0°～最大33°電動無段階調節、膝屈曲位置調節可	
ボトム高さ		最小25cm（低床型）	
ボトム構成		通気性の良いメッシュネット式	
膝位置調節機構		標準±5cm調節可能	
上下昇降		ボトム高さ25～60cm電動無段階調節	ボトム高さ25,30,35cmの3段階組換え
操作系		誤使用防止ロックキー付き	
外観		●木質ヘッド/フットボード：ミディアムオーク色 ●木調樹脂製サイドカバー付き	
標準装備品		●化粧サイドガード×2 ●取付金具×2	

保証とアフターサービス

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。

保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。(一般家庭用以外に使用された場合は除きます)

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの **NAIS** 電動ケアベッドの補修用性能部品の製造打切り後5年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の11～13頁に従ってご確認ください、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからご購入の販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

(出張修理対象商品)

ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況(出来るだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、ご購入の販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

地球の環境保護の為、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

松下電工株式会社 ダイナミック・ライフ開発事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

Printed in Taiwan. N03