

ロングユースパッドEW0602Pはナショナル 低周波治療器用パッドです。
この商品は低周波電流を身体に伝えるために装着するものです。
治療を行う前に必ず低周波治療器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告**「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意**「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

**警告**

**必ず守る**

●パッドを貼る、貼りかえる、はすすときは、必ず電源を切る。
守らないと強いショックを受けたり、やけどしたりするおそれがあります。

**禁止**

●治療以外の目的には使用しない。
●お子様や自分で意思表示ができない人に使わせない。
また、自分で操作できない人への使用はさせない。
事故やけがのおそれがあります。

**分解禁止**

●絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。
発火や感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。

**注意**

**必ず守る**

●使用中に身体の異常や肌に発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、
使用を中止し、医師に相談する。
●本体が破損または正常に動作しないときは使用を中止する。
守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

**禁止**

●パッドを患部に貼りつけたまま放置しない。
皮膚の炎症などをおこすおそれがあります。
●お子様の手の届くところに置いたり保管したりしない。
事故のおそれがあります。


定格・仕様

販 売 名	ロングユースパッド EW0602P	類 別	機械器具 78 家庭用電気治療器
一 般 的 名 称	家庭用低周波治療器向け導子（JMDNコード71008000）	医療機器の種類	一般医療機器
寸 法	高さ85×幅53×奥行1.4mm	質 量	約12g（1枚あたり約6g）（2枚入）
製 造 販 売 元	パナソニック株式会社 東京都港区西新橋2-38-5 西新橋MFビル		
製 造 元	タキロン株式会社		
医療機器届出番号	13B1X10134000002		

ロングユースパッドの洗い方

「ロングユースパッド」に汚れがつき粘着力が落ちた場合は（ご使用15～20回程度を目安）水洗いすることにより粘着力が回復します。

水洗いは20回程度可能です。（水洗いの頻度、肌の状態、保管状態などで寿命が短くなる場合があります。）

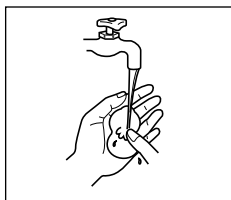

1 粘着面を
少量の水道水の流水で10秒以内に
指先で軽く洗う

- つめやブラシなどでこすらない。
- 水中につけない。



2 十分に水をきり、
粘着面を上にして、
表面の水気がなくなるまで自然乾燥させてから、
パッド収納板にはりつける

- 水洗い後に粘着面をティッシュや布でふかないでください。
粘着面にはりつき取れにくくなることがあります。誤って粘着面に
貼りついたときは、無理にはがさず水でぬらすと簡単にはがれます。

パッド取り扱いのお願い

- 折り曲げないでください。
- 粘着面はなるべく指で触らないようにしてください。
- 粘着力が落ちてきたら、お手入れしてください。
- パッドがぬれた状態で使用しないでください。
十分に水分を切って、粘着面を自然乾燥させてからご使用ください。
- 直射日光の当たらないところ、湿気の少ないところに保管してください。

パッドは販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品
直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense>

携帯電話からもお買い
求めいただけます。



<http://p-mp.jp/cpm>

パナソニック お客様ご相談センター **365日**
受付9時～20時

電話 フリー
ダイヤル



0120-878-365

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Corporation 2012

W903006023 Y0103-2012
2012年1月19日（第1版）