

ワイドパッドEW4312Pはナショナル 低周波治療器用パッドです。
この商品は低周波電流を身体に伝えるために装着するものです。
治療を行う前に必ず低周波治療器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**警告**「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


**注意**「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）


 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。


**警告**

**必ず守る**


●パッドを貼る、貼りかえる、はすすときは、必ず電源を切る。
守らないと強いショックを受けたり、やけどしたりするおそれがあります。


**禁止**

●治療以外の目的には使用しない。
●お子様や自分で意思表示ができない人に使わせない。
また、自分で操作できない人への使用はさせない。
事故やけがのおそれがあります。


**分解禁止**

●絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。
発火や感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。

**注意**

**必ず守る**

●使用中に身体の異常や肌に発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、
使用を中止し、医師に相談する。
●本体が破損または正常に動作しないときは使用を中止する。
守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

**禁止**

●パッドを患部に貼りつけたまま放置しない。
皮膚の炎症などをおこすおそれがあります。
●お子様の手の届くところに置いたり保管したりしない。
事故のおそれがあります。


定格・仕様

販 売 名	ワイドパッド EW4312P	類 別	機械器具 78 家庭用電気治療器
一 般 的 名 称	家庭用低周波治療器向け導子（JMDNコード71008000）	医療機器の種類	一般医療機器
寸 法	高さ82×幅52×奥行1.7mm	質 量	約32g（1枚あたり約8g）（4枚入）
製 造 販 売 元	パナソニック株式会社 東京都港区西新橋2-38-5 西新橋MFビル		
製 造 元	タキロン株式会社		
医療機器届出番号	13B1X10134000004		

パッドの使い方

お手入れしても、刺激が弱くなってきたり、ピリピリ感を感じる場合は、パッドを交換してください。

必ず電源を切り、コース表示部がすべて消灯した状態で行ってください。

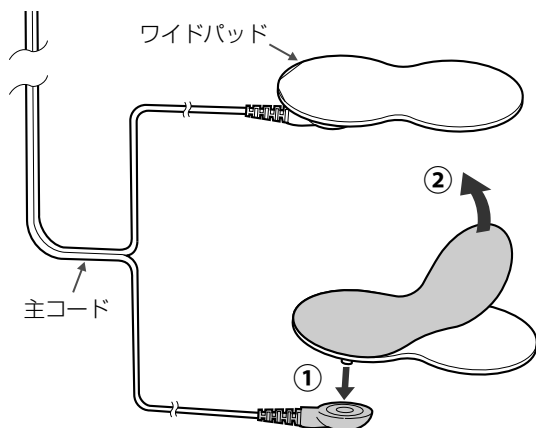

① 主コードとワイドパッドを接続する

② フィルムをはがす

③ こりや痛みを感じているところにワイドパッドをはる

パッド取り扱いのお願い

- 折り曲げないでください。
- 粘着面はなるべく指で触らないようにしてください。
- 直射日光の当たらないところ、湿気の少ないところに保管してください。

パッドは販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense>

携帯電話からもお買い求めいただけます。



<http://p-mp.jp/cpm>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル



0120-878-365

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Corporation 2012

W953043123 Y0103-2012
2012年1月19日 (第1版)
2012年1月20日 (第2版)