

Panasonic®

添付文書 取扱説明書

家庭用

エアーマッサージャー
品番

EW-RA98

医療機器認証番号
229AHBZX00041000



レッグリフレ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。
(詳しくはP.30をご参照)

保証書付き

2017年11月13日(第1版)
W9030RA981 E0118Y0
Printed in China

エアーマッサージャーとは

エアーバッグを使って加圧マッサージする家庭用医療機器です。
アタッチメントを脚に巻いて操作者の電源を入れると、エアーバッグが膨らみ、
脚をもみほぐします。

使用目的又は効果

【あんま、マッサージの代用】

- 疲労の回復 ●血行の促進 ●筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

こんなときに
1日10分の
リフレッシュを



コース

こんなときに

ひざ巻



- | | |
|--------------|------------------------------|
| おまかせ…………… | 足先からひざ周りまでスッキリ
させたいとき |
| しぼり上げ…………… | 脚全体が重だるいとき |
| もみほぐし*…………… | 心地よいマッサージ感で筋肉のこりを
ほぐしたいとき |
| 足先～ふくらはぎメイン… | 足先からふくらはぎまでパンパンのとき |
| ひざ裏メイン…………… | 脚全体の疲労感、脚の重だるさが
とれないとき |

太もも巻



- | | |
|--------------|-----------------------------|
| おまかせ…………… | 足先から太ももまで脚全体を
スッキリさせたいとき |
| じんわりもみ*…………… | お休み前のリラックス時や運動後の
筋肉疲労時に |
| つぶしもみ*…………… | 太ももが重だるいとき |


●コースやマッサージの内容について詳しくは
P.20～21をお読みください。

※もみ感覚の圧迫機能です。

抗 菌

アタッチメントの内側

- 肌と接触する
生地は抗菌加工
です。
(面ファスナー
(内側)は除く)

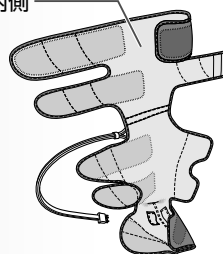

試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構


試験方法: 菌液吸収法(JIS L 1902)

抗菌方法: 無機抗菌成分(銀系)を
生地に浸漬

試験結果: 清菌活性値2.5以上
(抗菌防臭効果は2.0以上)

温 感

足先
ポカポカ

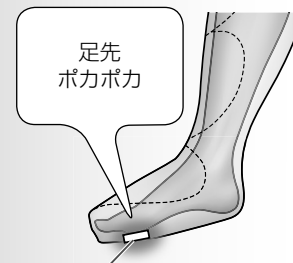

温感(ヒーター)部

- 温感(ヒーター)部は布地の足先部分
のみ温めます。

も く じ

安全上のご注意 4

各部のなまえ 8

ねらいの部位と使いかた 10

準備する 14

- ・ひざに巻く
- ・太ももに巻く
- ・足裏用パッド・すね用パッドを使う

マッサージする 20

- ・コースを変えるとき
- ・足先の温度を調整するとき
- ・強さを変えるとき

使い終わったら 22

- ・収納
- ・保管

お手入れ 23

よくあるご質問 24

修理を依頼される前に 26

廃棄について 27

定格・仕様 28

保証とアフターサービス 29

保証書 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



警告

症状について



●次の人は使用しない

- (1) 医師からマッサージを禁じられている人（例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症〔皮下組織の炎症を含む〕など）
- (2) 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）を骨折している人、ねんざ（捻挫）、肉離れなどの急性とう（疼）痛性疾患の人
- (3) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- (4) 妊娠中や出産直後の人
- (5) 脚部に重度の血行障害のある人（事故、体調不良、症状を悪化させる原因）

●自分で意思表示ができない人、または操作できない人に使わせない（事故やけがの原因）



●医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する

- (1) 悪性しゅよう（腫瘍）のある人
- (2) 心臓に障害のある人
- (3) 温度感覚喪失が認められる人
- (4) 糖尿病など高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人
- (5) 施療部位に創傷のある人
- (6) 体温 38℃以上（有熱期）の人（例：急性炎症症状〔けん急感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期、衰弱しているとき）
- (7) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
- (8) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき

●使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する

●この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分注意を払って使用する

（事故や体調不良をおこす原因）

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

お使いのときは



●アタッチメントの左用、右用を逆に装着して使わない（体調不良の原因）

●足裏用パッド、すね用パッドは指定部位以外に使わない
また、骨に当てない（けがの原因）

●使用中に立ったり歩いたりしない

●片足だけで使わない

●足・ふくらはぎ・ひざ周り・太もものマッサージ以外の目的で使わない

●お子様に使わせない。また操作器やアタッチメントの上で遊ばせたり、のせたりしない（事故やけがの原因）

●製品を布団やコタツの中に入れて使わない（やけどや感電の原因）



●使用時間は 1 日 10 分以内にする（低温やけど*、逆効果やけがの原因）

※比較的低い温度（40℃～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどの原因になります

お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感覚が弱い方は使用直後に肌に赤みが出る場合があります。1 時間経過後でも赤みが消えない場合は、医師にご相談ください

●使う前には、必ず布地が破れていないか確認する
どんな小さな破れでも、直ちに使用を中止し、AC アダプターを抜き、修理を依頼する（けがや感電の原因）

●初めて使用する人や、使い慣れるまでは「強さ：弱」で使用する（けがや体調不良の原因）



安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

電源プラグ・電源コードなどは




- 電源プラグ・電源コードを破損するようなことはしない
傷つけたり、加工したり、熱機器に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたりしない
(感電、ショートによる発火・火災の原因)

→電源プラグ・電源コードの修理は、販売店にご相談ください

- AC アダプターを抜くときは電源コードを引っ張らない
(感電、ショートによる発火・火災の原因)

- ぬれた手で、AC アダプター、
ホースプラグの抜き差しはしない
(感電の原因)

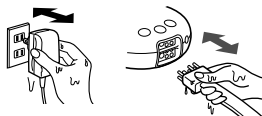

- コンセントや配線器具の定格を守る
- 交流 100 V で使用する (海外での使用や変圧器を用いた使用はできません)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
(感電や発熱による火災の原因)


異常・故障時には



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、AC アダプターを抜く
(発煙・発火、感電の原因)

<異常・故障例>

- ・AC アダプターやホースプラグがこわれている
- ・AC アダプターのコンセントの差し込みがゆるい
- ・ホースプラグの操作器への差し込みがゆるい

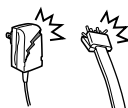

→自分で修理せず、すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください

次の点も注意ください



- アタッチメントにピンや針を突き刺さない、または、
刃物で傷つけない
(アタッチメントにある温感(ヒーター)部を傷つけ、火災や感電、
やけどの原因)

- 改造したり分解しない
(発火したり、異常動作したりして、けがをする原因)

⚠ 注意

症状について



- 本品の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、
使用を中止し医師に相談する (事故や体調不良の原因)

電源について




- お手入れの際は必ず AC アダプターをコンセントから抜く (感電ややけどの原因)
- 使用時以外は AC アダプターをコンセントから抜く
(ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因)

使用前・使用中は




- 浴室など湿気が多い場所で使わない (感電の原因)
- 操作器やアタッチメントに水などをこぼさない、
アタッチメントを水洗いしない
(感電、ショートによる発火・火災の原因)

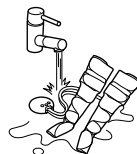


- 使用中に眠らない
- 飲酒後の使用はしない
(事故やけがの原因)

- AC アダプターの電源プラグや器具用プラグのすき間にピンやゴミ、
水分などを付着させない
- マッサージ使用中に、AC アダプターをコンセントから抜いたり、
操作器側から器具用プラグを抜いたりしない
(感電、ショートによる発火・火災の原因)

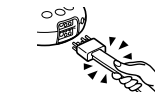

- ホースプラグを抜くときは接続ホースを引っ張らない
- 収納時に電源コードを操作器または AC アダプターに
巻きつけない
- 接続ホースを折ったりアタッチメントに巻きつけない
(電源コードや接続ホースに負荷がかかり断線し、
ショートによる火災・感電の原因)

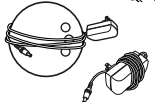


- 他の治療器と同時に使わない (事故や体調をくずす原因)
- 付属の足裏用パッド、すね用パッド以外は使わない (けがの原因)
- AC アダプターは、専用のもの (品番: EW-3A08) 以外を
使ったり、他の機器に使わない
(感電、ショートによる発火・火災の原因)



- 停電時は、ただちに AC アダプターを抜く (思わぬ事故の原因)


各部のなまえ

操作器

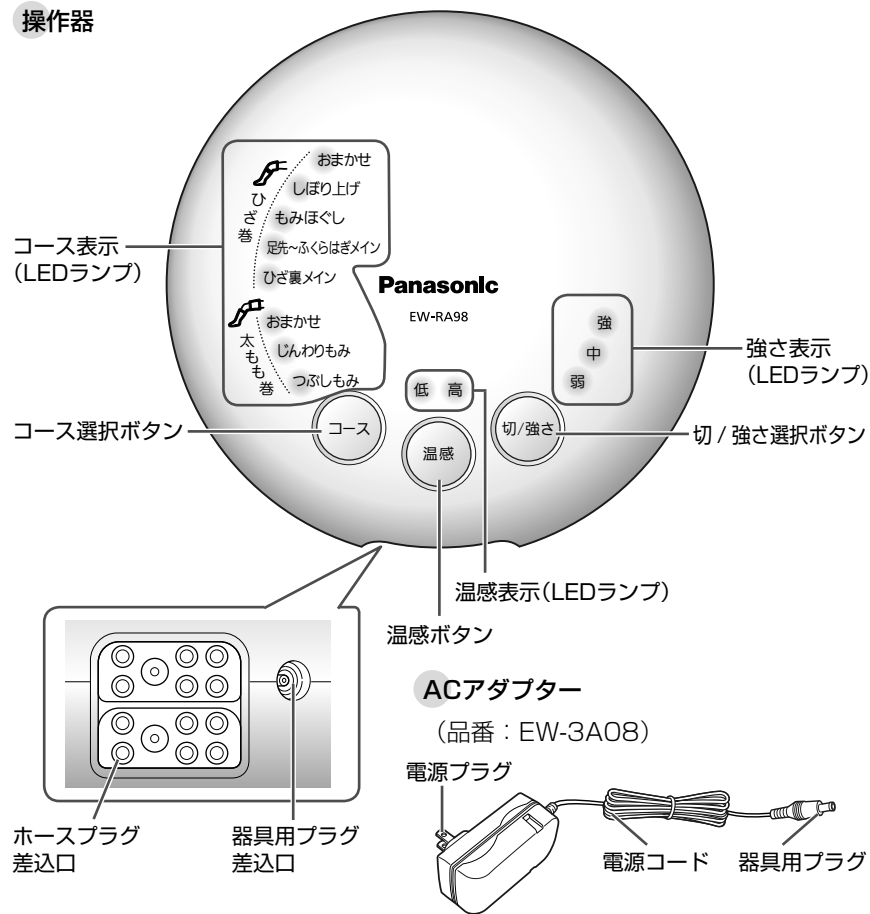


付属品

足裏用パッド
(2個入り)

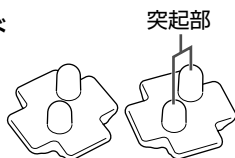


すね用パッド
(2個入り)

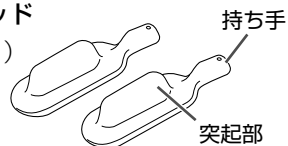


アタッチメント

アタッチメントは左用と右用があります。(左右対称) イラストは左用です。

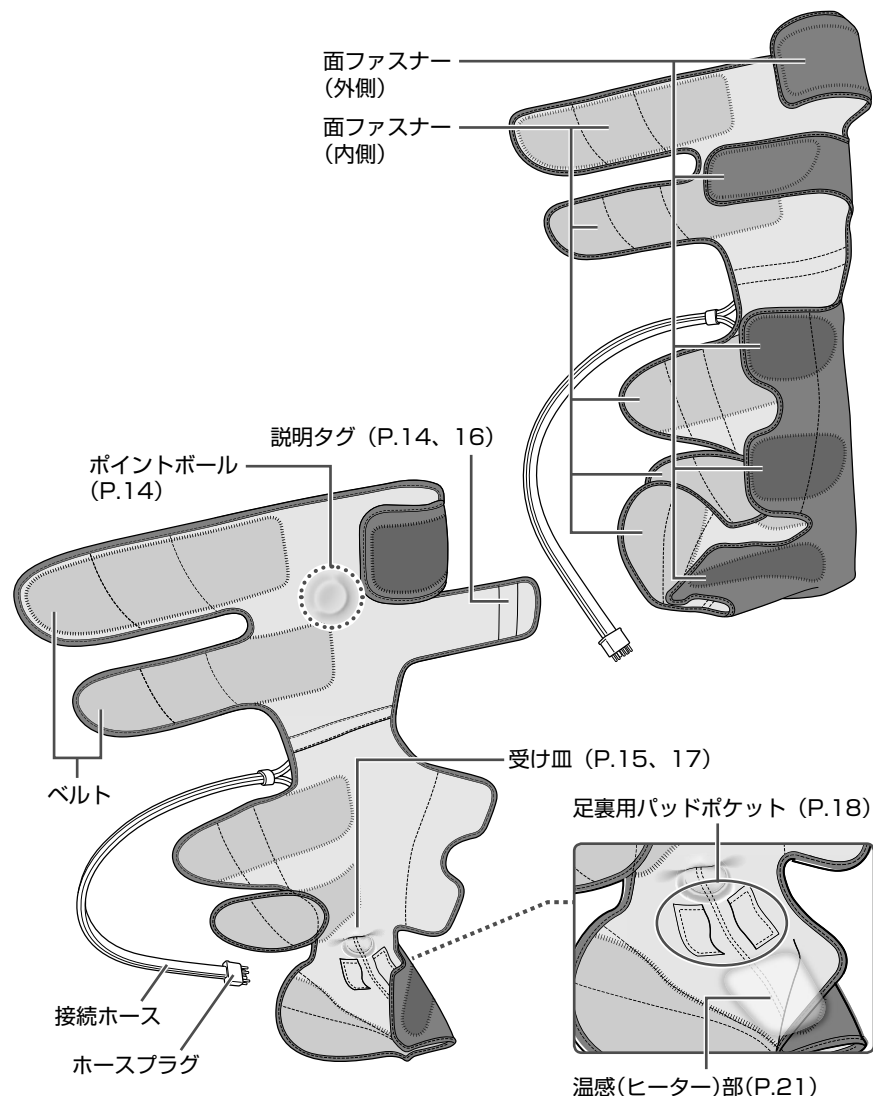

ねらいの部位と使いかた

脚全体を包み込むように配置したエアバッグが、ねらいの部位に心地よいマッサージを実現します。

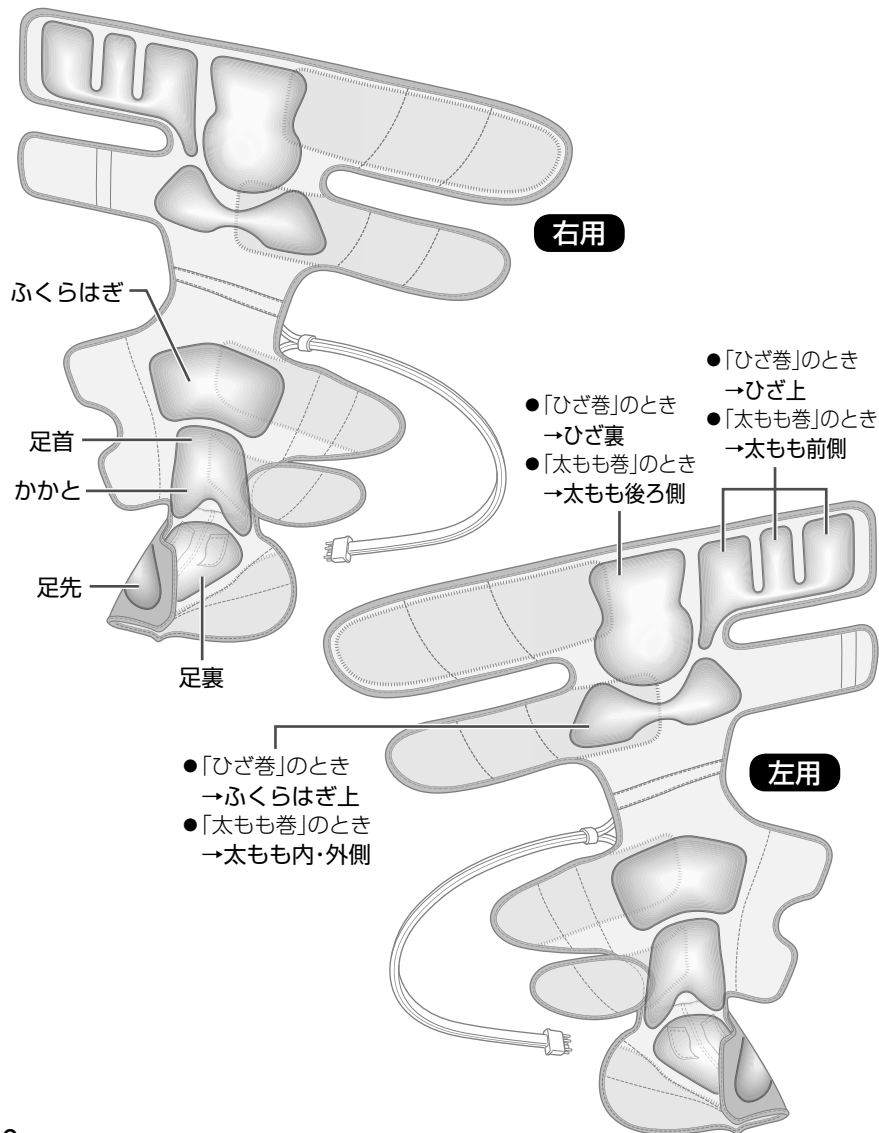

「ひざ巻」と「太もも巻」、2つの巻きかたで足全体 ★12箇所の施療部に心地よいマッサージが楽しめます。



ねらいの部位と使いかた(つづき)


「ひざ巻」と「太もも巻」、2つの巻きかたが楽しめます。

ひざ巻



ひざ上(★7)

グイグイつかむようにもみほぐしマッサージ。

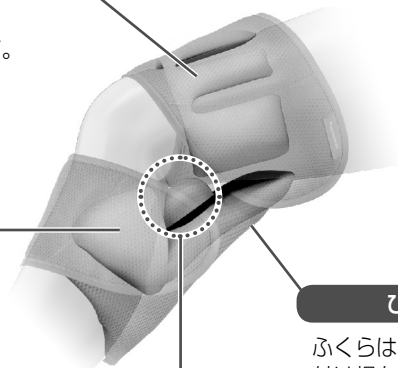

ひざ裏(★9)

ふくらはぎと太ももの筋肉の付け根をほぐすことで脚全体のこりをほぐす。


ふくらはぎ上(★8)

ふくらはぎ上をつかむようにマッサージ。

ポイントボールをひざ裏にあててグ〜ッと


人の手のひらに押されるような心地よさを再現。エアーバッグと合わせてひざ裏をグ〜ッとほぐす。

太もも巻

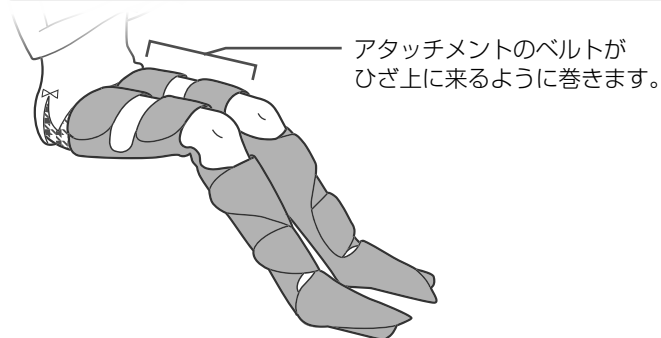

太もも前(★10)

太もも前側の大腿四頭筋を中心にしっかりともみほぐす。

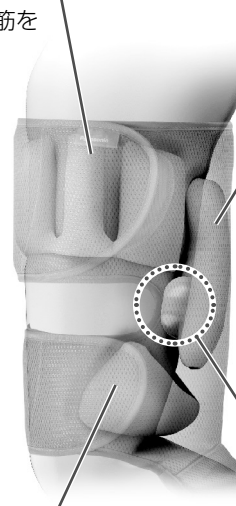

太もも後ろ側(★12)

太もも後ろ側の大きな筋肉ハムストリングをしっかりとマッサージ。

太もも内・外側(★11)

太もも内側・外側をグイーッとつかむようにマッサージ。

ポイントボールが太もも裏にあたりグ〜ッと

太もも裏のハムストリングを手のひらで押すようにしっかりとほぐす。

まず確認

- 布地に破れがないか？
- 電源を入ると正常に動くか？（しばらく使用しなかったときも確認する）
- 異常がある場合は P.26 ～ 27 をご確認ください。



●肌の使用跡がつく場合があります。使用跡が気になる場合は…ソックスやズボンの上から装着してください。
ふくらはぎ・足・ひざ周りに使用跡がつき、すぐにとれない場合がありますので、お出かけ前の使用にはご注意ください。

●装着時に、洋服やストッキングに面ファスナーがつかないようにご注意ください。


●厚手のズボンやレッグウォーマーなどの上から装着すると面ファスナーがはずれる場合があります。

●より強くマッサージしたい場合…
足裏用パッド、すね用パッドをおすすめします。（P.18～19）




●ポイントボールの圧迫を、より強く感じたい場合…
足を伸ばした姿勢でお試してください。（P.21）

1 ACアダプターを接続する

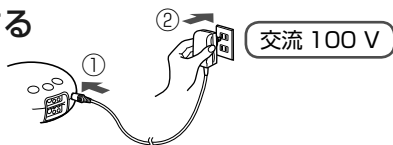

2 アタッチメントを巻きつける前に 右用、左用、ポイントボールの位置を確認する


- 1) 説明タグで右用、左用を確認する
- 2) ポイントボールの位置を手で触って確認する

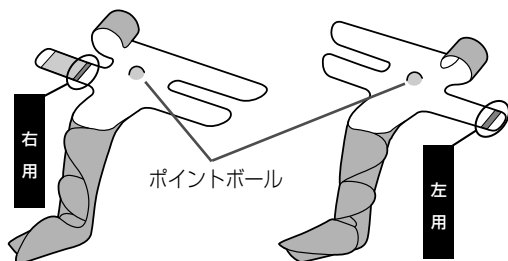

3 かかとを受け皿(布地の中)に合わせ 足先から順に固定する


例) 左用

- 1) 面ファスナーの端を持って
足先→足首→ふくらはぎの順で固定する
- 2) 面ファスナーが浮かないように端部をもう一度押さえつける

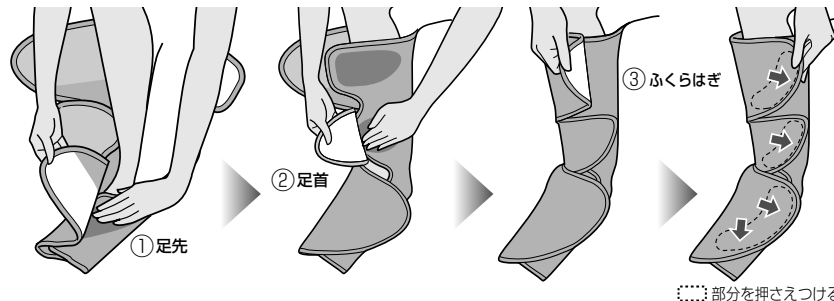

4 ひざに巻きつける


- 1) ポイントボールを
ひざ裏に合わせる
- 2) ひざを挟むようにベルトを巻く
・ひざ下→ひざ上の順で固定する
- 3) 右用も、手順3～4の通りに
巻きつける

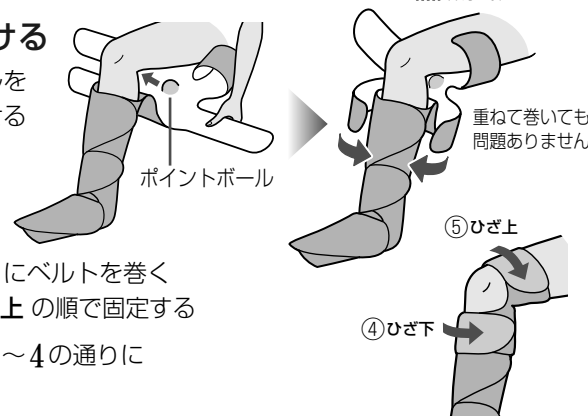

●アタッチメントの巻きかたによって、マッサージ感を調節できます。（P.25）

5 ホースプラグを操作器に差し込む

準備が終わったら…
マッサージする（P.20）

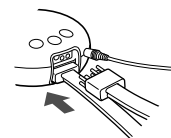

まず確認

- 布地に破れがないか？
 - 電源を入れたら正常に動くか？（しばらく使用しなかったときも確認する）
- 異常がある場合は P.26 ～ 27 をご確認ください。



●肌の使用跡がつく場合があります。使用跡が気になる場合は…
ソックスやズボンの上から装着してください。
ふくらはぎ・足・ひざ周り・太ももに使用跡がつき、すぐにとれない場合がありますので、お出かけ前の使用にはご注意ください。


●装着時に、洋服やストッキングに面ファスナーがつかないようにご注意ください。

●厚手のズボンやレッグウォーマーなどの上から装着すると面ファスナーがはずれる場合があります。


●より強くマッサージしたい場合…
足裏用パッド、すね用パッドをおすすめします。（P.18～19）



1 ACアダプターを接続する

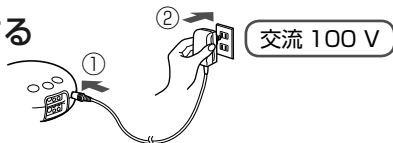


2 アタッチメントを巻きつける前に説明タグで右用、左用を確認する

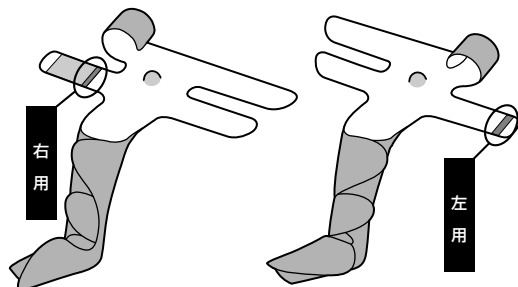

3 かかとを受け皿(布地の中)に合わせ足先から順に固定する

例) 左用


- 1) 面ファスナーの端を持って
足先→足首→ふくらはぎの順で固定する
- 2) 面ファスナーが浮かないように端部をもう一度押さえつける

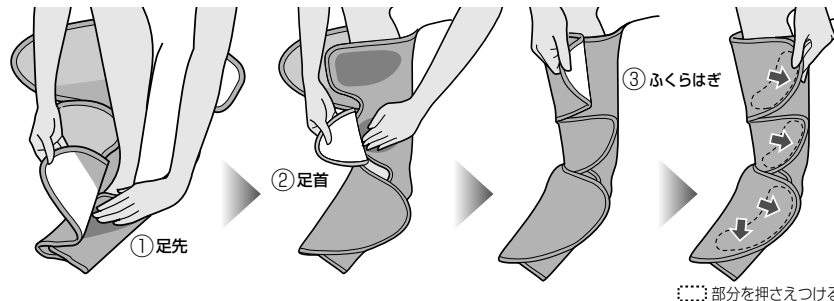

準備する（太ももに巻く）

4 太ももに巻きつける

- 1) ベルトがひざ上に来るように巻く
- 2) 太もも→ひざ上の順で固定する
 - ・椅子などに浅く座ると巻きやすくなります。

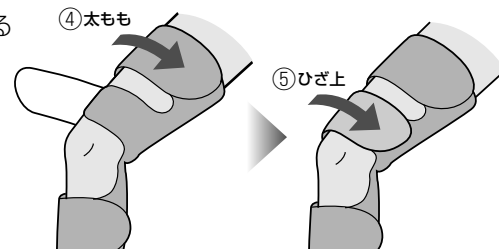


- 3) 右用も、手順3～4の通りに巻きつける

●アタッチメントの巻きかたによって、マッサージ感を調節できます。（P.25）

5 ホースプラグを操作器に差し込む

準備が終わったら…

マッサージする（P.20）

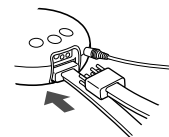

準備する



足裏用パッド・すね用パッドを使う

より強くマッサージしたい場合 運動やヒール歩きで疲れたときに…

足裏用パッド

1 セットする前の準備 (P.14、16 手順1～2)


2 足裏用パッドをポケットに セットする

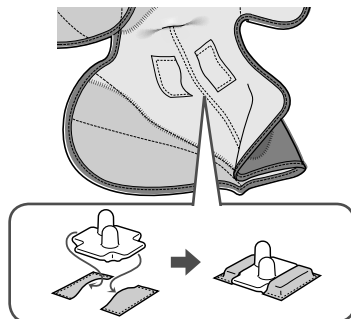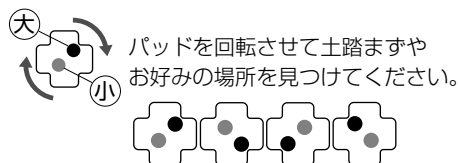

●手が面ファスナーにあたると
痛く感じる場合があります。


土踏まず

足に合わせて、大きい突起の位置を
内側に調整

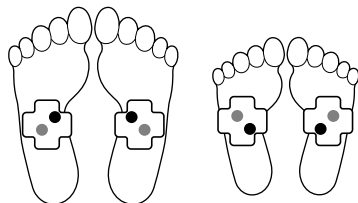

その他(お好みの箇所)

当てて気持ちのよい場所を
見つけて突起の位置を調整

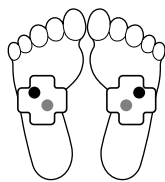


3 アタッチメントを脚に巻きつける (P.15、17 手順3～4)

4 ホースプラグを操作器に差し込む (P.15、17 手順5)




- 足裏用パッドを使用すると、温感を感じにくい場合があります。
- 突起の高さを大小で表しています。

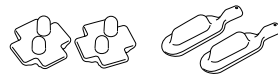

すね用パッド

1 セットする前の準備 (P.14、16 手順1～2)

2 押して気持ちいい場所を 見つける

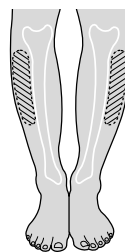

●すねの筋肉の範囲で
パッドを押しあてて
見つける



3 アタッチメントを足先から ふくらはぎまで巻きつける (P.15、17 手順3)

4 手順2で見つけた場所に すね用パッドをまっすぐに 差し込む

- 突起部を肌に向けて差し込む
- 骨にあたらないように注意する
- 左足、右足を同じ手順でセットする

5 アタッチメントのベルトをひざ、 または太ももに巻きつける (P.15、17 手順4)

6 ホースプラグを操作器に 差し込む (P.15、17 手順5)

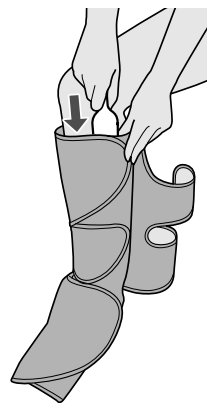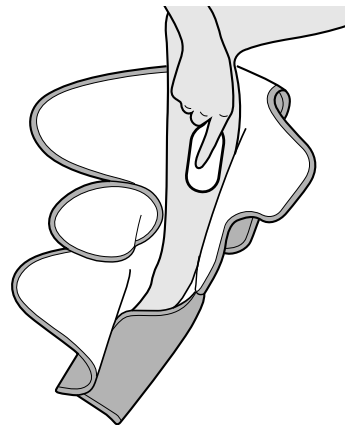

準備する (足裏用パッド・すね用パッドを使う)

マッサージする

・コースを変えるとき

・足先の温度を調整するとき

・強さを変えるとき

マッサージ時間のめやす 1日10分以内

●長時間の使用は、筋肉や神経に必要な以上の刺激となり、逆効果になることがあります。

切/強さ を押すと、自動でスタート

(ひざ巻の「おまかせ」、「温感:低」、「強さ:弱」からスタートします)

- すべてのLEDランプが順番に点灯したあと、ひざ巻の「おまかせ」、「温感:低」、「強さ:弱」のLEDランプが点灯します。
- 温感(ヒーター部)は約5分後に温まります。
(マッサージ動作を行わず、温感(ヒーター部)のみを動作することはできません)
- 約10分で自動的に電源が切れます。
(途中でコースを切り換えても、スタートしてから約10分で切れます)
- 途中でマッサージを終了したい場合は、**切/強さ** を「切」になるまで繰り返し押ししてください。

コースを変えるとき

- ボタンを押すと、コース表示(LEDランプ)が切り換わる

ひざ巻

→ おまかせ → しぼり上げ → もみほぐし → 足先～ふくらはぎメイン → ひざ裏メイン

太もも巻

→ おまかせ → じんわりもみ → つぶしもみ

コースの内容


ひざ巻					太もも巻		
おまかせ	しぼり上げ	もみほぐし*	足先～ふくらはぎメイン	ひざ裏メイン	おまかせ	じんわりもみ*	つぶしもみ*
「しぼり上げ」と「もみほぐし」など多彩な手技を凝縮したマッサージ。	足先からひざ裏までしぼり上げるように加圧。 力強くマッサージ。	脚全体を上下交互にじっくりもみほぐす。	足先～ふくらはぎを中心に「しぼり上げ」と「もみほぐし」の複合マッサージ。	ひざ裏を中心に「しぼり上げ」と「もみほぐし」の複合マッサージ。	「しぼり上げ」と「もみほぐし」など多彩な手技を凝縮したマッサージ。	脚全体を包みこむようにじんわり加圧し、ゆっくり心地よくもみほぐす。	太もも外側、前と後ろの筋肉を中心に強めにこねほぐす。

*もみ感覚の圧迫機能です。



警告

- 初めて使用する人や、使い慣れるまでは「強さ:弱」で使用する(けがや体調不良の原因)

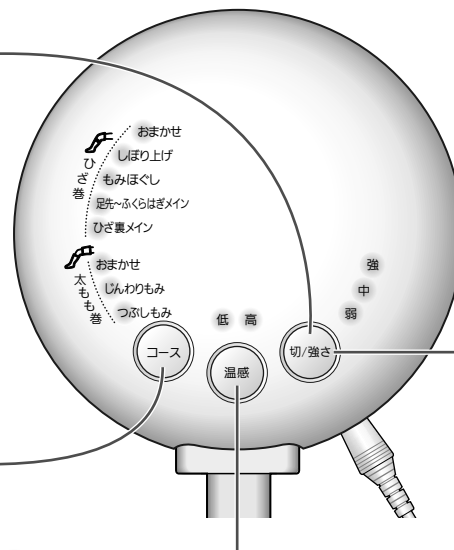

ひざ巻のとき

ポイントボールの圧迫を感じにくい場合は足を伸ばした姿勢でお試しください。



ポイントボール


強さを変えるとき

- ボタンを押すと、強さ表示(LEDランプ)が切り換わる
弱 → 中 → 強 → 切

足先の温度を調整するとき

- ボタンを押すと、温感表示(LEDランプ)が切り換わる

低 → 高 → 切

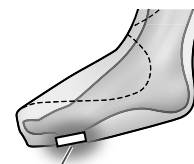

温感(ヒーター)部

- 温感(ヒーター)部は布地の足先部分のみ温めます。

使い終わったら

必ず電源「切」の状態で行ってください。

アタッチメントを足からはずし、
ACアダプター・電源プラグ・ホースプラグを抜く

P.14～15、16～17と逆の手順を行う


収 納

- 1 足先、足首、ふくらはぎ部分の面ファスナーをとめ、足先を内側に折りこむ
- 2 足首、ふくらはぎ部分を折りたたみ、接続ホースを丸めてベルトの面ファスナーで固定する



注意

- ホースプラグを抜くときは接続ホースを引っ張らない
- 収納時に電源コードを操作器またはACアダプターに巻きつけない
- 接続ホースを折ったりアタッチメントに巻きつけない
(電源コードや接続ホースに負荷がかかり断線し、ショートによる火災・感電の原因)

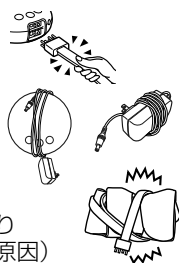

保 管

- 小さな子供の手の届く所に置かない
- 温度・湿度の高い所や直射日光のあたる所に置かない
- 操作器やアタッチメントの表面にものを置いた状態で保管しない
(表面に跡がつく・色が移る・変色する原因)



お手入れ


必ず電源「切」の状態で行ってください。

シンナーやベンジン、アルコールは絶対使用しない
(故障や部品の割れ、変色などの原因)



- 1 水に布をひたし、よくしぼる
(よごれが気になる場合は、台所用中性洗剤をぬるま湯か水で約5%にうすめたものを使用する)

- 2 よごれをふく
●無理な力を加えない

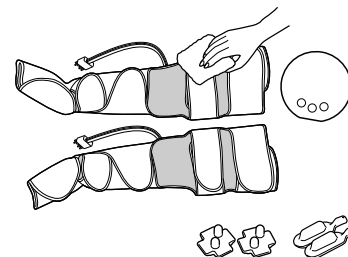

面ファスナーにゴミ、髪の毛などがからまった場合は、つまようじなどで取り除いてください

- ホースプラグ差込口には異物を入れない

愛情点検

長年ご使用のエアーマッサージャーの点検を!



こんな症状はありませんか

- コード・プラグが傷んでいる。
- 動作中に異常な音・振動がある。
- 本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用中止

事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

よくあるご質問

使ってはいけないときはありますか？

- 妊娠中や出産直後の人
 - 脚部に重度の血行障害のある人
- 以上のような場合は使用できません。(P.4)
- また、発熱時や身体に特に異常を感じているときは必ず医師と相談のうえ、使用してください。

1 日何回使ってもいいですか？

- 1 日の使用回数は 1 回です。(約 10 分で自動的に電源が切れます)
- 1 回の使用が 10 分未満の場合、複数回の合計使用時間を 1 日 10 分以内にしてください。
- 長時間のご使用は筋肉や神経に必要以上の刺激となり、逆効果になることがあります。



警告

- 使用時間は、1 日 10 分以内にする
(低温やけど、逆効果やけがの原因)

足・ふくらはぎ・ひざ周り・太もも以外の部位に使えますか？

- 足・ふくらはぎ・ひざ周りおよび太もも用です。
- それ以外の部位に使用すると、事故やけがの原因になります。

使用できる足・ふくらはぎ・太もものサイズは？

- 使用可能な足サイズ：約 20 cm ～ 28 cm
- 使用可能なふくらはぎ周囲：約 27 cm ～ 約 48 cm
- 使用可能な太もも周囲：約 45 cm ～ 約 64 cm

足先が熱すぎるのですが・・・

- 温感を「低」にしてください。それでも熱い場合は厚手のソックスなどを使用してください。

かかとやふくらはぎが温かくないのですが・・・

- 温感(ヒーター)部は布地の足先部分のみ温めます。

マッサージが強すぎるのですが・・・

マッサージが弱すぎるのですが・・・

- アタッチメントの巻きかたによって、マッサージ感を調節できます。
マッサージ感が強い→ゆるめに巻いてください。
マッサージ感が弱い→すき間なく巻いてください。
- 足裏やすねのマッサージ感が弱く感じる場合は、足裏用パッドやすね用パッドをお試しください。(P.18 ～ 19)

肌に生地や面ファスナーがあたって違和感を感じるのですが・・・

- 薄手のハンカチなどをあてて、使用してください。

アタッチメントの空気が抜けないのですが・・・

- アタッチメント(エアーバッグ)に残っている空気が多いと、空気が抜けるのに時間がかかる場合があります。ホースプラグを抜いて、空気が自然に抜けるまでしばらく待ってください。

下記のような音が鳴ります。異常ですか？

- バリバリ音
(アタッチメント(エアーバッグ)に空気が入るとき、面ファスナーが引っ張られる音です)
- カチカチ音
(操作器が空気を調整する音です)
- ウォーン音・ウィーン音
(モーター音です)

構造上発生するものですので異常ではありません。

海外で使えますか？

この商品は AC100 V 日本国内専用のため、海外では使用できません。
また、変圧器や変換プラグを使用すると、故障の原因となります。
使用は避けてください。

1 か月の電気代は？

- 1 日 10 分毎日使用した場合、1 か月で約 4 円(税込み)です。
(新電力料金目安単価 27 円 / kWh (税込み) で計算)

修理を依頼される前に

下記の確認をお願いします。

確認後なお異常がある場合は、まずACアダプターをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。(詳しくは P.29)

症 状	確認していただくこと
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプターが抜けていませんか？ (P.14、16)
途中で止まる	<ul style="list-style-type: none"> ● 切/強さ選択ボタンが「切」になっていませんか？ (P.20～21) ● ホースプラグが抜けていませんか？ (P.15、17)
空気(エア)が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 接続ホースが折れていませんか？
足先に温かさを感じない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れてから、温感(ヒーター)部が約5分で温まります。 ● 温感表示(LEDランプ)が点灯していますか？ 温感ボタンを押すと、温感表示(LEDランプ)が点灯します。(P.21) ● かかとを指定位置に合わせていますか？ (P.15、17) ● 足裏用パッドを使用していませんか？ (P.18) ● 厚手の靴下の上から装着していませんか？
左右の温感の感じ方が違う	<ul style="list-style-type: none"> ● ホースプラグの片方が抜けていませんか？ (P.15、17) ● かかとを指定位置に合わせていますか？ (P.15、17)

症 状	確認していただくこと
マッサージ感が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ● アタッチメントをゆるく巻いていませんか？ (P.15、17) ● 厚手の靴下の上から装着していませんか？ ● ホースプラグが抜けていませんか？ (P.15、17) ● ホースプラグが奥まで差し込まれていますか？ (P.15、17) ● 接続ホースが折れていませんか？
マッサージ感が強い	<ul style="list-style-type: none"> ● アタッチメントをきつく巻きすぎていませんか？ (P.15、17)
強さ表示(LEDランプ)、コース表示(LEDランプ)、温感表示(LEDランプ)が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプターが抜けていませんか？ (P.14、16) ● 切/強さ選択ボタン、コース選択ボタン、温感ボタンを押して確認してください。(P.20～21)
エアが抜けない	<ul style="list-style-type: none"> ● アタッチメントをはずし、ホースプラグを抜いてください。(P.22)

こんなときは…

操作器、ACアダプターが異常に熱い	故障です。 事故防止のため、ただちに使用を中止して必ず販売店にご相談ください。
破損した	
アタッチメントの布地が破れた	

廃棄について

お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

定格・仕様

販 売 名		エアーマッサージャー EW-RA98
使 用 電 源		電源 AC100 V 50-60 Hz
定 格 消 費 電 力		24 W (電熱装置の定格消費電力 5 W)
類 別		機械器具 (77) バイブレーター
一 般 的 名 称		家庭用エアマッサージ器
医 療 機 器 の 種 類		管理医療機器
医 療 機 器 認 証 番 号		229AHBZX00041000
エ ア ー 圧 力		弱: 約 36 kPa 中: 約 44 kPa 強: 約 54 kPa (コースや部位によって若干の違いがあります)
タ イ マ ー		約 10 分
寸 法 (包装数)	操作器 (1 個入り)	約 直径 145 ×高さ 60 mm
	アタッチメント (2 個入り)	約 幅 780 ×奥行 300 ×高さ 810 mm
質 量		約 2 390 g (操作器 + アタッチメント左右)
電 源 コ ー ド の 長 さ		約 1.8 m
アタッチメント対応サイズ		足サイズ 約 20 ～ 28 cm ふくらはぎ周囲 約 27 ～ 48 cm 太もも周囲 約 45 ～ 64 cm
ア タ ャ ャ メ ン ト 内 側 布 地 表 面 温 (室温 20 ℃ の場合)		低: 約 37 ℃ 高: 約 40 ℃
製 造 販 売 元		パナソニック株式会社 東京都港区東新橋 1-5-1 パナソニック東京汐留ビル
製 造 元		ジャンジョウ エスパル インダストリアル株式会社 ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION
製 造 国 名		中華人民共和国

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電 話 () —
お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.26~27)
 でご確認のあと、直らないときは、
 まずACアダプターを抜いて、お買い
 上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	エアーマッサージャー
●品 番	EW-RA98
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このエアーマッサージャーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.30)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/aiyo/>



パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>



理美容・健康商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキューナナ
0120-878-697 受付時間
9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ
0120-878-554



■上記電話番号がご利用いただけない場合

03-6633-6700

■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

1117

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.29をご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2018

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

エアーマッサージャー 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW-RA98		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	<div>見本</div> <div>ご住所 お名前 電話 () 様</div>		
※ 販売店	住所・販売店名 電話 () ー		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。