

添付文書


取扱説明書

家庭用 エアーマッサージャー

品番 **EW-RA150**

医療機器認証番号

304AKBZX00005000

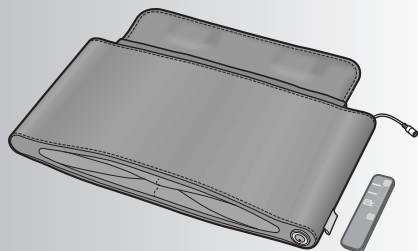

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をしてください。(詳しくはP.27をご参照)

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のお願い	7
各部のなまえとはたらき	8
コースについて	10
準備する	12
・装着する前に…	
・リモコンに乾電池を入れる	
・温感フットカバーの長さを調節する	
・装着のしかた	
マッサージする	16
・コースを変えるとき	
・強さを調節するとき	
温感(ヒーター)を入れる	18
・足先の温度を調節するとき	
停止ボタンについて	20
使い終わったら	21
お手入れ・保管	22
・廃棄について	
よくあるご質問	24
修理を依頼される前に	26
消耗品	27
定格・仕様	28
保証とアフターサービス	29
保証書	裏表紙

保証書付き

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



症状について

- 次の場合は使用しない
 - (1) 医師からマッサージを禁じられている (例：血栓 (塞栓) 症・下肢深部静脈血栓症・肺塞栓症・重度の動脈りゅう (瘤)・急性静脈りゅう (瘤)・静脈炎・各種皮膚炎・および皮膚感染症 [皮下組織の炎症を含む] など)
 - (2) 骨粗しょう (鬆) 症・せきつい (脊椎) の骨折・ねんざ (捻挫)・肉離れなどの急性とう (疼) 痛性疾患
 - (3) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している
 - (4) 脚部に重度の血行障害がある
 - (5) 妊娠中や出産直後(事故・体調不良・症状を悪化させる原因)
- 自分で意思表示ができない人、または操作できない人に使わせない
また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない
(事故・けがの原因)

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

注意 実行しなければならない内容です。

- 医師の治療を受けているときや下記の場合は必ず医師と相談のうえ使用する
 - (1) 悪性しゅよう (腫瘍)
 - (2) 心臓に障害がある
 - (3) 温度感覚喪失が認められている
 - (4) 糖尿病など高度な末しょう (梢) 循環障害による知覚障害がある
 - (5) 抗凝固療法を受けている
 - (6) 脚にけんしょう (腱鞘) 炎がある
 - (7) 施療部位に創傷がある
 - (8) 体温 38℃ 以上 (有熱期) の場合 (例：急性炎症症状 [けん怠感・悪寒・血圧変動など] の強い時期・衰弱しているとき)
 - (9) 安静を必要とする場合や著しく体調のすぐれないとき
 - (10) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき
- 使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する
- この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分注意を払って使用する
(事故・体調不良の原因)

トラブルを防ぐために

- 子供に使わせない
また、本体の上で遊ばせたり、上にのせない
(事故・けがの原因)
- この機器で遊ぶことがないように、子供を監視する
(事故・けがの原因)



使用時間は

- マッサージは 1 日 20 分以内、温感 は 1 日 60 分以内にする
(逆効果やけが、低温やけどの原因)
- ※ 比較的低い温度 (40℃～60℃) でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどの原因になります
- お年寄り、皮膚の弱い人、皮膚感覚が弱い人は使用直後に肌に赤みが出る場合があります。1 時間ほど経過しても赤みが消えない場合は、医師にご相談ください

安全上のご注意 (つづき)



警告

お使いのときは

- 使用中に立ったり歩いたりしない
(事故・けがの原因)
- 使う前には、必ず布地が破れていないか確認する
どんな小さな破れでも、直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、
修理を依頼する
(けが・感電の原因)
- 足のアクセサリーなどの装身具ははずして使用する
(事故・けがの原因)

マッサージは

- 足首・ふくらはぎのマッサージ及び足のストレッチ以外の目的で使わない
- 首に使わない
- 医療機器を体内に埋込み、または装着している部位とその周辺には
使用しない
(事故・けがの原因)
- 片足だけで使わない
- 本体を前後・上下を逆にして装着しない
(体調不良の原因)
- 初めて使用するときは、使い慣れるまでは「強さ：レベル1」で使用する
(けが・体調不良の原因)

温感は

- 足先以外に使用しない
(やけどの原因)
- 電気毛布などの暖房器具と一緒に使ったり、コタツの中に入れて使わない
(やけどの原因)

異常・故障時には

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜く
(発煙・発火・感電の原因)
- ＜異常・故障例＞
- ・ACアダプターがこわれている
 - ・ACアダプターのコンセントの差し込みがゆるい
- 自分で修理せず、すぐに販売店へ点検・修理を
依頼してください



次の点もご注意ください

- 本体やリモコンは、改造したり分解しない
(発火したり、異常動作して、けがをする原因)
- 乳幼児の手の届くところに保管しない
(乾電池など小さい部品を飲み込むことによる、窒息・事故・けがの原因)

電源について

- ぬれた手で、ACアダプター・器具用プラグの抜き差しはしない
(感電の原因)



- 電源プラグ・コードを破損するようなことはしない
傷つける、加工する、熱機器に近づける、無理に曲げる、
ねじる、引っ張る、重いものをのせる
(感電、ショートによる発火・火災の原因)
- 電源プラグ・コードの修理は、販売店にご相談ください
- ACアダプターを抜くときはコードを引っ張らない
(感電、ショートによる発火・火災の原因)
- コンセントや配線器具の定格を守る
- 交流 100 V で使用する (海外での使用や変圧器を用いた使用はできません)
- 電源プラグ・器具用プラグは根元まで確実に差し込む
(感電や発熱による火災の原因)

安全上のご注意 (つづき)


⚠ 注意

症状について


- 本品の使用によって発疹・発赤・かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談する
(事故・体調不良の原因)

使用前・使用中は

- 同梱品以外のものを使ったり、他の機器に使わない
(事故、けが、感電、ショートによる発火・火災の原因)

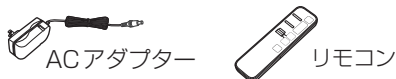

- 浴室など湿気が多い場所で使わない
(感電の原因)
- 本体やリモコンに水などをこぼさない、水洗いしない
(感電、ショートによる発火・火災の原因)
- 使用中に眠らない。また、飲酒後は使用しない
(事故・けがの原因)
- 他の治療器と同時に使わない
(事故・体調不良の原因)

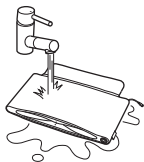


リモコンの乾電池について

- 指定以外の乾電池を使わない
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わない
- メーカーや銘柄の異なる乾電池を混ぜて使わない
(事故・けがの原因)

- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく
(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるやけど・けが・周囲汚染の原因)

電源について

- 収納時にコードを本体・ACアダプターに巻きつけない
また、ねじれたままで収納しない
(コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災・感電の原因)

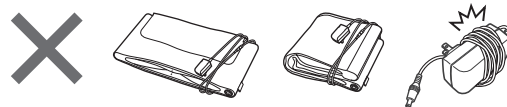

- ACアダプターの電源プラグや器具用プラグのすき間にピンやごみ、水分などを付着させない
- マッサージ使用中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、器具用プラグを本体から抜かない
(感電、ショートによる発火・火災の原因)

- お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜く
(感電・やけどの原因)
- 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜く
(ほこりや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因)
- 停電時は、直ちにACアダプターを抜く
(思わぬ事故の原因)


使用上のお願い

リモコンの乾電池について


- 乾電池を火の中に投入したり、ショート・分解しないでください。
(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚染の原因)
- 乾電池に表示してある注意内容を必ずお守りください。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出してください。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用してください。
(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚染の原因)
- 乾電池の液漏れが生じ、液が目に入ったら放置せずにすぐに多量の水で洗い流し、医師の指導を受けてください。
(事故・けがの原因)

各部のなまえとはたらき

本体

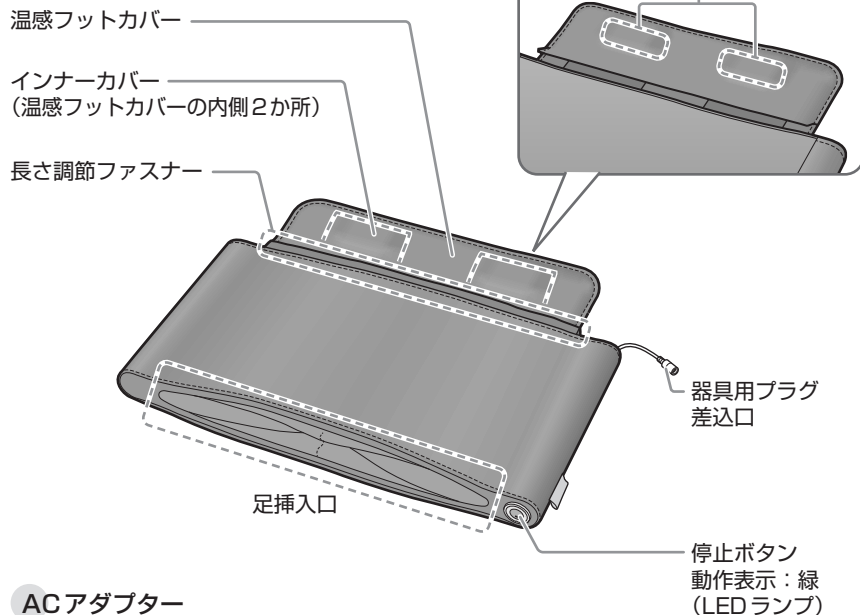


ACアダプター (品番：EW-3A08)

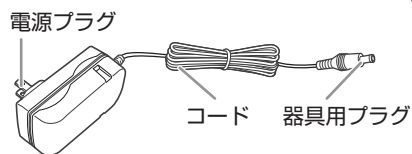


抗 菌

本体の内側
●肌と接触する生地は
抗菌加工です。
(温感フットカバー・
インナーカバーは除く)

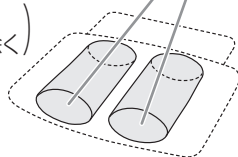


試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構
試験方法：菌液吸収法 (JIS L 1902)
抗菌方法：無機抗菌成分(銀系)を
生地に浸漬
試験結果：抗菌活性値2.5以上
(抗菌効果は2.0以上)

リモコン

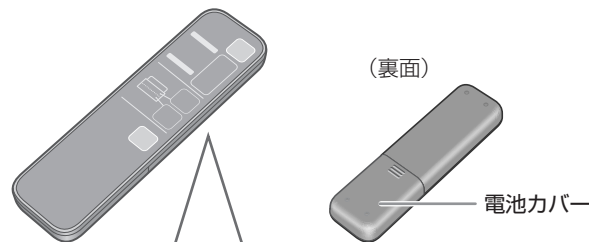

操作部

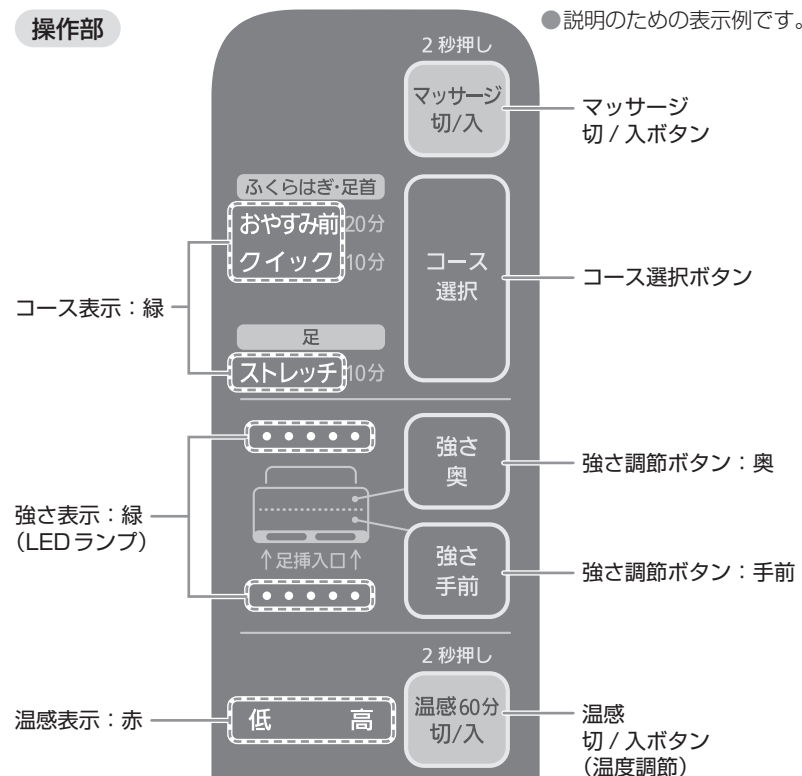

●乾電池の消耗を抑えるため、操作してから約30秒でコースおよび温感の表示が点滅、強さ表示が消灯します。(リモコンの電池セーブ機能)
・セーブ中にボタンを押すと、セーブ機能が終了(表示が復帰)して、ボタン操作ができます。復帰時は本体から音は鳴りません。

乾電池は同梱していません。販売店でお買い求めください。

コースについて



エアーマッサージャーとは



エアーバッグを使って加圧マッサージする家庭用医療機器です。電源を入れると布地の中に入っているエアーバッグが膨らみ、圧迫動作で脚をもみほぐします。

おやすみ前の
リフレッシュに！

使用目的又は効果

【あんま、マッサージの代用】

- 疲労の回復 ●血行の促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる


コース	こんなときに	コース内容
ふくらはぎ・足首 	おやすみ前 タイマー： 約20分 クイック タイマー： 約10分	最初はふくらはぎと足首全体を包み込むようにもみほぐしたり、片足ずつ上下に緩やかなウェーブ感を出しながら、徐々にマッサージが弱くなっていく ふくらはぎと足首全体を包み込むようにしっかりと全体に圧をかけてから、上下リズムカルにもみほぐしたり、片足ずつしぼり上げるマッサージ
足 	ストレッチ タイマー： 約10分	短時間で、ふくらはぎや足首をスッキリさせたいときに ヒール疲れや立ち仕事などで疲れた足裏や足の甲をストレッチしたいときに 足先～足裏全体～かかとを交互に伸ばしたりすることで全体的にストレッチ

上手にマッサージするコツ



- マッサージのために、本体の奥側と手前側にエアーバッグが内蔵されています。それぞれ強さレベルを調節してマッサージの強さを変えることができます。
- ふくらはぎや足の位置をずらすと、エアーバッグの圧迫位置が変わり、マッサージ感を変えることができます。
- 冬季など、マッサージ前に温感（ヒーター）を入れておくと、温感フットカバーの布地を温めておくことができます。（P.18）

＜布地中のエアーバッグ＞

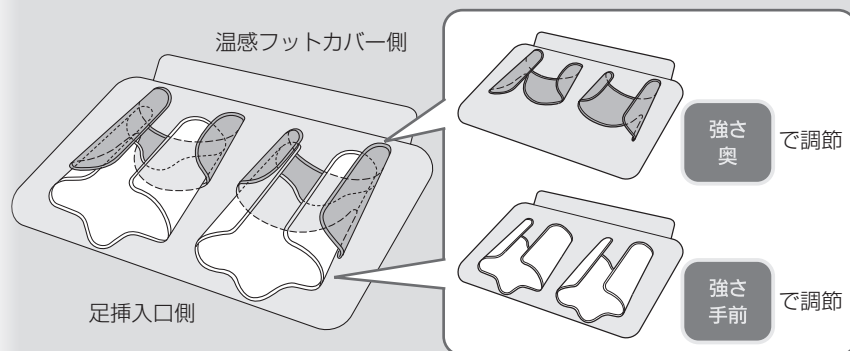

準備する

装着する前に…

温感フットカバーの長さを調節する

まず確認


- 布地に破れがないか？
- 電源を入れたら正常に動くか？（しばらく使用しなかったときも確認する）
→ 異常がある場合は P.26～27 をご確認ください。

リモコンに乾電池を入れる


単4形アルカリ乾電池2本をお使いください。
（パナソニック製をおすすめします）

1 電池カバーを取りはずす

- 三つ折り部を軽く押しながらスライドさせる

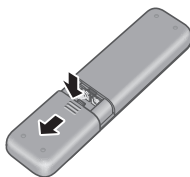

2 ⊕ ⊖を確認し、乾電池を入れる

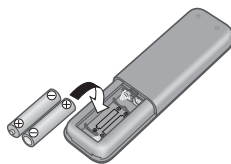

3 電池カバーを取り付ける

- 1と逆の手順で取り付ける

乾電池は

- 寿命は約1年です。
（パナソニック単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃で毎日マッサージ20分、冬季3か月間のみ温感60分を併用した場合）
 - 室温が低いときや、アルカリ乾電池以外の乾電池をご使用の場合は、寿命が短くなることがあります。
- 乾電池が消耗すると、リモコンの表示が点灯せず、操作できなくなります。また、使用中に乾電池が切れると、本体が「ピー」と鳴って停止します。2本とも新しい乾電池に交換してください。

お知らせ

- リモコンについて、下記の行為は電波法で禁止されています。
 - 分解・改造する
 - 背面のマークが書かれているラベルをはがす

インナーカバーが付いているか（2か所）確認してください。
インナーカバーの取り付けかた（P.22）

1 足に合う長さを選ぶ

足先部分が短い状態で使う

目安：身長165 cmより低い

長さ調節ファスナーをとめる




（お買い上げ時、箱から出したときの状態です）



足先部分が長い状態で使う

目安：身長165 cm以上

長さ調節ファスナーをはずす

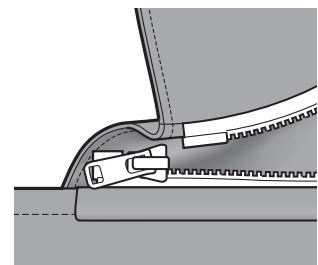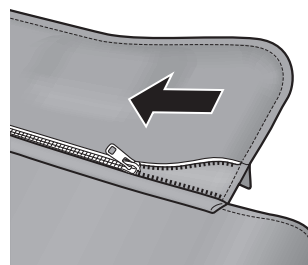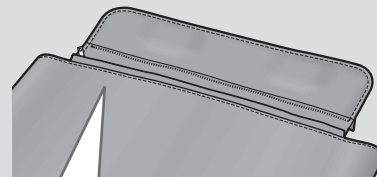

準備する


（装着する前に…／リモコンに乾電池を入れる／温感フットカバーの長さを調節する）

仰向けに横たわって足を伸ばしたり、座って足を伸ばした姿勢で使用してください。


・使用中に、眠らない(事故・けがの原因)

1 ACアダプターを接続する

- ① 器具用プラグを器具用プラグ差込口にしっかり差し込む
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む

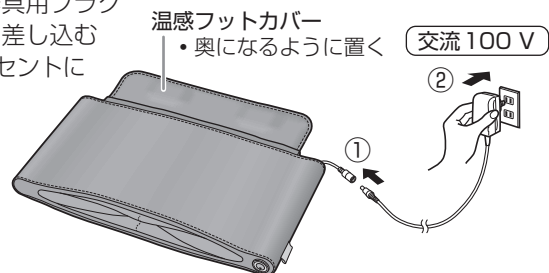


2 本体の足挿入口から片足ずつ挿入する

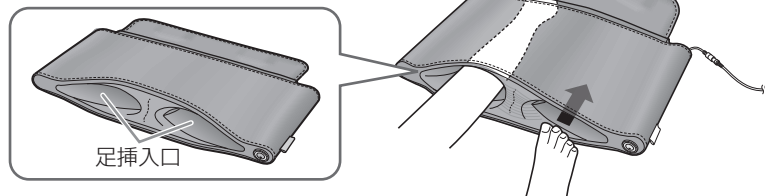

3 足の位置を合わせる


おやすみ前コース／ クイックコース

温感フットカバーの奥までしっかりと足を差し込む

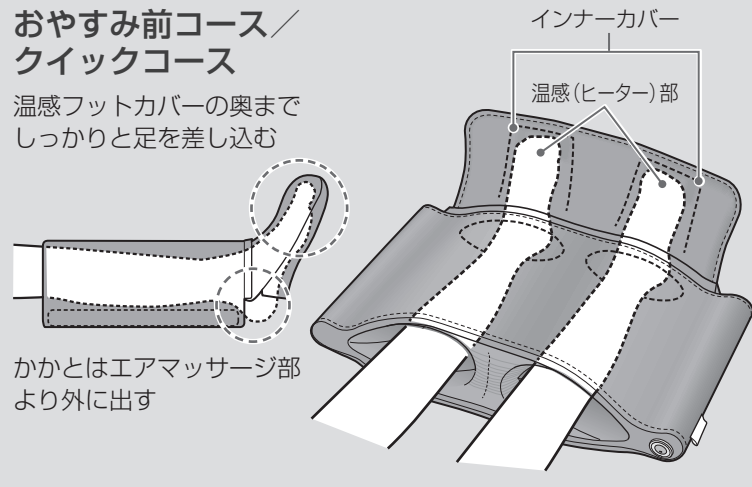

ストレッチコース

本体にかかとが隠れるまで足を差し込む

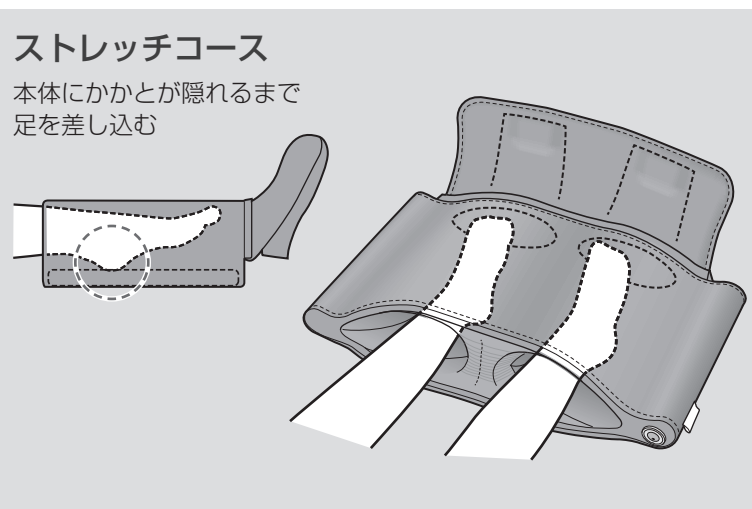

マッサージする

コースを変えるとき／強さを調節するとき

リモコンで操作します。

- 乾電池を入れてください。(P.12)
- ボタンを押しても表示が点灯しない場合や、動作途中で止まってしまう場合は、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。(P.12)




警告

- 初めて使用するときや、使い慣れるまでは「強さ：レベル1」で使用する(けが・体調不良の原因)


コースを変えるとき

- ボタンを押すと、コース表示が切り換わる

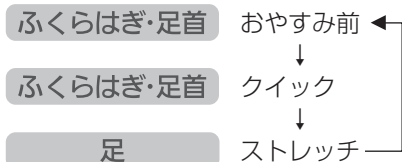

本体の奥側の強さを調節するとき

- ボタンを押すと、強さ表示(LEDランプ)が切り換わる

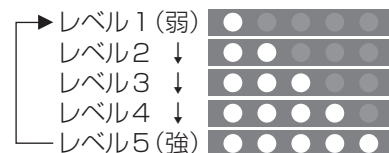

本体の手前側の強さを調節するとき

- 途中でコースを変えた場合、マッサージの合計時間が20分を経過すると自動的に終了します。
- 途中で終了したい場合は、**マッサージ切/入**を押してください。
- 強さ調節ボタンで強さレベルを設定すると、使用中のコースでの強さレベルを記憶します。次に使用するときには、記憶した強さレベルでスタートします。
- 使用中、リモコンの落下などで乾電池がはずれると、リモコンの動作は終了しますが、本体の電源は切れません。本体の停止ボタンを押して電源を切ってください。(P.20) (強さレベルは記憶しません)




コース表示が点滅しているときは、ボタンを1回押して復帰してから操作してください。(P.9 リモコンの電池セーブ機能)

2秒押し マッサージ切/入 を長押しすると(電源が入り)、マッサージがスタート

- 初期設定は「おやすみ前20分」「強さ：レベル1」(右の表示例のように点灯)
- 2回目からは、前回使用したコースと強さレベルでスタート
- タイマー
おやすみ前コース：約20分 (自動的に終了します)
クイックコース：約10分
ストレッチコース：約10分



(表示例：初期設定のとき)

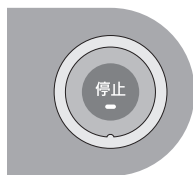

●表示

<リモコンの表示>

- 乾電池の消耗を抑えるため、操作してから約30秒でリモコンの電池セーブ機能が働きます。(P.9)

<本体の停止ボタン>

- 点灯
- マッサージが終了すると消灯(温感を使っている場合は、消灯しません。P.18)

- リモコン操作時(表示点灯中)に鳴る本体からの音

- マッサージ「入」/コース選択/強さ調節：「ピッ」
- コース「ストレッチ」→「おやすみ前」に変更時/強さ「レベル5」→「レベル1」に調節時：「ピピッ」
- マッサージ「切」：「ピー」

温感(ヒーター)を入れる

足先の温度を調節するとき

温感(ヒーター)は、温感だけ(60分間)でもマッサージと同時でも使えます。
マッサージをする前に事前に温めておくこともできます。
必ず足先を温感フットカバー(インナーカバー付き)に入れて使用してください。


リモコンで操作します。

- 乾電池を入れてください。(P.12)
- ボタンを押しても表示が点灯しない場合や、動作途中で止まってしまう場合は、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。(P.12)

足先の温度を調節するとき

- ボタンを押すと、温感表示が切り換わる

低 → 高 → 切
↑

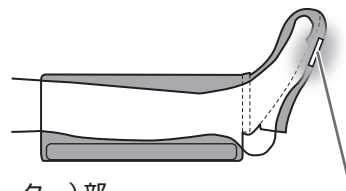


温感(ヒーター)部

- 足先部分の布地を温めます。
脚全体が温まるものではありません。
治療器としての温熱効果はありません。
- お好みに合わせて、
高温(約40℃)、低温(約37℃)の
2段階の選択が可能です。
初めて使用するときや、使い慣れるまでは
「低」で使用することをおすすめします。

2秒押し
温感60分
切/入
を長押しすると(電源が入り)、
温感がスタート

- 「低」でスタート(右の表示例のように点灯)
- タイマー：約60分
(自動的に終了します)

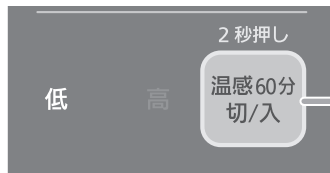

(表示例：温感「低」のとき)


● 表示

＜リモコンの表示＞

- 乾電池の消耗を抑えるため、操作してから約30秒でリモコンの電池セーブ機能が働きます。(P.9)

＜本体の停止ボタン＞

- 点灯
- 温感が終了すると消灯
(マッサージを使っている場合は
消灯しません。P.16)

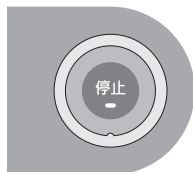


● リモコン操作時(表示点灯中)に鳴る本体からの音

- 温感「切」「入」/温度調節：「ピッ」
- 温感「切」を押した後、3秒放置：「ピー」(自動的に終了)
- 温感「切」→「低」への調節時：「ピピッ」



温感表示が点滅しているときは、
ボタンを1回押して復帰してから
操作してください。
(P.9 リモコンの電池セーブ機能)

- 途中で切りたい場合は、を押してください。
- 使用中、リモコンの落下などで乾電池がはずれると、リモコンの動作は終了しますが、本体の電源は切れません。本体の停止ボタンを押して電源を切ってください。(P.20)


停止ボタンについて

マッサージや温感使用中、リモコンが手もとにないときなど、本体の停止ボタンで電源を切ることができます。

- 使用中は、動作表示(LEDランプ)が点灯しています。ボタンを押すと、「ピー」と鳴って消灯します。



動作表示：緑
(LEDランプ)

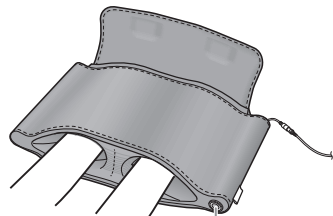

停止ボタン

- 停止ボタンを押して本体の電源を切っても、リモコンのマッサージや温感のタイマーは停止しません。

→停止後すぐに使いたいとき

リモコンのマッサージと温感のタイマーを下記の手順で「切」にしてください。

- ① リモコンの表示が点滅しているときは、ボタンを押して点灯させる

- ② マッサージ切/入を押す / 温感60分切/入を押す

(「低」表示のとき：2回押す、「高」表示のとき：1回押す)


→すぐに使わないとき

リモコンのマッサージや温感のタイマー時間経過後、通常通り使えます。

使い終わったら


必ず電源「切」の状態で行ってください。

1 片足ずつ抜く

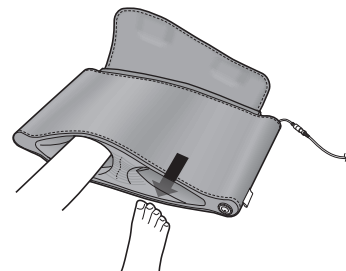

2 ACアダプターを抜く

- ① 電源プラグをコンセントから抜く
- ② 器具用プラグを器具用プラグ差込口から抜く

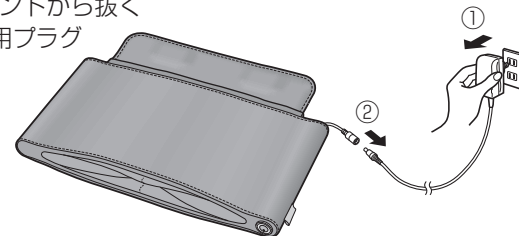

お手入れ・保管

お手入れ

必ずACアダプターの電源プラグ・器具用プラグを抜いた状態で行ってください。

シンナー・ベンジン・アルコールは絶対使用しない
(故障や部品の割れ、変色などの原因)



1 ふき取り用の布を水にひたし、よくしぼる

- 本体は水洗いできません。
- 汚れが気になる場合は、台所用中性洗剤をぬるま湯か水で約5%に薄めたものを使用してください。

2 汚れをふく

- 本体やリモコンに無理な力を加えたり、落としたりしない(故障の原因)




インナーカバー(グレーの起毛生地)は、はずして丸洗いです。





取りはずし

- ① 温感フットカバーを手前にする

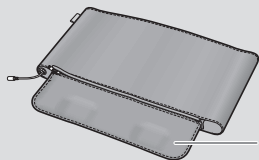

温感フットカバー

- ② 温感フットカバーをめくり、面ファスナー(部分、片足につき3か所)をはずす

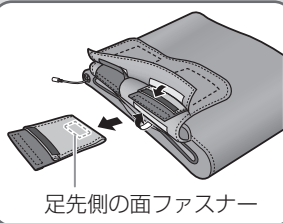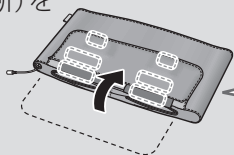


足先側の面ファスナー

取り付け

- ① インナーカバーの形を整える(裏返して、起毛面を内側にする)
- ② 温感フットカバーの内側に入れる
- ③ 足先側の面ファスナーを固定した後、ほかの面ファスナーを固定する

保管するときは


- 本体やリモコンは次のような場所には置かない
 - ・ 温度・湿度が高い所(故障・生地が変色する原因)
 - ・ 日光が当たる所(生地が変色する原因)
 - ・ 小さな子供の手の届く所(事故・けがの原因)
- 本体の表面にものを置いた状態で保管しない(表面に跡がつく・色が移る・変色する原因)
- コードや温感フットカバーを持って運ばない(けが・故障の原因)
- 本体を細かく折り畳んだり、丸めない(けが・故障の原因)
- 犬や猫などのペットを近づけない(破損・故障の原因)

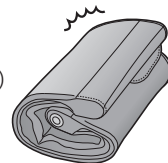


廃棄について ● お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

洗いかた

- ① 起毛面を外側にする

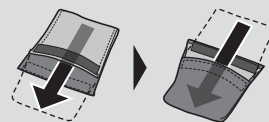

- ② 面ファスナーを固定する

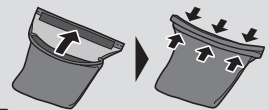

- ③ 洗濯用ネットに入れる

- ④ 30℃以下の水に浸し、やさしく押し洗いする

- ・ 漂白成分が入っている洗剤は使わない(色落ちの原因)
- ・ もみ洗いは絶対にしない(生地の傷みの原因)
- ・ 他の物と分けて洗う(移染の原因)

- ⑤ 十分にすすぐ

- ⑥ 軽く押し程度に水を切る

- ・ ねじったり、絞って脱水しない(生地の傷み・糸ほつれの原因)

- ⑦ 軽くしわを伸ばし、陰干しする

- ・ 天日干しや、タンブラー乾燥はしない(生地の縮み・生地が変色する原因)
- ・ 洗った後は直ぐに干す(移染の原因)

面ファスナーにごみ・髪の毛などがからまった場合は、つまようじなどで取り除いてください。

品質表示

ポリエステル 95 %
ポリウレタン 5 %



よくあるご質問

使ってはいけないときはありますか？

- 脚部に重度の血行障害がある
- 妊娠中や出産直後

以上のような場合は使用できません。(P.2)

また、発熱時や身体に特に異常を感じているときは必ず医師と相談のうえ、使用してください。

1日何回使ってもいいですか？

- マッサージの1日の使用回数は1回です。(約20分で自動的に終了します)
マッサージの1回の使用が20分未満の場合、複数回の合計使用時間を1日20分以内にしてください。(P.3)
長時間のご使用は筋肉や神経に必要以上の刺激となり、逆効果になることがあります。
- 温感の1日の使用回数は1回です。(約60分で自動的に終了します)(P.3)

好きな部位に使えますか？

- 足・ふくらはぎ用です。それ以外の部位に使用すると、事故やけがの原因になります。

使用できる足・ふくらはぎのサイズは？

- 使用可能な足サイズ：約20 cm～28 cm
- 使用可能なふくらはぎ周囲：約27 cm～約48 cm

足先が熱すぎるのですが・・・

- 温感を「低」にしてください。それでも熱い場合は厚手のソックスなどを使用してください。

かかとやふくらはぎが温かくないのですが・・・

- 温感(ヒーター)部は足先部分の布地を温めます。
脚全体が温まるものではありません。治療器としての温熱効果はありません。

マッサージ中に痛く感じる時があるのですが・・・

- エアーバックの構造上、膨らむ際に皮膚が引っ張られる感覚が生じます。
痛みをともなう場合は、強さレベルを弱くしてください。
それでも痛く感じる場合は、厚手のソックスなどを使用してください。

折り畳んで使用してもいいですか？

- 本体は平らな状態で使用してください。折り畳んだ状態で使用すると故障の原因になります。

空気が抜けないのですが・・・

- エアーバッグに残っている空気が多いと、空気が抜けるのに時間がかかる場合があります。空気が自然に抜けるまでしばらく待ってください。

下記のような音が鳴ります。異常ですか？

- ボコ音 (エアーバッグに空気が入るときの音です)
- カチカチ音 (空気を調整する音です)
- ウォーン音・ウィーン音 (モーター音です)

構造上発生するものですので、異常ではありません。

リモコンで通信できる距離は？

- 本体から約5 m以内で通信できます。
- 本体とリモコンの間に障害物があったり、近くに干渉機器がある場合や、周囲環境、建物の構造によって通信距離が短くなったり通信できなくなることがあります。
上記の通信距離を保証するものではありませんのでご了承ください。
 - 障害物 : 金属(鉄筋コンクリート、金属家具など)・水・人
 - 干渉機器 : 他の通信機器

リモコンがきかないときがあるのですが・・・

- 使用環境により、まれに反応しないときがあります。
リモコンの向きを変えると反応する場合がありますので、お試しください。

海外で使用できますか？

この商品はAC100 V日本国内専用のため、海外では使用できません。
また、変圧器や変換プラグを使用すると、故障の原因となります。

1か月の電気代は？

- マッサージを1日20分と温感を1日60分毎日使用した場合、約15円(税込み)
マッサージのみ1日20分毎日使用した場合、約4円(税込み)
温感のみ1日60分毎日使用した場合、約12円(税込み)
(電力料金目安単価31円/kWh(税込み)【2022年7月改定】で計算)

修理を依頼される前に

「よくあるご質問」(P.24～25) および下記の確認をお願いします。

確認後なお異常がある場合は、まずACアダプターをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。(詳しくは P.29)

症 状	確認していただくこと
リモコンのボタンを押しても表示(LEDランプ)が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコンの乾電池が正しく入っていますか？(P.12) ● 乾電池が消耗しています。 →新しい乾電池に交換してください。(P.12)
リモコンのボタンを押しても本体が動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグや器具用プラグが抜けていませんか？(P.14) ● 本体から離れすぎていたり、本体とリモコンの間に障害物などありませんか？(P.25) ● 本体の停止ボタンで停止していませんか？(P.20) ● 本体とリモコンの通信ができていない場合があります。 →ACアダプターを接続した状態で、本体の停止ボタンを「ピピピッ」と鳴るまで長押しした後、リモコンのマッサージ切/入ボタンを長押ししてスタートしてください。
本体の動作が途中で止まる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグや器具用プラグが抜けていませんか？(P.14) ● スタートしてからおやすみ前コースは約20分、クイックコース・ストレッチコースは約10分、温感は約60分で自動的に終了します。 ● マッサージ中にコースを変えた場合、マッサージの合計時間が20分を経過すると自動的に終了します。 ● 乾電池が消耗しています。 →新しい乾電池に交換してください。(P.12)
足先に温かさを感じない	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコンの温感切/入ボタンを押してから、約5分で温感(ヒーター)部が温まります。 ● リモコンの温感表示が点灯していますか？ →温感切/入ボタンを押すと、温感表示が点灯します。(P.19) ● 足先が温感(ヒーター)部に当たっていますか？(P.15) ● 厚手の靴下を履いていませんか？ ● 温かさの感じかたは、室温・衣類・体型により異なることがあります。

こんなときは…

症 状	確認していただくこと
本体・リモコン・ACアダプターが異常に熱い	<p>故障です。 事故防止のため、ただちに使用を中止して必ず販売店にご相談ください。 (点検や修理に出すときは、本体とリモコンを一緒にお渡しください)</p>
破損した	
布地が破れた (インナーカバー除く)	
時間がたっても空気が抜けない	
停止ボタンを押しても停止しない	

消耗品

インナーカバー
品番：EWRA150H7227
(2枚入り)



消耗品は販売店で買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、登録をお願いいたします。

定格・仕様

本体	販 売 名	エアーマッサージャー EW-RA150
	使 用 電 源	電源AC100 V 50-60 Hz
	定 格 消 費 電 力	24 W (電熱装置の定格消費電力 12 W)
	類 別	機械器具 77 バイブレーター
	一 般 的 名 称	家庭用エアマッサージャー
	医 療 機 器 の 種 類	管理医療機器
	医療機器認証番号	304AKBZX00005000
	エ ア ー 圧 力	強さ レベル1：約13 kPa レベル2：約25 kPa レベル3：約30 kPa レベル4：約35 kPa レベル5：約40 kPa (コースや部位によって若干の違いがあります)
	タ イ マ ー	マッサージ：おやすみ前 約20分 クイック・ストレッチ 約10分 温感：約60分
	寸 法	約 幅700×奥行540×高さ60 mm(温感フットカバー含む)
	質 量	約1 850 g (ACアダプター・リモコンは除く)
	コ ー ド の 長 さ	約1.8 m
リモコン	対 応 サ イ ズ	足サイズ：約20 cm～28 cm ふくらはぎ周囲：約27 cm～約48 cm
	内側布地表面温度 (室温20℃の場合)	低：約37℃ 高：約40℃
	品 番	EWRA150H4457
	電 源 (電 池)	DC3 V (単4形アルカリ乾電池LR03×2本)
	通 信 周 波 数	315 MHz
	寸 法	幅42×奥行152×高さ16 mm
製造販売元	質 量	約53 g (乾電池含まず)
	製造販売元	パナソニック株式会社 東京都港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル

・本製品は日本国内専用です。製品の保証は、日本国内での使用に限ります。
・Use only in Japan. Product warranty valid for only utilization in Japan.

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	() -
お買い上げ日	年 月 日
●製品名	エアーマッサージャー
●品 番	EW-RA150
●故障の状況	できるだけ具体的に

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.26～27)
でご確認のあと、直らないときは、
まずACアダプターを抜いて、お買い
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、
おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間 (ただし、インナーカバーは消耗品ですので、
保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このエアーマッサージャーの補修用性能部品 (製品の機能を維持するための
部品) を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.30)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応
や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が
ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ
は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口 https://panasonic.jp/support/



理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-697

受付時間
9:00～18:00 月～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-554

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**

<https://panasonic.jp/support/repair.html>



- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記の URL はお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

0422

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.29をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のエアーマッサージャーの点検を!



こんな
症状はあり
ませんか

- ・コード・プラグが傷んでいる。
- ・動作中に異常な音・振動がある。
- ・本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。



ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから
ACアダプターを
抜いて、
必ず販売店に
点検をご依頼
ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2022

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用など) に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

エアーマッサージャー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW-RA150		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間 (ただし、インナーカバーは除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	<div>見本</div> <div>ご住所 お名前 電話 () - 住所・販売店名 電話 () -</div>		

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL (077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。